



WARNUNG für die rangierbare Variante des Betten

Die Option der rangierbaren Bettvariante des 5380/5380 K ist dafür entwickelt, die Möglichkeit zu schaffen, die Betten in unzugänglichen Nischen zu platzieren. Die verwendeten Rollen des Bettes können bei harten oder glatten Böden nicht den optimalen Schutz gegen seitliches Verschieben bieten. In einem solchen Fall müssen diese Betten aus Sicherheitsgründen mit einer Längsseite an die Wand positioniert werden. Nur in Räumen mit einem rutschfesten Bodenbelag (Teppichboden oder weicher Kunststoffbelag) darf das Bett frei im Raum aufgestellt werden. Der Betreiber muss selbst prüfen und entscheiden, ob der Boden für eine freie Aufstellung des Bettes geeignet ist.

Änderungen für die Modelle 5380, 5380 K ab Fertigungsdatum 19.11.2012:

Bei den Modellen 5380 und 5380 K ab Fertigungsdatum 19.11.2012 wurde die sichere Arbeitslast auf 200 kg erhöht.

Somit erhöhen sich auch die, im Kapitel „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ der Gebrauchsanweisung für die Modelle 5380, 5380 K, genannten maximalen Bewohner-/Patientengewichte gemäß der folgenden Tabelle:

Modell	Sichere Arbeitslast	Max. Bewohner-/Patientengewicht	
		in Anwendungs-umgebung 1,2	in Anwendungs-umgebung 3, 4, 5
Betten ab Fertigungsdatum 19.11.2012:			
5380	200 kg	135 kg	165 kg
5380 K	200 kg	135 kg	165 kg
Betten vor Fertigungsdatum 19.11.2012:			
5380	170 kg	105 kg	135 kg
5380 K	170 kg	105 kg	135 kg

Änderungen für die Modelle 5380, 5380 K ab Fertigungsmonat April 2013 bzw. für umgerüstete Betten vor Fertigungsmonat April 2013:

Betten ab Fertigungsmonat April 2013 bzw. umgerüstete Betten vor Fertigungsmonat April 2013 sind mit einem Batteriefach für 4 Batterien (anstatt früher für nur eine Batterie) ausgestattet.

Verwenden Sie bitte Batterien gemäß der folgenden Spezifikationen:

9 V - Blockbatterie(n)

(Alkali-Mangan-Primärzelle, kommerziell erhältlich),

je nach Batteriefach 1 oder 4 Stück

