

WAARSCHUWING voor de verrijdbare variant van het bed

De optie van de verrijdbare bedvariant van de 5380/5380 K werd ontwikkeld om de mogelijkheid te creëren de bedden in ontoegankelijke nissen te plaatsen. De gebruikte wielen van het bed kunnen bij harde of gladde vloeren niet de optimale bescherming tegen zijdelingse verplaatsing bieden. In een dergelijk geval moeten deze bedden om veiligheidsredenen met een lange zijde tegen de wand geïsoleerd worden. Alleen in lokalen met een slipvrije vloerbekleding (tapijt of zachte kunststof bedekking) mag het bed vrij in het lokaal worden opgesteld. De gebruiker moet zelf controleren en bepalen of de vloer geschikt is voor een vrije opstelling van het bed.

Wijzigingen voor de modellen 5380, 5380 K vanaf productiedatum 19.11.2012:

Bij de modellen 5380 en 5380 K werd de veilige werklust vanaf productiedatum 19.11.2012 verhoogd tot 200 kg.

Daardoor verhogen ook de vermelde maximale bewoner-/patiëntgewichtswaarden in het hoofdstuk „Doelmatig gebruik“ van de gebruiksaanwijzing voor de modellen 5380, 5380 K, overeenkomstig de volgende tabel:

| Model | Veilige werklust | Max. bewoner-/patiëntgewicht | |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | in gebruiksomgeving 1,2 | in gebruiksomgeving 3, 4, 5 |
| Bedden vanaf productiedatum 19.11.2012: | | | |
| 5380 | 200 kg | 135 kg | 165 kg |
| 5380 K | 200 kg | 135 kg | 165 kg |
| Bedden vóór productiedatum 19.11.2012: | | | |
| 5380 | 170 kg | 105 kg | 135 kg |
| 5380 K | 170 kg | 105 kg | 135 kg |

Wijzigingen voor de modellen 5380, 5380 K vanaf productiedatum april 2013 en voor omgebouwde bedden van vóór productiedatum april 2013:

Bedden vanaf productiedatum april 2013 en omgebouwde bedden van vóór productiedatum april 2013 zijn met een batterijvak voor 4 batterijen (i.p.v. slechts één batterij, zoals vroeger) uitgerust.

Gebruikt u a.u.b. batterijen overeenkomstig de volgende specificatie:

9 V-batterij(en)

(alkali-mangaancel, in de handel verkrijgbaar), afhankelijk van batterijvak 1 of 4 stuks

