


Bedhekken rechtop zetten

1. Trek het bedhek horizontaal helemaal naar u toe.
2. Klap de matrashouder en het bedhek tegelijkertijd naar boven. Let erop dat het bedhek duidelijk hoorbaar vastklikt.

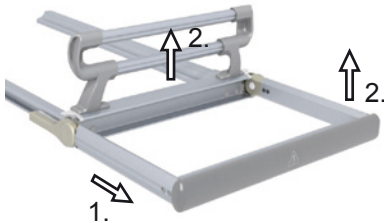

3. Om de hoogte van het bedhek te verstellen, trekt u het uitschuifbare gedeelte helemaal naar boven.

Let erop dat bedhekken die op een hoogte van 43,5 - 45 cm worden ingesteld uitsluitend in combinatie met klemstukken aan de hoofd- en voetelementen mogen worden geïnstalleerd. De hoofd- en voetelementen moeten daarbij zo gepositioneerd zijn, dat de klemstukken naar de binnenkant van het bed gericht zijn.





Bedhek neerklappen

1. Druk op de beide knoppen op de buitenkant van het frame, net onder de handgreep, om het in de laagste verstelbare bedhek in de laagste stand te brengen.



 *Vervolg op de volgende pagina.*

2. Druk op de ontgrendellat waar „Drücken / Press“ op gedrukt staat, aan het onderste uiteinde van het bedhek en kantel het naar beneden tot het parallel staat met de vloer.

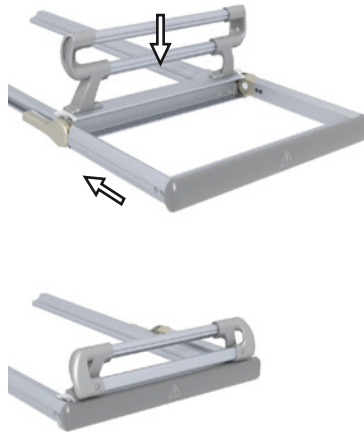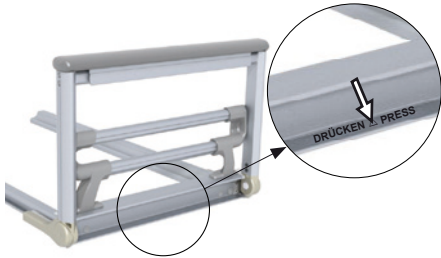

3. Schuif het bedhek volledig onder het ligvlak en klap de matrashouder naar beneden.

Het rechtop zetten van alle vier de bedhekken zorgt voor een maximale beveiliging van de patiënt.

⚠ WAARSCHUWING De bedhekken moeten altijd met twee handen bij de uiteinden worden vastgepakt en naar boven/onder worden bewogen.

⚠ VOORZICHTIG Horizontaal uitgetrokken bedhekken mogen met maximaal 15 kg belast worden!

OPMERKING Dankzij hun buitengewone stabiliteit kunnen de bedhekken ook worden gebruikt om beddengoed neer te leggen (max. 15 kg) of als bijkomend steunvlak bij zorg gerelateerde posities, zoals bijv. bij de Bobathligpositie of bij het uitvoeren van fysiotherapeutische behandelingen.

OPMERKING Gelieve de instructies in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!