

Beknopte gebruiksaanwijzing


model 2082 vanaf bouwjaar 06/2009

VÖLKER

A. Bedhekken


Bedhekken opzetten

Om de bedhekken op te zetten, grijpt u in de greepholte en trekt u het eerst aan het hoofdeinde en dan aan het voeteneinde naar omhoog tot het hoorbaar vastklikt.

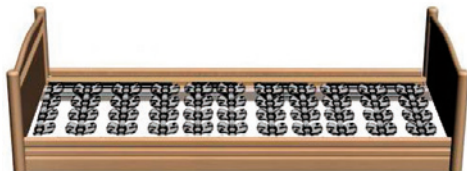


Behekken neerlaten

Om de bedhekken neer te laten, grijpt u in de greepholte en tilt u ze lichtjes op. Druk op de zijdelings aangebrachte vergrendelknop en laat het bedhek vervolgens met de hand eerst langs voetzijde en dan langs hoofdzijde neer.

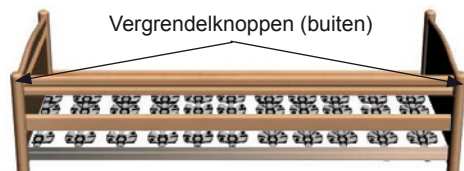

B. Handschakelaar

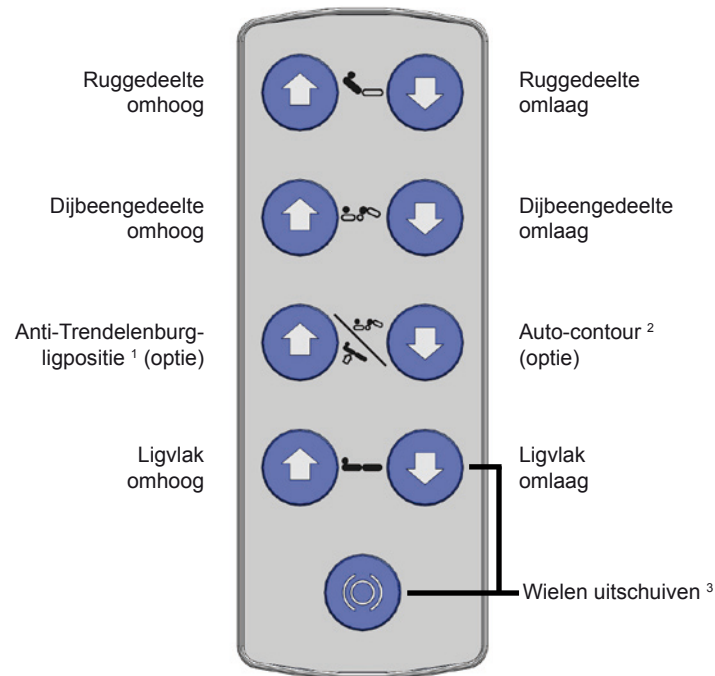

¹ Ligpositie met hoofd naar omhoog

² Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

³ Beide toetsen gelijktijdig indrukken: ligvlak naar de laagste positie en wielen worden uitgeschoven

Beknopte gebruiksaanwijzing

model 2082 vanaf bouwjaar 06/2009

VÖLKER

C. Toetsenvergrendeling van de handshakelaar

Door het activeren van de toetsenblokkering van de handshakelaar, worden alle functies van de handshakelaar vergrendeld.




Handshakelaar geblokkeerd



Handshakelaar gedeblokkeerd

De handshakelaar kan ook met de toets „Handshakelaar vergrendelen“ (14) op de zusterbox worden vergrendeld.

D. Zusterbox met afzonderlijke vergrendeling (optie)

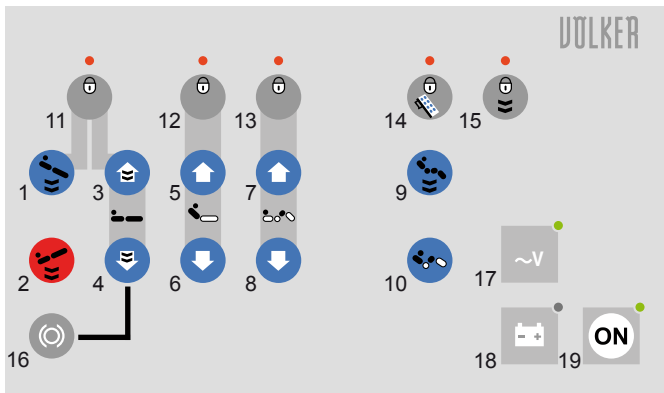

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Anti-Trendelenburg-ligpositie ^{1,8} | 11 | Ligvlakslag en Anti-Trendelenburg-positie vergrendelen |
| 2 | Trendelenburg-ligpositie ^{2,8} | 12 | Ruggedeelte vergrendelen |
| 3 | Ligvlak omhoog ⁸ | 13 | Dijbeengedeelte vergrendelen |
| 4 | Ligvlak omlaag ⁸ | 14 | Handshakelaar vergrendelen |
| 5 | Ruggedeelte omhoog | 15 | Automatische functie vergrendelen |
| 6 | Ruggedeelte omlaag | 16 | Wielen uitschuiven ⁴ |
| 7 | Dijbeengedeelte omhoog | 17 | Netspanningslampje ⁵ |
| 8 | Dijbeengedeelte omlaag | 18 | Acculampje ⁶ |
| 9 | Cardiac-Chair-positie ⁸ | 19 | Inschakelen ⁷ |
| 10 | Auto-contour ³ | | |

¹ Ligpositie met hoofd naar omhoog

² Ligpositie met hoofd naar omlaag

³ Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

⁴ Beide toetsen gelijktijdig indrukken: ligvlak naar de laagste positie en wielen worden uitgeschoven

⁵ groen: netspanning aanwezig

⁶ groen: >80% geladen; geel: 30-80% geladen; rood: ontladen; knipperend: wordt geladen

⁷ na het indrukken van de toets is het toetsenbord nog 120 sec. na de laatste bediening beschikbaar, daarna wordt het automatisch vergrendeld

⁸ landspecifieke automatische functie door dubbelklik mogelijk

OPMERKING Denk er aan dat de zusterbox moet worden ingeschakeld door te drukken op de „ON“-toets om het bed te bedienen. Wanneer geen enkele elektrische functie meer reageert op de bediening, dient u de groene resetknop op de motorbehuizing in te drukken. Wanneer het batterijlampje daarna rood brandt, dient u de netstekker even uit het stopcontact te trekken. Nadat u de netstekker weer hebt ingestoken, drukt u op de groene knop van de netonderbreking om het bed weer in bedrijf te stellen. De beide groene knoppen mogen nooit gelijktijdig worden ingedrukt.

OPMERKING Het bed is niet geschikt voor reiniging in de wasstraat (IPX4).

OPMERKING Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!