

# Kurzgebrauchsanweisung

Modelle 3082, 3082 K ab Baujahr 06/2009

VÖLKER


## A. Seitengitter

### Seitengitter aufstellen


1. Ziehen Sie das Seitengitterelement seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.
2. Um die Höhe des Seitengitters einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

### Seitengitter herunterklappen

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens (Abb.1), dicht unter dem Holm, um das höhenverstellbare Seitengitterelement in die niedrigste Position zu bringen.
2. Betätigen Sie den mit „Drücken / Push“ beschrifteten Auslöser am unteren Ende des Seitengitterelements (Abb. 2) und kippen Sie es seitlich in die Horizontale, sodass es sich parallel zum Boden befindet.
3. Schieben Sie das Gitterelement vollständig unter die Liegefläche (Abb. 3a, Abb. 3b).

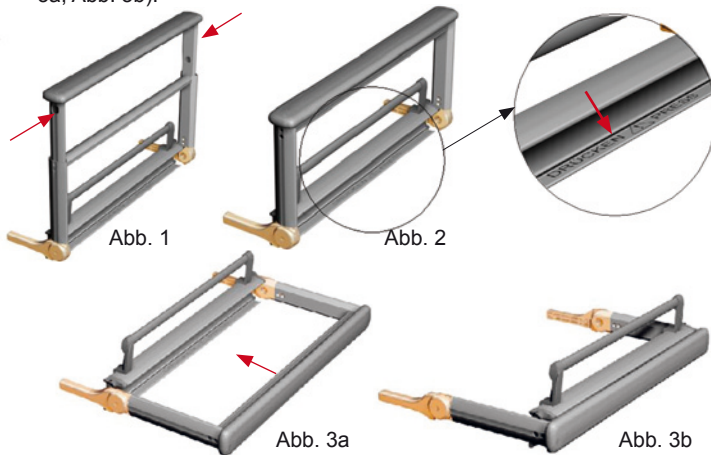

## B. Handschalter

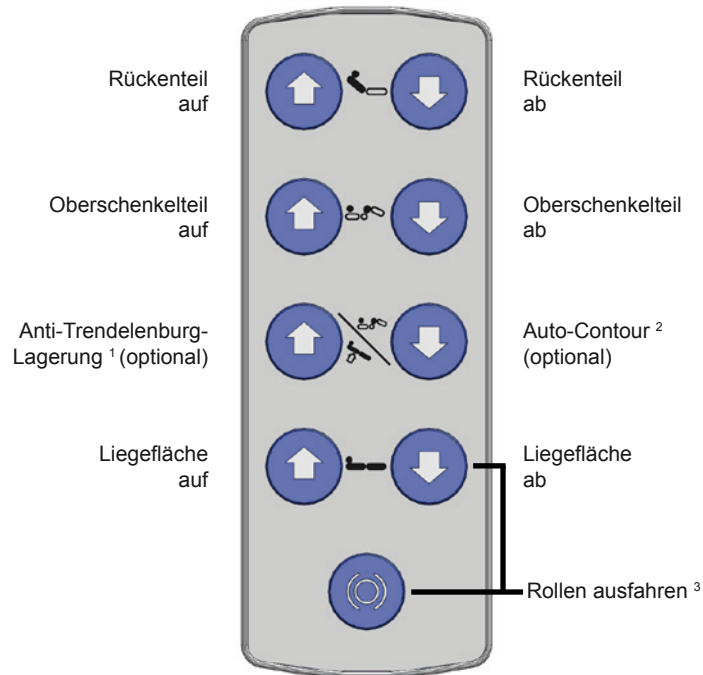

<sup>1</sup> Kopfhochlagerung

<sup>2</sup> Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

<sup>3</sup> beide Tasten gleichzeitig drücken: Liegefläche in niedrigste Position und Rollen fahren aus

# Kurzgebrauchsanweisung

Modelle 3082, 3082 K ab Baujahr 06/2009

VÖLKER

## C. Tastensperre des Handschalters

Durch die Aktivierung der Tastensperre des Handschalters werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt.




Handschalter gesperrt



Handschalter entsperrt

Der Handschalter kann auch durch die Taste „Handschalter sperren“ (14) an der Personal tastatur gesperrt werden.

## D. Personal tastatur mit Einzelspernung (Option)

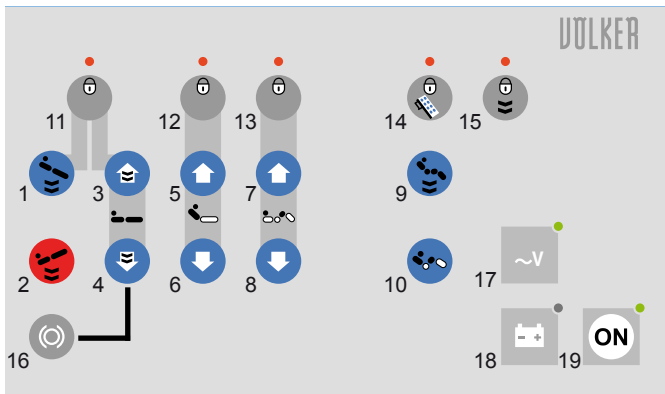

- 1 Anti-Trendelenburg-Lagerung <sup>1,8</sup>
- 2 Trendelenburg-Lagerung <sup>2,8</sup>
- 3 Liegefläche auf <sup>8</sup>
- 4 Liegefläche ab <sup>8</sup>
- 5 Rückenteil auf
- 6 Rückenteil ab
- 7 Oberschenkelteil auf
- 8 Oberschenkelteil ab
- 9 Cardiac-Chair-Position <sup>8</sup>
- 10 Auto-Contour <sup>3</sup>
- 11 Liegeflächenhub und Anti-Trendelenburg-Lagerung sperren
- 12 Rückenteil sperren
- 13 Oberschenkelteil sperren
- 14 Handschalter sperren
- 15 Automatikfunktion sperren
- 16 Rollen ausfahren <sup>4</sup>
- 17 Netzspannungsanzeige <sup>5</sup>
- 18 Akkuanzeige <sup>6</sup>
- 19 Einschalten <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Kopfhochlagerung

<sup>2</sup> Kopftief Lagerung

<sup>3</sup> Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

<sup>4</sup> beide Tasten gleichzeitig drücken: Liegefläche in niedrigste Position und Rollen fahren aus

<sup>5</sup> grün: Netzspannung liegt an

<sup>6</sup> grün: >80% geladen; gelb: 30-80% geladen; rot: entladen; blinkend: wird geladen

<sup>7</sup> nach Drücken der Taste ist die Tastatur bis 120 sec. nach der letzten Betätigung verfügbar, danach sperrt sie sich automatisch

<sup>8</sup> länderspezifisch Automatikfunktion durch Doppelclick möglich

**HINWEIS** Bitte beachten Sie, dass die Personal tastatur durch Drücken der „ON“-Taste eingeschaltet werden muss, um das Bett zu bedienen. Sollte keine elektrische Funktion mehr anzusprechen sein, drücken Sie den grünen Resetknopf am Motorgehäuse. Sollte danach die Akkuanzeige rot leuchten, ziehen Sie kurzzeitig den Netzstecker. Nach dem Wiedereinstecken des Netzsteckers ist der grüne Knopf an der Netzfreeschaltung zu drücken, um das Bett wieder in Betrieb zu nehmen. Es sollten niemals beide grüne Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden.

**HINWEIS** Das Bett ist nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet (IPX4).

**HINWEIS** Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!