

# Beknopte gebruiksaanwijzing

modellen 3082, 3082 K vanaf bouwjaar 06/2009

VÖLKER


## A. Bedekken

### Bedekken opzetten


1. Trek het bedhek zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het omhoog.
2. Om de hoogte van het bedhek in te stellen, trekt u het telescopische gedeelte tot de aanslag naar boven.

### Bedhek neerklappen

1. Druk op de beide knoppen op de buitenkant van het frame (afb. 1), net onder de handlijst, om het in de hoogte verstelbare bedhek in de laagste stand te brengen.
2. Druk op de ontgrendeling waar „Drücken / Push“ op gedrukt staat, aan het onderste uiteinde van het bedhek (afb. 2) en kantel het zijbeveiligingsdeel naar beneden tot het parallel staat met de vloer.
3. Schuif de bedhek volledig onder het ligvlak (afb. 3a, afb. 3b).

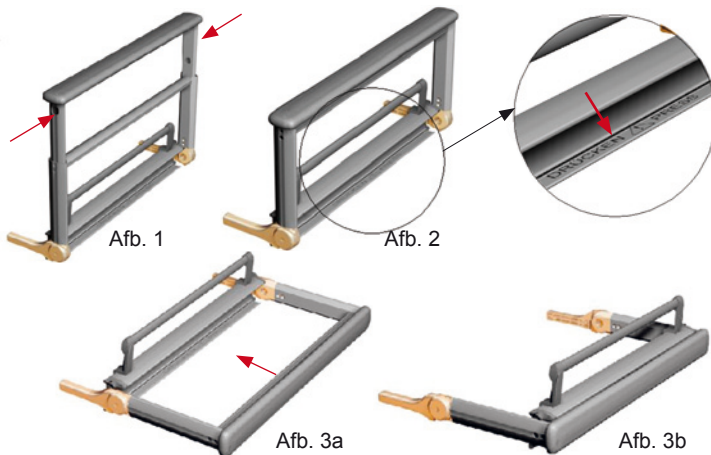

## B. Handschakelaar

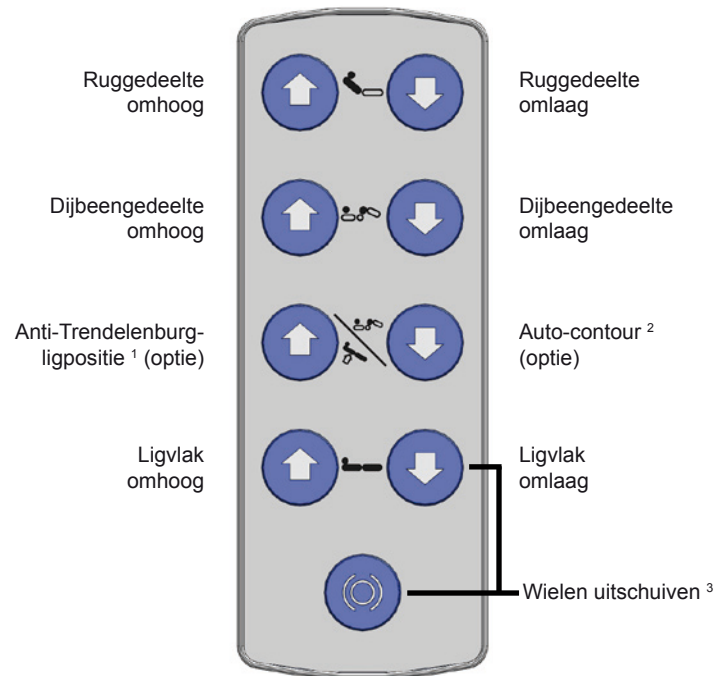

<sup>1</sup> Ligpositie met hoofd naar omhoog

<sup>2</sup> Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

<sup>3</sup> Beide toetsen gelijktijdig indrukken: ligvlak naar de laagste positie en wielen worden uitgeschoven

# Beknopte gebruiksaanwijzing modellen 3082, 3082 K vanaf bouwjaar 06/2009

# VÖLKER

## C. Toetsenvergrendeling van de handshakelaar

Door het activeren van de toetsenblokkering van de handshakelaar, worden alle functies van de handshakelaar vergrendeld.




Handshakelaar geblokkeerd



Handshakelaar gedeblokkeerd

De handshakelaar kan ook met de toets „Handshakelaar vergrendelen“ (14) op de zusterbox worden vergrendeld.

## D. Zusterbox met afzonderlijke vergrendeling (optie)

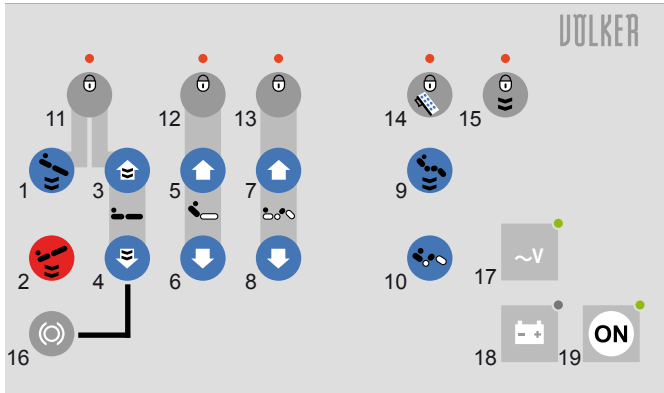

- 1 Anti-Trendelenburg-ligpositie <sup>1,8</sup>
- 2 Trendelenburg-ligpositie <sup>2,8</sup>
- 3 Ligvlak omhoog <sup>8</sup>
- 4 Ligvlak omlaag <sup>8</sup>
- 5 Ruggedeelte omhoog
- 6 Ruggedeelte omlaag
- 7 Dijkegedeelte omhoog
- 8 Dijkegedeelte omlaag
- 9 Cardiac-Chair-positie <sup>8</sup>
- 10 Auto-contour <sup>3</sup>
- 11 Ligvlakslag en Anti-Trendelenburg-positie vergrendelen
- 12 Ruggedeelte vergrendelen
- 13 Dijkegedeelte vergrendelen
- 14 Handshakelaar vergrendelen
- 15 Automatische functie vergrendelen
- 16 Wielen uitschuiven <sup>4</sup>
- 17 Netspanningslampje <sup>5</sup>
- 18 Acculampje <sup>6</sup>
- 19 Inschakelen <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ligpositie met hoofd naar omhoog

<sup>2</sup> Ligpositie met hoofd naar omlaag

<sup>3</sup> Rug- en dijebeengedeelte gelijktijdig omhoog

<sup>4</sup> Beide toetsen gelijktijdig indrukken: ligvlak naar de laagste positie en wielen worden uitgeschoven

<sup>5</sup> groen: netspanning aanwezig

<sup>6</sup> groen: >80% geladen; geel: 30-80% geladen; rood: ontladen; knipperend: wordt geladen

<sup>7</sup> na het indrukken van de toets is het toetsenbord nog 120 sec. na de laatste bediening beschikbaar, daarna wordt het automatisch vergrendeld

<sup>8</sup> landspecifieke automatische functie door dubbelklik mogelijk

**OPMERKING** Denk er aan dat de zusterbox moet worden ingeschakeld door te drukken op de „ON“-toets om het bed te bedienen. Wanneer geen enkele elektrische functie meer reageert op de bediening, dient u de groene resetknop op de motorbehuizing in te drukken. Wanneer het batterijlampje daarna rood brandt, dient u de netstekker even uit het stopcontact te trekken. Nadat u de netstekker weer hebt ingestoken, drukt u op de groene knop van de netonderbreking om het bed weer in bedrijf te stellen. De beide groene knoppen mogen nooit gelijktijdig worden ingedrukt.

**OPMERKING** Het bed is niet geschikt voor reiniging in de wasstraat (IPX4).

**OPMERKING** Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!