


Kurzgebrauchsanweisung Server RT-985, Server Vis-a-Vis

VÖLKER

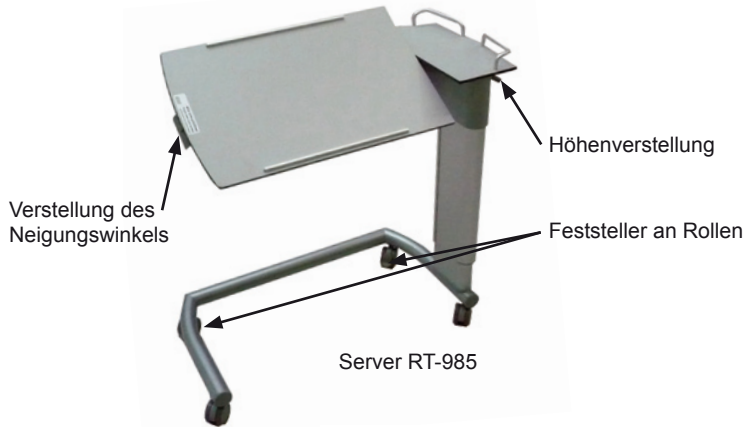

Höhenverstellung

Um das Tablett nach oben zu verstellen, ziehen Sie es langsam nach oben.
Um es nach unten zu verstellen, drücken Sie den Griff nach oben, und lassen Sie es vorsichtig ab.



Verstellung des Neigungswinkels

Um den Neigungswinkel des Tablett zu verstellen, drücken Sie den Griff nach oben und kippen das Tablett in die gewünschte Richtung.



VORSICHT Stützen Sie sich nicht auf den Server!



VORSICHT Der Server ist nicht zum Personentransport geeignet!



VORSICHT Stellen Sie die Rollen des Servers stets fest, um ihn vor dem Wegrollen zu sichern!



VORSICHT Während Sie den Neigungswinkel des Tablett zu verstellen, dürfen sich keine Gegenstände auf dem Tablett befinden!

HINWEIS Das Gesamtgewicht der Gegenstände, die sich auf dem Server befinden, darf 15 kg nicht überschreiten!