

Kurzgebrauchsanweisung

Nachttische K 941, K 941/2, P 941, P 945

VÖLKER



Ausklappen des Betttisches

Um den Betttisch auszuklappen, drücken Sie ihn etwas nach unten. Anschließend ziehen Sie ihn seitlich vom Nachttisch weg und führen ihn langsam bis zum Anschlag nach oben. Klappen Sie danach den Betttisch in die waagerechte Position.

Verstellung des Neigungswinkels

Um den Neigungswinkel des Betttisches zu verstellen, heben Sie ihn leicht an und schwenken ihn dann in die gewünschte Richtung. Senken Sie den Betttisch anschließend wieder ab, bis er einrastet.

Höhenverstellung

Um den Betttisch nach unten zu verstellen, drücken Sie den schwarzen Knopf zur Höhenverstellung und drücken den Betttisch dabei langsam nach unten. Zum Verstellen nach oben ist eine Betätigung des Knopfes nicht erforderlich.

Einklappen des Betttisches

Um den Betttisch einzuklappen, schwenken Sie ihn gegebenenfalls in die waagerechte Position und klappen ihn anschließend nach oben. Drücken Sie ihn nun langsam nach unten und schwenken ihn unter der Platte des Nachttisches ein.

HINWEIS Das Gesamtgewicht der Gegenstände, die sich auf dem Betttisch befinden, darf 10 kg nicht überschreiten!



VORSICHT Stützen Sie sich nicht auf den Betttisch!



VORSICHT Der Nachttisch ist nicht zum Personentransport geeignet!



VORSICHT Stellen Sie die Rollen des Nachttisches stets fest, um ihn vor dem Wegrollen zu sichern!



VORSICHT Während Sie den Neigungswinkel des Betttisches verstellen, dürfen sich keine Gegenstände auf dem Betttisch befinden!