

Herstel van fouten

Ziekenhuisbed / Verpleegbed Vis-a-Vis

VOELKER

Fout	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van storingen
Bed kan niet elektrisch worden versteld.	<ul style="list-style-type: none"> (1) Toetsenblokkering geactiveerd. (2) Netstekker niet ingestoken of geen spanning op stopcontact en accupack leeg. (3) Accupack is losgekoppeld van schakeling. (4) Handschakelaar defect. (5) Zusterhandschakelaar defect. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Toetsenblokkering opheffen. (2) Steek de stekker in het stopcontact of controleer het stopcontact. (3) Druk op de groene knop van de netvrijschakelaar en bedien vervolgens een handschakelaarfunctie. (4) Handschakelaar vervangen. (5) Zusterhandschakelaar vervangen.
Bed kan niet in hoogte worden versteld.	<ul style="list-style-type: none"> (6) Vis-a-Vis-vergrendeling werd na verstelling van het onderbeengedeelte uit de Vis-a-Vis positie niet gesloten. (7) Ligvlak is niet tot het eindpunt naar het hoofdgedeelte teruggezet. 	<ul style="list-style-type: none"> (6) Vis-a-Vis-vergrendeling aan beide bedzijden sluiten. (7) Bedien op de zusterhandschakelaar de toets „verschuiving in de lengte terug” tot het ligvlak naar het eindpunt is teruggezet.
Ligvlakverschuiving van het bed naar het voetgedeelte kan niet worden uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> (8) Vis-a-Vis-vergrendeling is niet gesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> (8) Vis-a-Vis-vergrendeling aan beide bedzijden sluiten.
Grendel tussen boven- en onderbeengedeelte kan enkel zwaar worden ontresp. vergrendeld.	<ul style="list-style-type: none"> (9) Het onderbeengedeelte en de rest van het bed staan niet exact in een lijn, de bedzijden liggen niet gelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> (9) Zorg ervoor dat de bedzijden in een lijn staan en de wangen tussen het onderbeengedeelte en de rest van het bed exact gelijk liggen.
Onderbeengedeelte kan ondanks ontgrendeling niet worden verschoven.	<ul style="list-style-type: none"> (10) Ligvlak niet ver genoeg naar voren versteld. 	<ul style="list-style-type: none"> (10) Vis-a-Vis-vergrendeling weer sluiten en op de zusterhandschakelaar de toets „ligvlakverschuiving naar voren” bedienen tot het ligvlak naar het eindpunt in richting van het voetgedeelte is verschoven.
Onderbeengedeelte kan niet gemakkelijk worden verschoven.	<ul style="list-style-type: none"> (11) Ondergrond is in schuifrichting oneven. 	<ul style="list-style-type: none"> (11) Bed zo opstellen dat een vlakke ondergrond (vrij van kuilen of verheffingen) in het verschuifgebied van het onderbeengedeelte ter beschikking staat.
Ligvlak kan niet naar het hoofdgedeelte worden teruggezet.	<ul style="list-style-type: none"> (12) Vis-a-Vis-vergrendeling is enkel aan een zijde vergrendeld. (13) Comfortpositie (Anti-Trendelenburg) is niet volledig naar beneden gezet. 	<ul style="list-style-type: none"> (12) Vis-a-Vis-vergrendeling aan beide bedzijden in richting van het hoofdgedeelte schuiven om te vergrendelen. (13) Bedien op de handschakelaar de toets „Ligvlak naar beneden”, tot het ligvlak volledig horizontaal in de onderste positie staat.