


# Beknopte gebruiksaanwijzing Server RT-985, Server Vis-a-Vis

VÖLKER

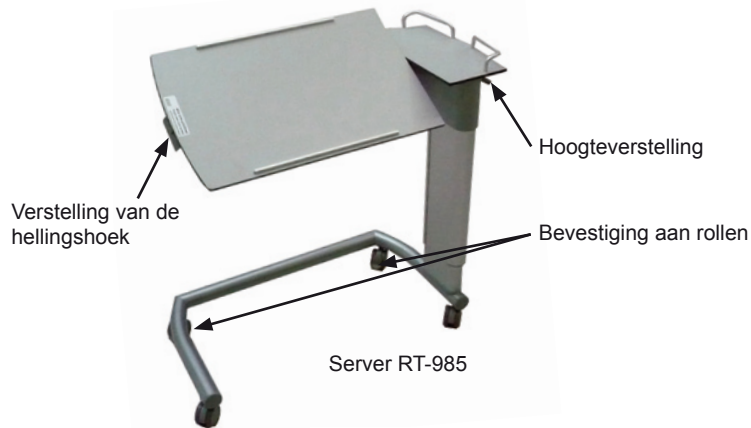

## Hoogteverstelling

Om het dienblad naar boven te verstellen, trekt u het langzaam naar boven. Om het naar beneden te verstellen, drukt u de hendel naar boven en laat u het voorzichtig zakken.



## Verstelling van de hellingshoek

Om de hellingshoek van het dienblad te verstellen, drukt u de hendel naar boven en kantelt u het dienblad in de gewenste richting.



**OPGELET** Steun niet op de server!



**OPGELET** De server is niet geschikt voor personentransport!



**OPGELET** Zet de rollen van de server steeds vast, om wegrollen te voorkomen!



**OPGELET** Terwijl u de hellingshoek van het dienblad vermeld, mogen geen voorwerpen op het dienblad liggen!

**NOTA** Het totale gewicht van de voorwerpen, die op de server staan, mag niet meer dan 15 kg bedragen!