



Infrarot-Handschalter



Handsender zur Programmierung des Handschalters (Option)



Diese Gebrauchsanweisung beschreibt nur die Besonderheiten des Infrarot-Handschalters. Bitte beachten Sie darüber hinaus die Gebrauchsanweisung des Bettes!

Allgemeines und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Handschalter mit Infrarot-Empfänger bietet dieselben Funktionen zur Bedienung der Völker Betten wie die Standard-Handschalter. Der Infrarot-Empfänger ermöglicht zusätzlich die Steuerung von Völker Klinik- und Pflegebetten mit Völker Antrieb durch eine Umgebungssteuerung mit Infrarot-Schnittstelle.

Eine Umgebungssteuerung ermöglicht Personen mit körperlichen Einschränkungen die Bedienung des Bettes.

Der Infrarot-Handsender (Option) wird für die individuelle Programmierung und die Zuordnung zwischen den Betten und den Umgebungssteuerungen benötigt.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Gefahren führen. Hierzu gehören beispielsweise:

- unsachgemäßes Betätigen elektrischer Funktionen und unkontrolliertes Positionieren
- Bedienung des Bettes durch Patienten/Bewohner ohne vorherige Einweisung
- Ziehen an Kabeln, um das Bett zu bewegen oder Steckverbindungen zu lösen
- Bedienung des Bettes durch andere als die vorgesehenen Einrichtungen, zum Beispiel durch programmierbare Fernbedienungen.

Inbetriebnahme

Der Infrarot-Handschalter wird wie jeder andere Handschalter am Doppelantrieb bzw. der Akku-Trafo-Box angeschlossen. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest verschraubt ist, damit Dichtigkeit und sicherer Kontakt gewährleistet sind.

Der Infrarot-Handschalter kann wie der Standard-Handschalter am Bett befestigt werden. Der Infrarot-Empfänger sollte nicht verdeckt sein, ein direkter Sichtkontakt zum Sender der Umgebungssteuerung ist jedoch nicht erforderlich.



VORSICHT Werden in einem Raum mehrere per Infrarot bedienbare Betten verwendet, muss gewährleistet sein, dass jedes Bett nur auf die jeweils zugehörige Umgebungssteuerung reagiert. Aus diesem Grund kann jedem Infrarot-Empfänger eine von vier möglichen Geräteadressen zugeordnet werden.

Es können maximal vier mit Infrarot-Empfänger gesteuerte Betten in einem Raum betrieben werden.

Manuelle Bedienung

Der Infrarot-Handschalter kann wie jeder andere Handschalter ohne Einschränkungen mit den Tasten bedient werden. Die Funktionen sind in der Gebrauchsanweisung des Bettes beschrieben.

Bedienung über Infrarot

Der Infrarot-Empfänger in der Front des Handschalters erfasst das Infrarot-Signal der Umgebungssteuerung und setzt es in Fahrbefehle um. Dabei ist die maximale Fahrzeit auf 3 Sekunden begrenzt. Sie können dann jedoch den Befehl sofort erneut ausführen. Ein gleichzeitiges Betätigen mehrerer Funktionen per Infrarot ist nicht möglich.

Tastensperre

Die Sperrung des Handschalters mittels des Steckschlüssels auf der Rückseite betrifft sowohl die Handbetätigung als auch den Infrarot-Empfang. Ebenso setzt eine Sperre aller Handschalter an einer Personaltastatur den Infrarot-Handschalter komplett außer Funktion. Eine Sperrung einzelner Bedienfunktionen an der Personaltastatur wirkt ebenfalls auf beide Betätigungsarten.

Reinigung und Desinfektion

Der Infrarot-Handschalter kann genauso gereinigt und desinfiziert werden wie in der Gebrauchsanweisung des Bettes beschrieben.

Kurzgebrauchsanweisung


Infrarot-Handscharter und -Handsender (Option) ab Baujahr 02/2011

VÖLKER

Programmierung einer Umgebungssteuerung mit Hilfe des Handsenders (Option)

Durch das Drücken der Tasten auf dem Handsender übertragen Sie die jeweilige Funktion an eine Umgebungssteuerung. Weitere Informationen zur Durchführung und Speicherung der Programmierungen, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung Ihrer jeweiligen Umgebungssteuerung.

HINWEIS Die Funktion „Rollen ausfahren“ kann nicht übertragen werden, auch wenn sie auf dem Handschalter verfügbar ist.

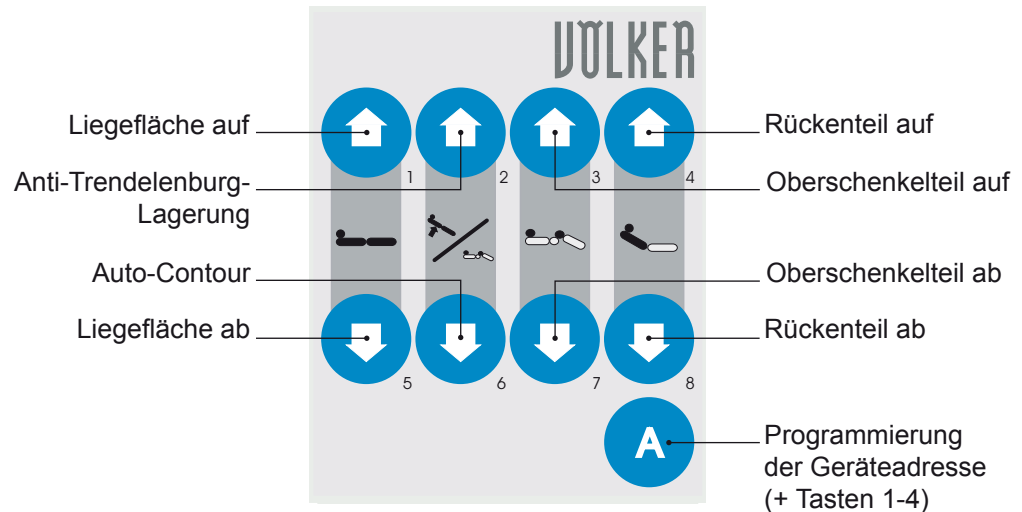

Kurzgebrauchsanweisung

Infrarot-Handschalter und -Handsender (Option) ab Baujahr 02/2011

VÖLKER

Adresseinstellung mit Hilfe des Infrarot-Handsenders (Option)

Ab Werk sind die Infrarot-Handschalter und der Handsender auf die Geräteadresse 1 eingestellt. Das Wählen der Geräteadresse erfolgt über den Infrarot-Handsender, der als Zubehör erhältlich ist (Artikel-Nr. E2324).

Bringen Sie hierzu den Handsender in die Reichweite des Empfängers. Drücken Sie nun am Handsender die Taste „A“ und dazu eine der Tasten 1 bis 4. Der Handsender signalisiert die eingestellte Adresse durch eine entsprechende Anzahl von Tönen. Nun ist sowohl der Empfänger als auch der Handsender auf die neue Adresse eingestellt.

Beachten Sie, dass sich möglicherweise mehrere Infrarot-Handschalter in Reichweite des Handsenders befinden können. Diese werden dann ebenfalls umgestellt. Um dies zu verhindern, können Sie entweder die übrigen Infrarot-Handschalter von den Betten trennen oder den Kontakt unterbinden,

beispielsweise durch Abdecken mit einer Bettdecke. Sie können die anderen Betten auch außer Betrieb nehmen, beachten Sie dazu bitte die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung des Bettes (es genügt nicht, den Netzstecker zu ziehen!).

HINWEIS Prüfen Sie bitte unbedingt, dass nur jeweils ein Bett im Raum auf einen Kanal reagiert!

Auf Wunsch können die Infrarot-Handschalter auch mit einer festen Adresse geliefert werden, die nicht geändert werden kann.

Technische Daten Infrarot-Handsender

IR-Code: RC-5, 14 Bit, 38 kHz

Batterie: 6LR61 (9-V-Block)