


Beknopte gebruiksaanwijzing

Ingebouwd oriëntatielampje op Völker-bedden vanaf bouwjaar 10/2011

VÖLKER

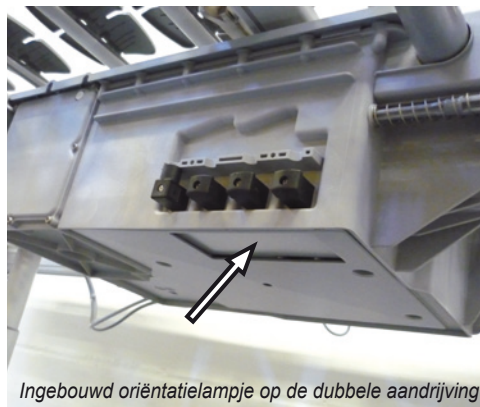

Het ingebouwde oriëntatielampje in Völker-bedden gaat automatisch aan in het donker zodat de patiënt/bewoner zich ook kan oriënteren wanneer het donker is in de kamer. Bij een normale verlichting is het oriëntatielampje uit.

Inbedrijfstelling

Het ingebouwde oriëntatielampje wordt in de fabriek volledig aangesloten en is onmiddellijk bedrijfsklaar.

Deactivering

Het oriëntatielampje kan alleen worden gedeactiveerd door de stekker van de sensor uit de dubbele aandrijving te trekken.

Noteer dat in dat geval de bijgeleverde blindstekker (artikelnr.: E529-01) op de dubbele aandrijving moet worden gestoken.

Bij het verwisselen van stekker moet erop worden gelet dat de dichting zich op de te monteren stekker bevindt en dat de stekker wordt vastgeschroefd.

De sensorstekker mag uitsluitend in de linker insteekplaats worden gestoken, zoals afgebeeld.



WAARSCHUWING Het oriëntatielampje werkt ook in het snoerloze accubedrijf.

Wanneer het bed langer dan een dag van de netvoeding wordt losgekoppeld, moet de sensorstekker wordt uitgetrokken en moet de onder "Deactivering" beschreven procedure worden gevolgd, of moet het bed buiten bedrijf worden gesteld. Anders zou de accu snel leeglopen en zou een snoerloos gebruik van het bed niet meer mogelijk zijn. Tot permanente schade aan de accu kan het echter niet leiden.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 12 - 16 V

Verbruik: 20 - 120 mA, naargelang van de instelling



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft uitsluitend de bijzonderheden van het in het Völker-bed ingebouwde oriëntatielampje. Volg naast deze gebruiksaanwijzing ook de gebruiksaanwijzing van het bed!