

# Beknopte gebruiksaanwijzing

## modellen 5380, 5380 K vanaf bouwjaar 12/2011

VÖLKER


### A. Bedhecken

#### Bedhecken omhoogzetten


1. Trek het bed zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het omhoog.
2. Om de hoogte van het bedhek in te stellen, trekt u het telescopische gedeelte tot de aanslag naar boven.

#### Bedhek neerlaten

1. Druk op de beide knoppen op de buitenkant van het frame (afb. 1), net onder de handregel, om het in de hoogte verstelbare bedhekelement in de laagste stand te brengen.
2. Druk op de ontspanner waar „Drücken / Press“ op gedrukt staat, aan het onderste uiteinde van het bedhekelement (afb. 2) en kantel het zijbeveiligingsdeel naar beneden tot het parallel staat met de vloer.
3. Schuif het bedhekelement volledig onder het ligvlak (afb. 3a, afb. 3b).

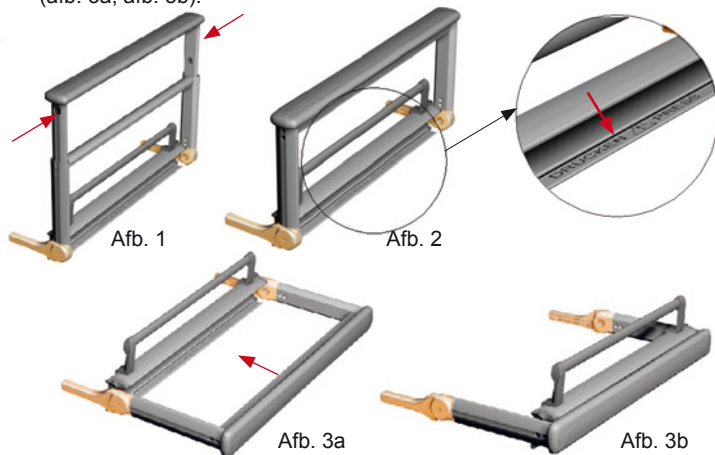


### B. Handschakelaar

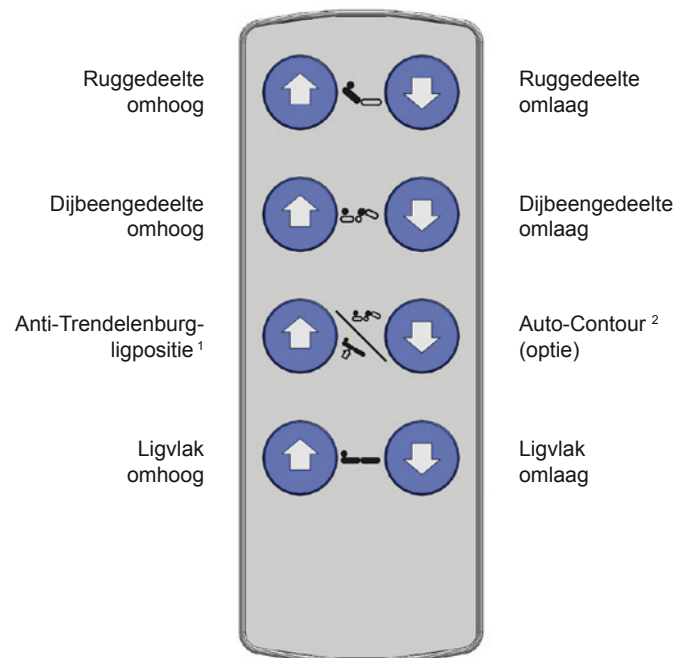

<sup>1</sup> Ligpositie met hoofd omhoog

<sup>2</sup> Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

### C. Personeelbesturingsbox met afzonderlijke blokkering (optie)

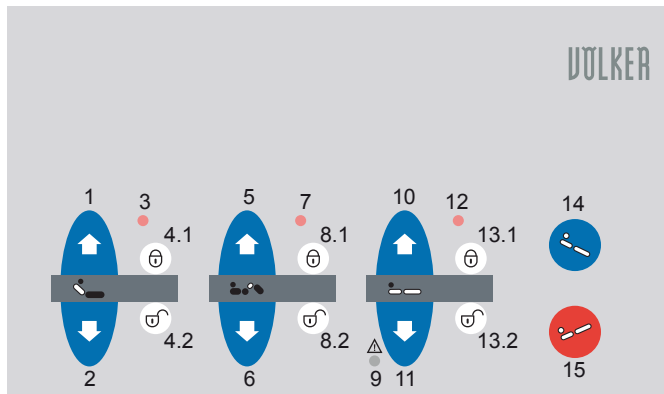

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1 ruggedeelte omhoog                  | 9 LED - onderste positie van de ligvlakverstelling       |
| 2 Ruggedeelte omlaag                  | 10 Ligvlak omhoog <sup>1</sup>                           |
| 3 LED - vergrendeling ruggedeelte     | 11 Ligvlak omlaag <sup>1</sup>                           |
| 4.1 Ruggedeelte vergrendelen          | 12 LED - vergrendeling hoogteverstelling van het ligvlak |
| 4.2 Ruggedeelte ontgrendelen          | 13.1 Ligvlakverstelling vergrendelen                     |
| 5 Dijbeengedeelte omhoog              | 13.2 Ligvlakverstelling ontgrendelen                     |
| 6 Dijbeengedeelte omlaag              | 14 Anti-Trendelenburg-ligpositie <sup>2</sup>            |
| 7 LED - vergrendeling dijbeengedeelte | 15 Trendelenburg-ligpositie <sup>3</sup>                 |
| 8.1 Dijbeengedeelte vergrendelen      |  |
| 8.2 Dijbeengedeelte ontgrendelen      |  |

<sup>1</sup> landspecifieke automatische functie door dubbelklik mogelijk

<sup>2</sup> Ligpositie met hoofd omhoog

<sup>3</sup> Ligpositie met hoofd omlaag

### D. Toetsenblokkering

Door het activeren van de toetsenblokkering van de handshakelaar, worden alle functies van de handshakelaar geblokkeerd.



Handshakelaar geblokkeerd



Handshakelaar deblokkeerd

Bij blokkering van een functie op de zusterbox is die functie op de handshakelaar eveneens geblokkeerd.

### E. Vastzetten van de wielen

Van de vier zwenkwielen aan het voeteneinde kunnen er twee worden vastgezet.

Pedaal in onderste stand: het bed is vastgezet.

Pedaal in bovenste stand: het bed is klaar om te verrijden.

Wanneer het bed niet moet worden getransporteerd, moeten beide wielen vastgezet zijn.

In de optionele rangeerbare variant beschikt het bed aan het hoofdeinde over vier extra zwenkwielen, die het rangeren van het bed ter plaatse mogelijk maken. Daarvan zijn twee wielen met richtingsarrètering uitgerust. Die moeten eveneens geblokkeerd zijn, behalve wanneer het bed moet worden getransporteerd.

De richtingsarrètering zijn pas correct geblokkeerd wanneer de pedalen in de onderste stand staan en de wielen na een lichte draaiing hoorbaar parallel met de lengterichting van het bed inklinken.

**OPMERKING** Het bed is niet geschikt voor reiniging in de wasstraat (IPX4) en mag niet worden gebruikt bewoners/patiënten te transporteren.

**OPMERKING** Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!