

Kurzgebrauchsanweisung

Modell S 582 ab Baujahr 02/2013

VÖLKER

A **Hilti-Rom** Company


A. Seitengitter

Seitengitter aufstellen


1. Ziehen Sie das Seitengitterelement seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.
2. Um die Höhe des Seitengitters einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

Seitengitter herunterklappen

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens (Abb. 1), dicht unter dem Holm, um das höhenverstellbare Seitengitterelement in die niedrigste Position zu bringen.
2. Betätigen Sie den mit „Drücken / Press“ beschrifteten Auslöser am unteren Ende des Seitengitterelements (Abb. 2) und kippen Sie es seitlich in die Horizontale, sodass es sich parallel zum Boden befindet.
3. Schieben Sie das Gitterelement vollständig unter die Liegefläche (Abb. 3a, Abb. 3b).

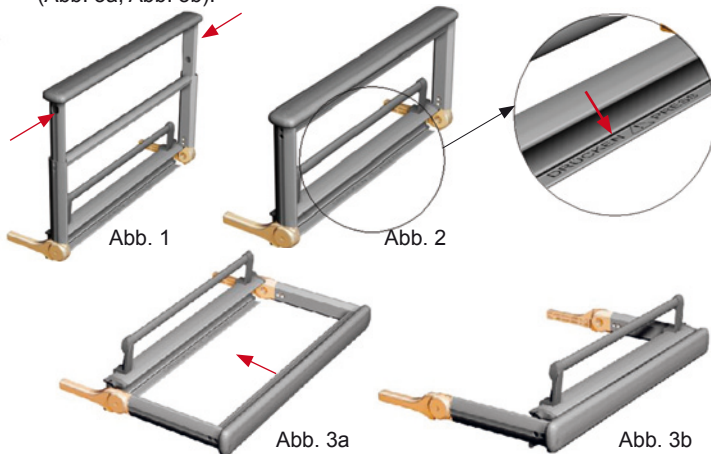

B. Handschalter

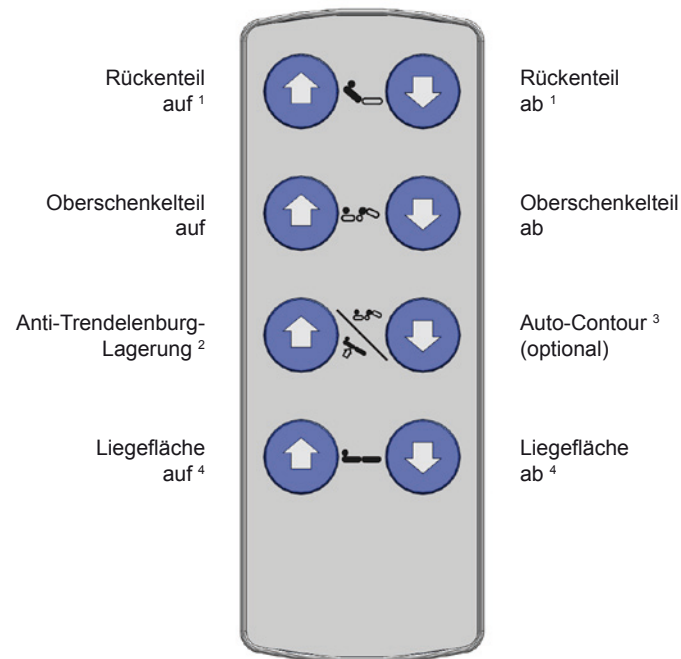

¹ das Völker Diagnostic System (optional erhältlich) erlaubt das Einstellen einer Verzögerungszeit der Rückenteilbewegung zwischen 0 und 5 Sek. in der 30°-Position

² Beintieflagerung

³ Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

⁴ gleichzeitiges Drücken der Tasten „Liegefläche auf“ und „- ab“ bringt das Bett in die horizontale Position

Kurzgebrauchsanweisung

Modell S 582 ab Baujahr 02/2013

VÖLKER

A Hi-Rom Company

C. Tastensperre des Handschalters

Durch die Aktivierung der Tastensperre des Handschalters werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt.




Handschalter gesperrt



Handschalter entsperrt

Der Handschalter kann auch durch die Taste „Handschalter sperren“ (14) an der Personaltastatur gesperrt werden.

D. Personaltastatur mit Einzelsperrung/Automatikfunktionen

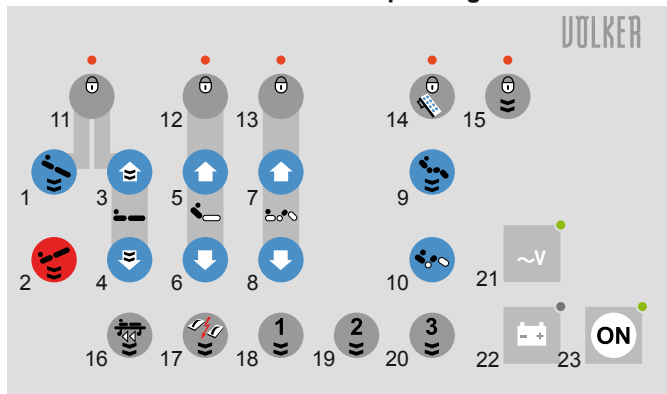

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Anti-Trendelenburg-Lagerung ^{A, L} | 6 Rückenteil ab ^D |
| 2 Trendelenburg-Lagerung ^{B, L} | 7 Oberschenkelteil auf |
| 3 Liegefläche auf ^{C, L} | 8 Oberschenkelteil ab |
| 4 Liegefläche ab ^{C, L} | 9 Cardiac-Chair-Position ^L |
| 5 Rückenteil auf ^D | 10 Auto-Contour ^E |

- | | |
|--|---|
| 11 Liegeflächenhub und Anti-Trendelenburg-Lagerung sperren | 17 Reanimationsstellung ^L |
| 12 Rückenteil sperren | 18 Waschstraßenposition ^{F, L} |
| 13 Oberschenkelteil sperren | 19 manuelle Wäsche ^{G, L} |
| 14 Handschalter sperren | 20 Bettenaufbereitung ^{H, L} |
| 15 Automatikfunktion sperren | 21 Netzspannungsanzeige ^I |
| 16 Transportstellung ^L | 22 Akkuanzeige ^J |
| | 23 Einschalten ^K |

^A Beintieflagerung

^B Kopftieflagerung

^C gleichzeitiges Drücken der Tasten 3 und 4 bringt das Bett in die horizontale Position

^D das Völker Diagnostic System (optional erhältlich) erlaubt das Einstellen einer Verzögerungszeit der Rückenteilbewegung zwischen 0 und 5 Sek. in der 30°-Position

^E Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

^F Höhe 40 cm, Rücken- und Oberschenkelteil max. angestellt

^G Höhe 80 cm, Rücken- und Oberschenkelteil max. angestellt

^H Höhe 80 cm, Rücken- und Oberschenkelteil in Nullposition

^I grün: Netzspannung liegt an

^J grün: >80% geladen; gelb: 30-80% geladen; rot: entladen; blinkend: wird geladen

^K nach Drücken der Taste ist die Tastatur bis 120 Sek. nach der letzten Betätigung verfügbar, danach sperrt sie sich automatisch

^L länderspezifisch Automatikfunktion durch Doppelklick möglich

HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Personaltastatur durch Drücken der „ON“-Taste eingeschaltet werden muss, um das Bett zu bedienen.

E. Rollenfeststellung

Das Bett ist über die beiden fußseitigen Tritthebel feststellbar.

Beide Tritthebel unten: Das Bett ist festgestellt.

Beide Tritthebel waagrecht: Alle Rollen sind frei.

Rechter fußseitiger Tritthebel waagrecht + linker Tritthebel oben (aus Sichtweise des Patienten gesehen): Das Bett ist in Fahrposition (Lenkrolle eingerastet).

Beachten Sie, dass beide Tritthebel separat bedient werden müssen.

HINWEIS Das Bett entspricht der Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt) und ist somit nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet.

HINWEIS Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!