

Beknopte gebruiksaanwijzing

Model S 582 vanaf bouwjaar 01/2013

VÖLKER


A. Bedrekken

Bedrekken omhoogzetten


1. Trek het bed zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het omhoog.
2. Om de hoogte van het bedrek in te stellen, trekt u het telescopische gedeelte tot de aanslag naar boven.

Bedrek neerlaten

1. Druk op de beide knoppen op de buitenkant van het frame (afb. 1), net onder de handregel, om het in de hoogte verstelbare bedkelement in de laagste stand te brengen.
2. Druk op de ontspanner waar „Drücken / Press“ op gedrukt staat, aan het onderste uiteinde van het bedkelement (afb. 2) en kantel het zijbeveiligingsdeel naar beneden tot het parallel staat met de vloer.
3. Schuif het bedkelement volledig onder het ligvlak (afb. 3a, afb. 3b)

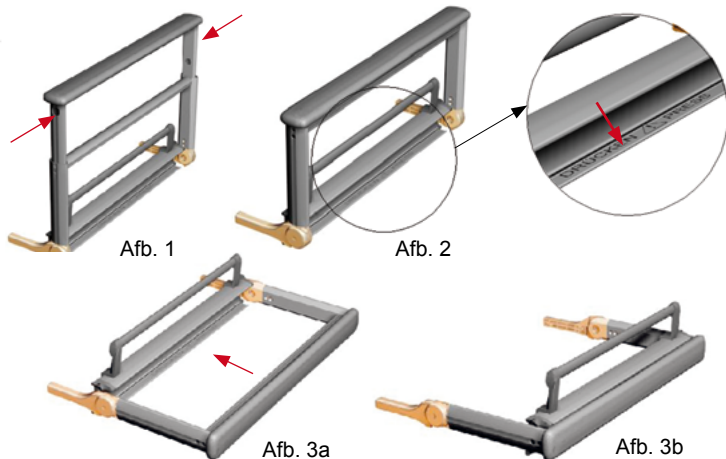

B. Handschakelaar

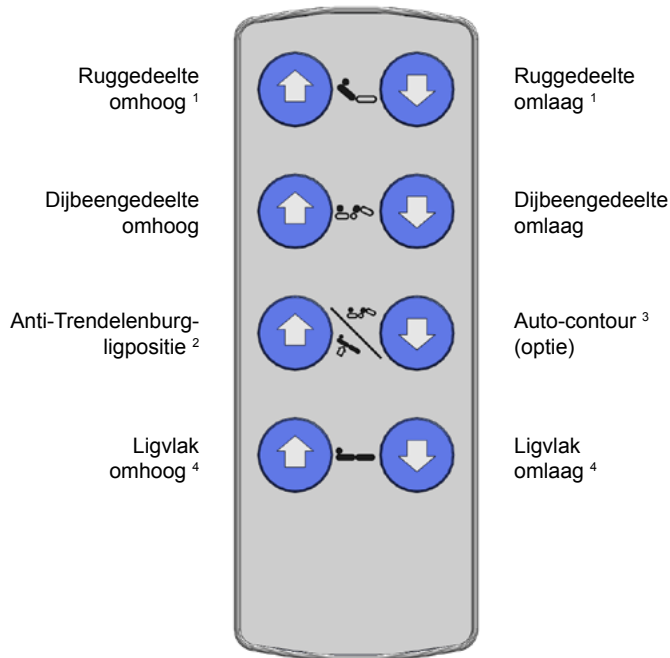

¹ Het Völker Diagnostic System (verkrijgbaar als optie) maakt het mogelijk om voor de beweging van het ruggedeelte een vertragingstijd in te stellen tussen 0 en 5 sec. in de 30°-positie

² Ligpositie met het hoofd omhoog

³ Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

⁴ gelijktijdig indrukken van de toetsen „Ligvlak omhoog“ en „- omlaag“ brengt het bed in horizontale positie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Model S 582 vanaf bouwjaar 01/2013

VÖLKER

C. Toetsenvergrendeling van de handschakelaar

Door het activeren van de toetsenvergrendeling van de handschakelaar, worden alle functies van de handschakelaar vergrendeld.




Handschakelaar vergrendeld



Handschakelaar ontgrendeld

De handschakelaar kan ook met de toets „Handschakelaar vergrendelen“ (14) op de personeelsbesturingsbox worden vergrendeld.

D. Personeelsbesturingsbox met afzonderlijke blokkering/automatische functies

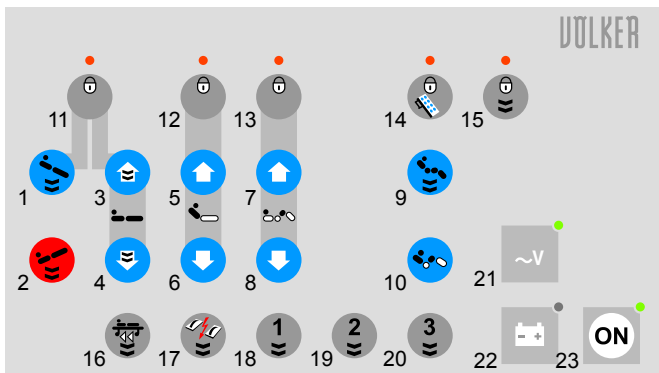

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Anti-Trendelenburg-ligpositie ^{A, L} | 6 Ruggedeelte omlaag ^D |
| 2 Trendelenburg-ligpositie ^{B, L} | 7 Dijbeengedeelte omhoog |
| 3 Ligvlak omhoog ^{C, L} | 8 Dijbeengedeelte omlaag |
| 4 Ligvlak omlaag ^{C, L} | 9 Cardiac-Chair-positie ^L |
| 5 Ruggedeelte omhoog ^D | 10 Auto-Contour ^E |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 11 Ligvlakhoogteverstelling en Anti-Trendelenburg-positie vergrendelen | 17 Reanimatiestand ^L |
| 12 Ruggedeelte vergrendelen | 18 Wasstraatstand ^{F, L} |
| 13 Dijbeengedeelte vergrendelen | 19 Manueel wassen ^{G, L} |
| 14 Handschakelaar vergrendelen | 20 Bedtoebereiding ^{H, L} |
| 15 Automatische functie vergrendelen | 21 Netspanningslampje ^I |
| 16 Transportstand ^L | 22 Acculampje ^J |
| | 23 Inschakelen ^K |

^A Ligpositie met hoofd omhoog

^B Ligpositie met hoofd omlaag

^C gelijktijdig indrukken van de toetsen 3 en 4 brengt het bed in horizontale positie

^D het Völker Diagnostic System (verkrijgbaar als optie) maakt het mogelijk om voor de beweging van het ruggedeelte een vertragingstijd in te stellen tussen 0 en 5 sec. in de 30°-positie

^E Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

^F Hoogte 40 cm, rug- en dijbeengedeelte max. omhooggezet)

^G Hoogte 80 cm, rug- en dijbeengedeelte max. omhooggezet)

^H Hoogte 80 cm, rug- en dijbeengedeelte in nulpositie)

^I groen: netspanning aanwezig

^J groen: >80% geladen; geel: 30-80% geladen; rood: ontladen; knipperend: wordt geladen

^K na het indrukken van de toets is het toetsenbord nog tot

120 sec. na de laatste bediening beschikbaar, daarna wordt het automatisch vergrendeld

^L landspecifieke automatische functie door dubbelklik mogelijk

OPMERKING Denk er aan dat de personeelsbesturingsbox moet worden ingeschakeld door te drukken op de „ON“-toets om het bed te bedienen.

E. Vastzetten van de wielen

Het bed kan met de beide pedalen aan het voeteneinde worden vastgezet.

Beide pedalen in onderste stand: Het bed is vastgezet.

Beide pedalen horizontaal: Alle wielen zijn vrij draaibaar.

Rechter pedaal aan het voeteneinde horizontaal + linker pedaal omhoog (gezien vanuit het standpunt van de patiënt): Het bed is in rijpositie (zwenkwiel geblokkeerd)

Er moet op gelet worden dat beide pedalen apart moeten worden bediend.

OPMERKING Het bed behoort tot de beschermingsklasse IPX4 (spatwaterbestendig) en is dan ook niet geschikt voor reiniging in de wasstraat.

OPMERKING Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!