


Beknopte gebruiksaanwijzing bij tussenschotten

ZK-969/3, ZP-3067/2, ZK-969/2, ZP-3067, ZK-969, ZP-1069 voor bedden vanaf bouwjaar midden 2003

VÖLKER

A **Hilti**-Rom Company

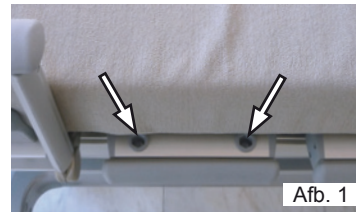


De tussenschotten sluiten de middelste opening tussen de bedhekken op Völker-bedden, om een doorlopende bedhekoplossing mogelijk te maken.

Bedhekken oprichten

1. Richt eerst de bedhekken van het bed op. Volg daarvoor de instructies in de handleiding of de beknopte handleiding.

Tussenschot aanbrengen

1. Steek de pennen van de tussenschotten in de insteekbussen die zich centraal in het bedframe bevinden (afb. 1). Let erop dat het tussenschot de bedhekken langs de buitenkant overlapt (afb. 2).
2. Controleer of de slingervergrendeling volledig vastgeklikt is, door te proberen het tussenschot naar boven toe uit te trekken. Wanneer het tussenschot loskomt, drukt u het weer helemaal naar beneden en stelt u de slinger bij tot het tussenschot niet meer kan worden uitgetrokken (afb. 3).

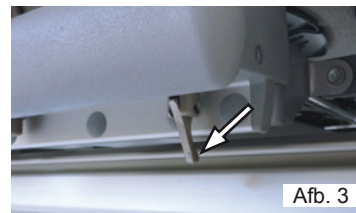

Tussenschot verwijderen

1. Om het tussenschot weer te verwijderen, brengt u de slinger in loodrechte stand en trekt u gelijktijdig in opwaartse richting aan het tussenschot (afb. 3).



WAARSCHUWING Vergewis u ervan dat de bedhekken - of onderdelen ervan - volledig opgericht en vastgeklikt zijn. Bij het bedienen van de elektrische ligvlakverstelling of de bedhekken moet er op worden gelet dat de patiënt/bewoner niet in contact is met de bedhekken en dat geen van zijn/haar lichaamsdelen door de bedhekken steekt. Wij bevelen ten stelligste aan de functies van de handschakelaar te blokkeren.

OPMERKING Volg steeds de instructies in de uitvoerige gebruiksaanwijzing van het bed a.u.b.!