

Kurzgebrauchsanweisung

Modelle S 962-2, S 962-2W, S 382 ab Baujahr 05/2009


A. Seitengitter

Seitengitter aufstellen


1. Ziehen Sie das Seitengitterelement seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.
2. Um die Höhe des Seitengitters einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

Seitengitter herunterklappen

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens (Abb.1), dicht unter dem Holm, um das höhenverstellbare Seitengitterelement in die niedrigste Position zu bringen.
2. Betätigen Sie den mit „Drücken / Press“ beschrifteten Auslöser am unteren Ende des Seitengitterelements (Abb. 2) und kippen Sie es seitlich in die Horizontale, sodass es sich parallel zum Boden befindet.
3. Schieben Sie das Gitterelement vollständig unter die Liegefläche (Abb. 3a, Abb. 3b).

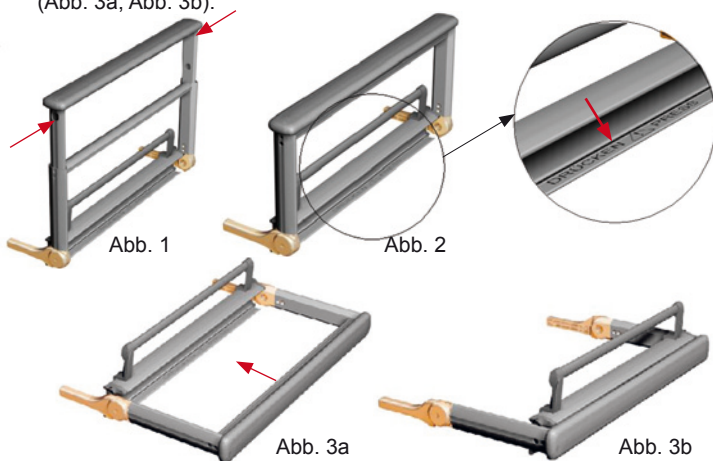

B. Handschalter

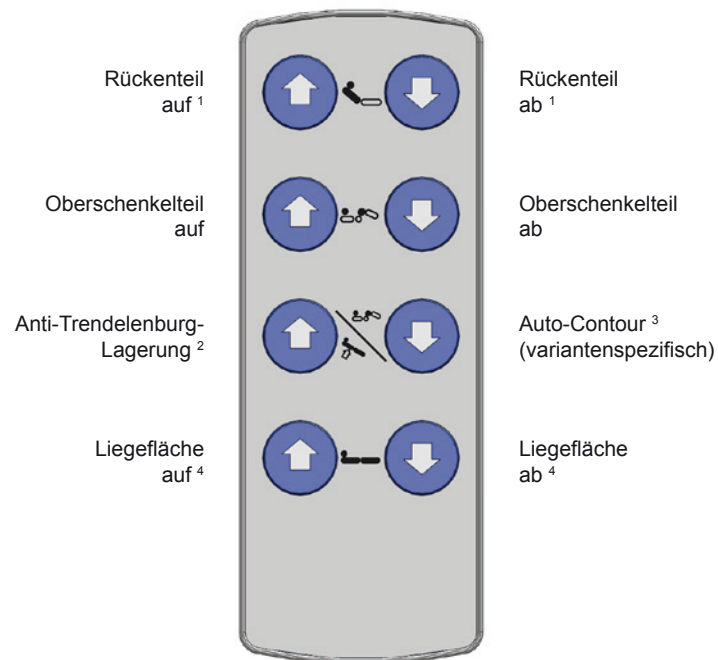

¹ Das Völker Diagnostic System (optional erhältlich) erlaubt das Einstellen einer Verzögerungszeit der Rückenteilbewegung zwischen 0 und 5 Sek. in der 30°-Position (Funktion ist variantenspezifisch).

² Beintieflagerung

³ Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

⁴ Gleichzeitiges Drücken der Tasten „Liegefläche auf“ und „Liegefläche ab“ bringt das Bett in die horizontale Position (Funktion ist variantenspezifisch).

Kurzgebrauchsanweisung

Modelle S 962-2, S 962-2W, S 382 ab Baujahr 05/2009

C. Tastensperre des Handschalters und Personalhandschalters

Durch die Aktivierung der Tastensperre des Handschalter/Personalhandschalters werden alle Funktionen des jeweiligen Handschalters/Personalhandschalters gesperrt.



Handschalter bzw. Personalhandschalter gesperrt



Handschalter bzw. Personalhandschalter entsperrt

Der Handschalter kann auch durch die Funktion „Patientenhandschalter sperren“ am Personalhandschalter gesperrt werden.

HINWEIS Sollte keine elektrische Funktion mehr anzusprechen sein, drücken Sie die Resettaste am Motorgehäuse.


→ S 962-2 (DA01), S 962-2W, S 382: Drücken Sie anschließend nach 10 Sekunden die grüne Taste an der Netzfreeschaltung, um das Bett wieder in Betrieb zu nehmen. Es sollten niemals beide grünen Tasten gleichzeitig gedrückt werden. ←

HINWEIS Die Modelle S 962-2 und S 382 entsprechen der Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt) und sind somit nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet.

Das Modell S 962-2W entspricht der Schutzklasse IPX6 (stark strahlwassergeschützt) und ist für die Reinigung in der Waschstraße geeignet.

HINWEIS Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!

D. Personalhandschalter mit Komplettspernung (Easy-Lock) (Variante beim S 382)

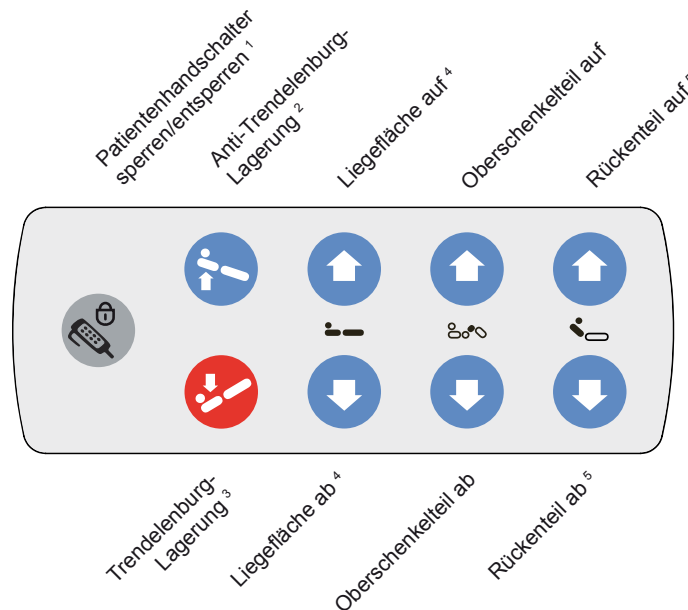

¹ Bei aktivierter Funktion (am Personalhandschalter leuchtet eine rote LED) sind alle Funktionen am Patientenhandschalter gesperrt.

² Beintieflagerung

³ Kopftieflagerung

⁴ Gleichzeitiges Drücken der Tasten „Liegefläche auf“ und „Liegefläche ab“ bringt das Bett in die horizontale Position (Funktion ist variantenspezifisch).

⁵ Das Völker Diagnostic System (optional erhältlich) erlaubt das Einstellen einer Verzögerungszeit der Rückenteilbewegung zwischen 0 und 5 Sek. in der 30°-Position (Funktion ist variantenspezifisch).