

# Beknopte gebruiksaanwijzing modellen S 962-2, S 962-2W, S 382 vanaf bouwjaar 05/2009


## A. Bedekken

### Bedekken opzetten


1. Trek het bedhek zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het naar omhoog.
2. Om de hoogte van het bedhek in te stellen, trekt u het telescopische gedeelte tot de aanslag naar boven.

### Bedhek neerklappen

1. Druk op de beide knoppen op de buitenkant van het frame (afb. 1), net onder de handlijst, om het in de hoogte verstelbare bedhek in de laagste stand te brengen.
2. Druk op de ontgrendeling waar „Drücken / Press“ op gedrukt staat, aan het onderste uiteinde van het bedhek (afb. 2) en kantel het zijbeveiligingsdeel naar beneden tot het parallel staat met de vloer.
3. Schuif de bedhek volledig onder het ligvlak (afb. 3a, afb. 3b).

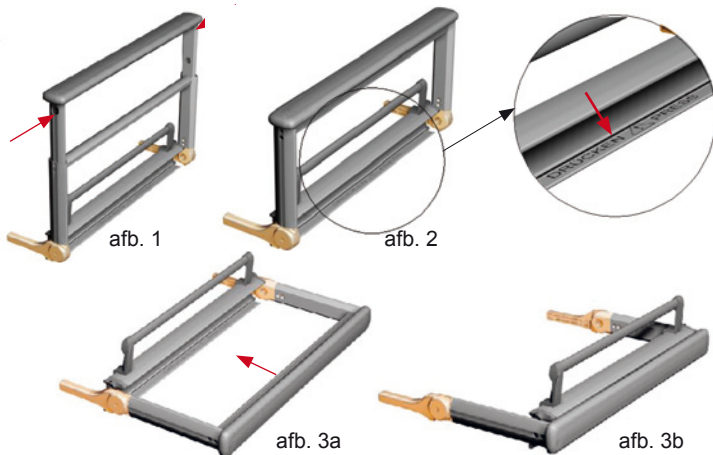

## B. Handschakelaar

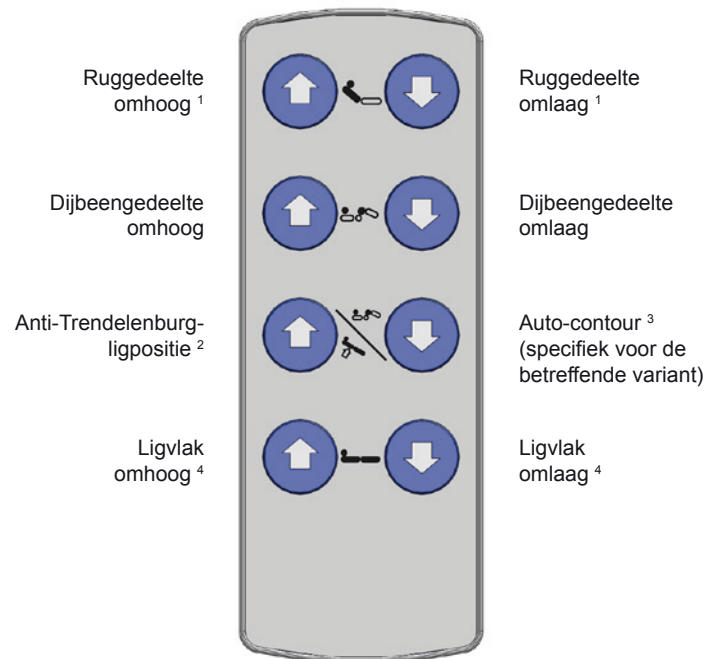

<sup>1</sup> Met het Völker Diagnostic System (optioneel verkrijgbaar) is het instellen van een vertragingstijd tussen 0 en 5 sec. in de 30°-positie bij de beweging van het ruggedeelte mogelijk (functie is van de variant afhankelijk).

<sup>2</sup> Ligpositie benen omlaag

<sup>3</sup> Rug- en dijbeengedeelte gelijktijdig omhoog

<sup>4</sup> Gelijktijdig indrukken van de knoppen „Ligvlak omhoog“ en „Ligvlak omlaag“ brengt het bed in de horizontale positie (functie is afhankelijk van de variant).

# Beknopte gebruiksaanwijzing modellen S 962-2, S 962-2W, S 382 vanaf bouwjaar 05/2009

## C. Toetsenvergrendeling van de handschakelaar en de personeelshandschakelaar

Door het activeren van de toetsenvergrendeling van de handschakelaar of van de personeelshandschakelaar worden alle functies van de betreffende schakelaar/personeelshandschakelaar vergrendeld.



Handschakelaar of personeelshandschakelaar vergrendeld



Handschakelaar of personeelshandschakelaar ontgrendeld

De handschakelaar kan ook met de functie „Patiëntenhandschakelaar vergrendelen“ op de personeelshandschakelaar worden vergrendeld.

**OPMERKING** Wanneer geen enkele elektrische functie nog reageert op de bediening, dient u de resetknop op de motorbehuizing in te drukken.


→ S 962-2 (DA01), S 962-2W, S 382: Druk vervolgens na 10 seconden op de groene toets van de netvrijschakeling, om het bed weer in bedrijf te stellen. De beide groene toetsen mogen nooit gelijktijdig worden ingedrukt! ←

**OPMERKING** De modellen S 962-2 en S 382 komen overeen met de el. veiligheidsklasse IPX4 (spatwaterdicht) en zijn daarmee niet voor reiniging in de wasstraat geschikt.

Het model S 962-2W komt overeen met de el. veiligheidsklasse IPX6 (sterk waterstraalbestendig) en is voor de reiniging in de wasstraat geschikt.

**OPMERKING** Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige gebruiksaanwijzing na te leven!

## D. Personeelshandschakelaar met volledige vergrendeling (Easy-Lock) (variant bij S 382)

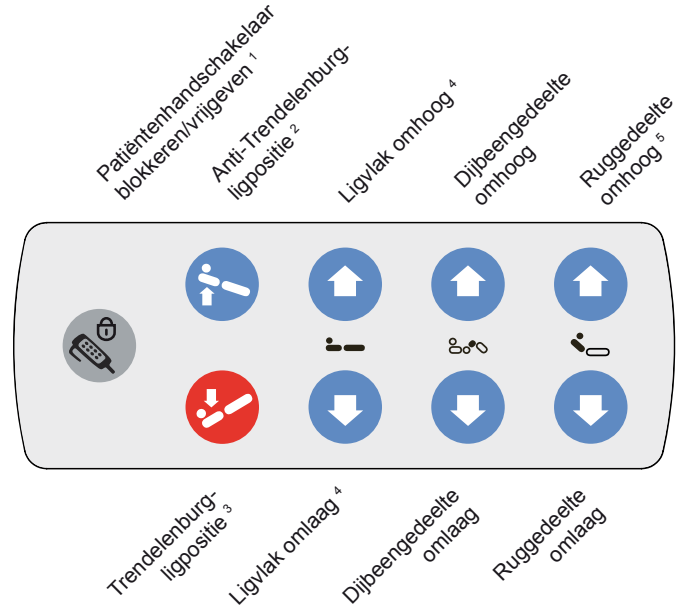

<sup>1</sup> Bij geactiveerde functie (op de personeelshandschakelaar brandt een rode LED) zijn alle functies op de patiëntenhandschakelaar geblokkeerd.

<sup>2</sup> Ligpositie benen omlaag

<sup>3</sup> Ligpositie met hoofd omlaag

<sup>4</sup> Gelijktijdig indrukken van de knoppen „Ligvlak omhoog“ en „Ligvlak omlaag“ brengt het bed in de horizontale positie (functie is afhankelijk van de variant).

<sup>5</sup> Met het Völker Diagnostic System (optioneel verkrijgbaar) is het instellen van een vertragingstijd tussen 0 en 5 sec. in de 30°-positie bij de beweging van het ruggedeelte mogelijk (functie is van de variant afhankelijk)