

# Kurzgebrauchsanweisung

## Modelle S 962-2, S 962-2W, S 382 ab Baujahr 05/2009


### A. Seitengitter

#### Seitengitter aufstellen


1. Ziehen Sie das Seitengitterelement seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.
2. Um die Höhe des Seitengitters einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

#### Seitengitter herunterklappen

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens (Abb.1), dicht unter dem Holm, um das höhenverstellbare Seitengitterelement in die niedrigste Position zu bringen.
2. Betätigen Sie den mit „Drücken / Press“ beschrifteten Auslöser am unteren Ende des Seitengitterelements (Abb. 2) und kippen Sie es seitlich in die Horizontale, sodass es sich parallel zum Boden befindet.
3. Schieben Sie das Gitterelement vollständig unter die Liegefläche (Abb. 3a, Abb. 3b).

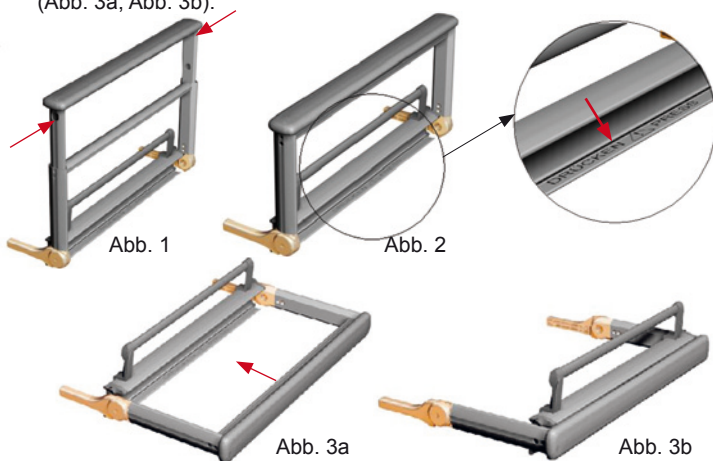

### B. Handschalter

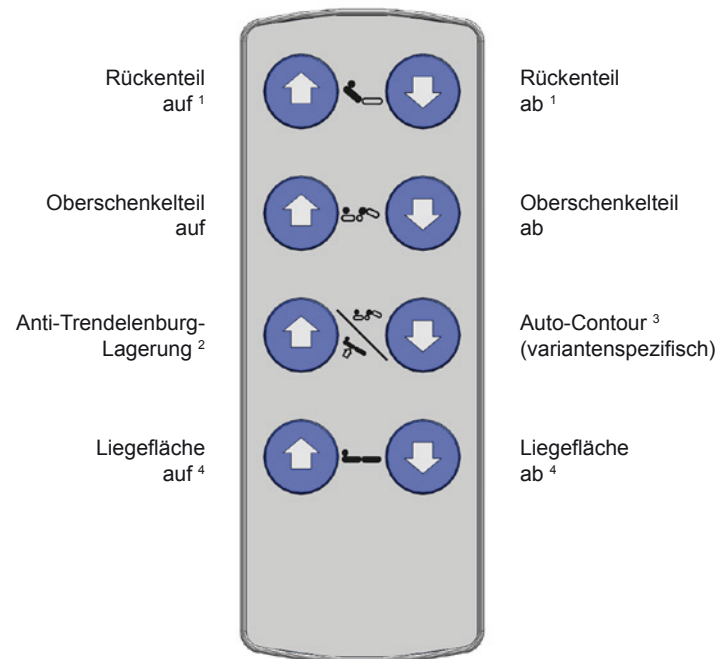

<sup>1</sup> Das Völker Diagnostic System (optional erhältlich) erlaubt das Einstellen einer Verzögerungszeit der Rückenteilbewegung zwischen 0 und 5 Sek. in der 30°-Position (Funktion ist variantenspezifisch).

<sup>2</sup> Beintieflagerung

<sup>3</sup> Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

<sup>4</sup> Gleichzeitiges Drücken der Tasten „Liegefläche auf“ und „Liegefläche ab“ bringt das Bett in die horizontale Position (Funktion ist variantenspezifisch).

### C. Tastensperre des Handschalters

Durch die Aktivierung der Tastensperre des Handschalters werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt.




Handschalter gesperrt



Handschalter entsperrt

Der Handschalter kann auch durch die Taste „Handschalter sperren“ (14) an der Personaltastatur gesperrt werden.

### D. Personaltastatur mit Einzelspernung (Variante beim S 382)

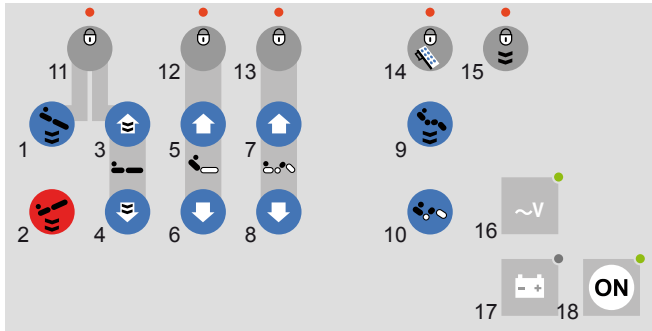

- |   |  |
|---|--|
| 1 Anti-Trendelenburg-Lagerung <sup>A, 1</sup> | 7 Oberschenkelteil auf                                     |
| 2 Trendelenburg-Lagerung <sup>B, 1</sup>      | 8 Oberschenkelteil ab                                      |
| 3 Liegefläche auf <sup>C, 1</sup>             | 9 Cardiac-Chair-Position <sup>1</sup>                      |
| 4 Liegefläche ab <sup>C, 1</sup>              | 10 Auto-Contour <sup>E</sup>                               |
| 5 Rückenteil auf <sup>D</sup>                 | 11 Liegeflächenhub und Anti-Trendelenburg-Lagerung sperren |
| 6 Rückenteil ab <sup>D</sup>                  |  |

- 12 Rückenteil sperren
- 13 Oberschenkelteil sperren
- 14 Handschalter sperren
- 15 Automatikfunktion sperren

- 16 Netzspannungsanzeige <sup>F</sup>
- 17 Akkuanzeige <sup>G</sup>
- 18 Einschalten <sup>H</sup>

<sup>A</sup> Beintiefelagerung

<sup>B</sup> Kopftiefelagerung

<sup>C</sup> Gleichzeitiges Drücken der Tasten 3 und 4 bringt das Bett in die horizontale Position (Funktion ist variantenspezifisch).

<sup>D</sup> Das Völker Diagnostic System (optional erhältlich) erlaubt das Einstellen einer Verzögerungszeit der Rückenteilbewegung zwischen 0 und 5 Sek. in der 30°-Position (Funktion ist variantenspezifisch).

<sup>E</sup> Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

<sup>F</sup> grün: Netzspannung liegt an

<sup>G</sup> grün: >80% geladen; gelb: 30-80% geladen; rot: entladen; blinkend: wird geladen

<sup>H</sup> Nach Drücken der „ON-Taste“ ist die Tastatur bis 120 Sek. nach der letzten Betätigung verfügbar, danach geht sie in den Stand-by-Modus.

<sup>1</sup> länderspezifisch Automatikfunktion durch Doppelklick möglich

**HINWEIS** Bitte beachten Sie, dass die Personaltastatur durch Drücken der „ON“-Taste eingeschaltet werden muss, um das Bett zu bedienen. Sollte keine elektrische Funktion mehr anzusprechen sein, drücken Sie die Reset-taste am Motorgehäuse.

→ S 962-2 (DA01), S 962-2W, S 382: Drücken Sie anschließend nach 10 Sekunden die grüne Taste an der Netzfreeschaltung, um das Bett wieder in Betrieb zu nehmen. Es sollten niemals beide grünen Tasten gleichzeitig gedrückt werden. ←

**HINWEIS** Die Modelle S 962-2 und S 382 entsprechen der Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt) und sind somit nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet.

Das Modell S 962-2W entspricht der Schutzklasse IPX6 (stark strahlwassergeschützt) und ist für die Reinigung in der Waschstraße geeignet.

**HINWEIS** Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!