

# Montageanleitung Seitengittererhöhung ZP-2074 [85mm / 90mm / 140mm] für die Modelle 2080, 2082

# VÖLKER

## Lieferumfang:

- 2 x Holzteil
- 4 x Bügel
- 12 x Schrauben M6x20; SR2144
- 12 x Hülsenmuttern M6; SR2145
- 4 x Distanzklötze (entfallen bei Seitengittern mit Griffmulde)



## Benötigtes Werkzeug:

- 2 x Kreuzschraubendreher

## Montage:

So sieht der Bügel ohne Seitengittererhöhung von der Seite aus, wenn der Distanzklotz und die Schrauben montiert wurden.



## Montage der Seitengittererhöhung:

1. Legen Sie die Seitengittererhöhung auf die obere Strebe des Seitengitters auf.
2. Beide Streben des Seitengitters müssen zwischen den Bügel gelangen, indem dieser von unten hochgeschoben wird.
3. Die beiden oberen Bohrungen des Bügels müssen über die beiden Bohrungen der Seitengittererhöhung.



# Montageanleitung Seitengittererhöhung ZP-2074 [85mm / 90mm / 140mm] für die Modelle 2080, 2082

# VÖLKER

## Schrauben :


1. Zwei der Schrauben werden von der einen Seite durch die Bohrungen gesteckt. Von der anderen Seite werden die Hülsenstücke durch die Bohrungen auf das Ende der Schrauben gesteckt und verschraubt.



## Distanzklotz:

(Die folgenden beiden Schritte entfallen bei Seitengittern mit Griffmulde. Hier werden die Distanzklotze nicht montiert.)

1. Der Distanzklotz wird unter die obere Strebe und in die Mitte des Bügels geschoben.
2. Die Bohrung des Distanzklotzes muss unter der untersten Bohrungen des Bügels liegen.

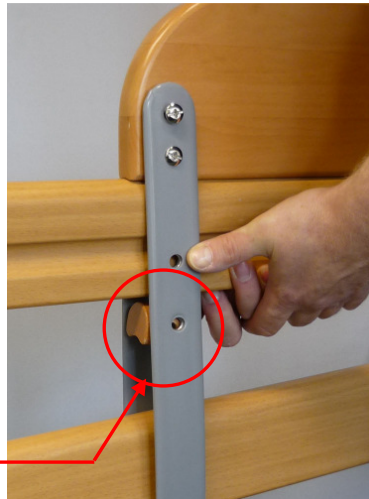

## Schrauben:

1. a) Bei Seitengittern ohne Griffmulde:  
Eine der Schrauben wird von der einen Seite durch die unterste Bohrung gesteckt. Von der anderen Seite wird eine Hülsenmutter durch die Bohrung auf das Ende der Schraube gesteckt und verschraubt.

b) Bei Seitengittern mit Griffmulde:  
Der Ablauf ist identisch wie bei 1.a), jedoch müssen Sie hierbei die zweite Bohrung von unten benutzen.

