


# Montagehandleiding voor model ZK-992 2.0/2.1/2.2

## Bedhekverhoging 80 mm opschroefbaar

VÖLKER

### Accessoires

Pos.	Artikel	Aant
1	Bedhekverhoging ruggedeelte	2
2	Bedhekverhoging onderbeenge- deelte	2

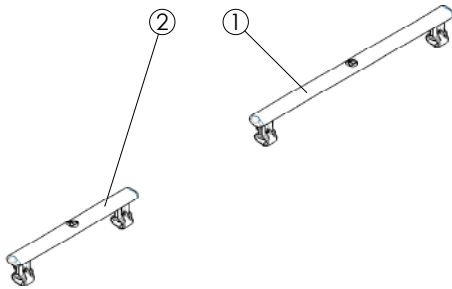

### Voormontage

De afzonderlijke bedhekverhogingen worden reeds volledig voormonteerd.

### Montage

1. Schroef de twee kartelschroeven op iedere bedhekverhoging open en klap de clips open.
2. Schuif de clips vanaf de binnenkant van het bed op de stootranden van het opgerichte bedhek, en richt de bedhekverhoging centraal uit (fig. 2).
3. Sluit de clips door de kartelschroeven weer stevig in de hulsmoeren te schroeven (fig. 3). De kartelschroeven moeten naar de buitenkant van het bed gericht zijn.
4. Ga na of de verbindingen stevig zijn (niet afgebeeld).



Fig. 2



Fig. 3

