


Montagehandleiding

Verhoogde bedhekken en klemstukken model ZK-991 2.0 - 2.2 voor verpleeg- & ziekenhuisbedden modellen S 962-2, S 962-2W, S 960-2, S 961-2W, S 961-1, 3082 K, 3080 K, 5380 K in designvariant „S“

VÖLKER

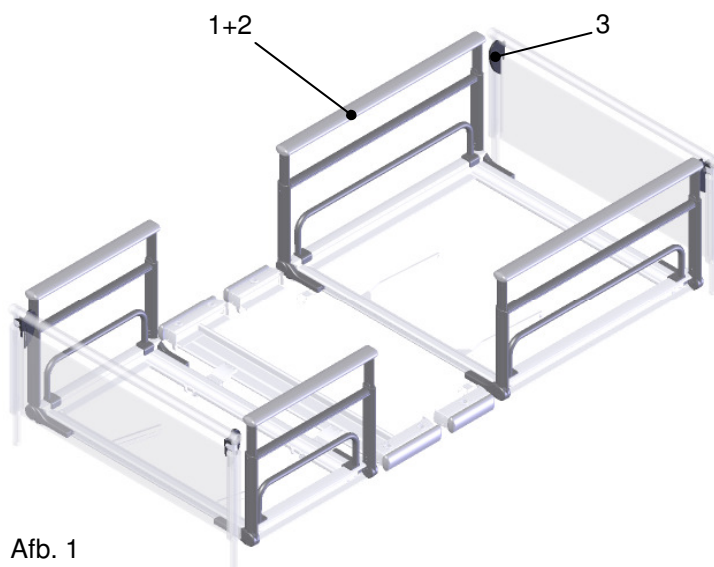

Afb. 1

Afbeelding verhoogde bedhekken

Het hoogteverschil met de standaardbedhekken bedraagt 60 mm.


De verhoogde bedhekken zijn accessoires.

Accessoires:


Pos.	Aant.	Artikelnr.	Beschrijving
1	1	BG3383/ BG3384/ BG3385	Bedhekkenset, verhoogd (incl. matrashouder)
2	1	BG1528/ BG1988/ BG1989	Stootrandenset (voorgemonteerd)
3	1	BG2308	Klemstukken, set

Montage:

1. Sla de cilindrische pen (4) met een vlak voorwerp naar boven (afb. 2). Zorg ervoor dat de scharniergeleiding (plastic onderdeel) daarbij niet beschadigd wordt.
2. Druk het ontgrendelingsprofiel naar beneden (richting A) en trek het bedhek er uit (richting B) (afb. 3).
3. Voor het monteren van het nieuwe bedhek moet u het ontgrendelingsprofiel weer naar beneden drukken (richting A) en beide scharnieren gelijktijdig in de framedwarsprofielen schuiven (richting C) (afb. 3).
4. Sla de cilindrische pennen van het gemonteerde bedhek met een plat voorwerp van boven naar beneden, zodat de cilindrische pen en de scharniergeleiding in één vlak liggen (detail afb. 3). Zorg ervoor dat de scharniergeleiding daarbij niet beschadigd wordt.
5. Herhaal stappen 1-4 voor de andere 3 bedhekelementen.
6. Schroef de 4 aanwezige matrashouders (5) van het bed af en monteer vervolgens de verhoogde matrashouders.
7. Ga na of de verbindingen stevig zijn.

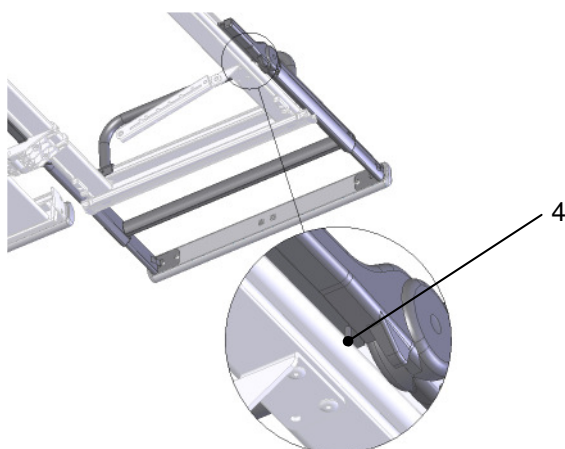

Afb. 2

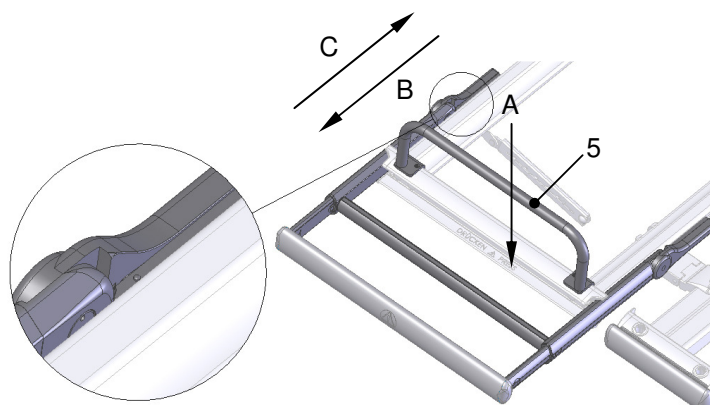

Afb. 3

Montagehandleiding


Verhoogde bedhekken en klemstukken model ZK-991 2.0 - 2.2 voor verpleeg- & ziekenhuisbedden modellen S 962-2, S 962-2W, S 960-2, S 961-2W, S 961-1, 3082 K, 3080 K, 5380 K in designvariant „S“

VÖLKER

Om de naleving van de norm IEC 60601-2-52 bij bedden met verhoogde bedhekken te garanderen, moeten er aan het hoofd- en voeteneinde telkens 2 klemstukken worden bevestigd.

Accessoires:

Pos.	Aant.	Artikelnr.	Beschrijving
6	2	KT2570	Klemstuk rechts
7	2	KT2571	Klemstuk links
8	4	F2704	Klemstukbeugel
9	4	SR2335	Kruiskopschroef A2, M4x25 ISO 7380
10	4	SR2334	Dopmoer A2, M4 DIN 986

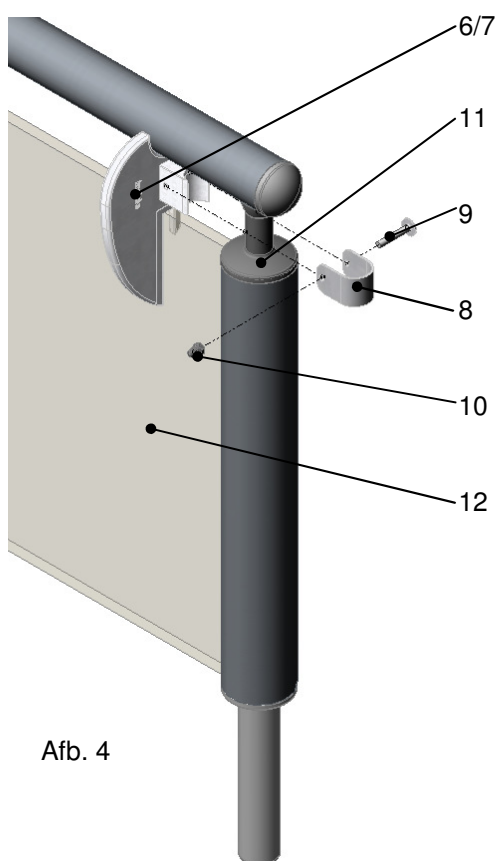


Afb. 4



Montage:

8. Draai de kruiskopschroef (9) los en verwijder, de dopmoer (10) en de klemstukbeugel (8).
9. Steek de betreffende klemstukken (6/7) rechts en links op de HPL-plaat (12) en schuif ze op de buiskap (11). Denk eraan dat de uitsteeksels van de klemstukken naar binnen moeten wijzen en dat de insnijding van het klemstuk stevig moet vastzitten op de HPL-plaat, om het tegen ongewenst draaien te beveiligen (afb. 5).
10. Schuif de klemstukbeugel (8) over de buiskap (11) op het klemstuk (6/7).
11. Steek de kruiskopschroef (9) door de klemstukbeugel (8) en het klemstuk (6/7) en zet deze vast met behulp van de dopmoer (10).
12. Herhaal stappen 8-11 aan het hoofd- of voeteneinde voor het bevestigen van de andere klemstukken.
13. Ga na of de verbindingen stevig zijn.

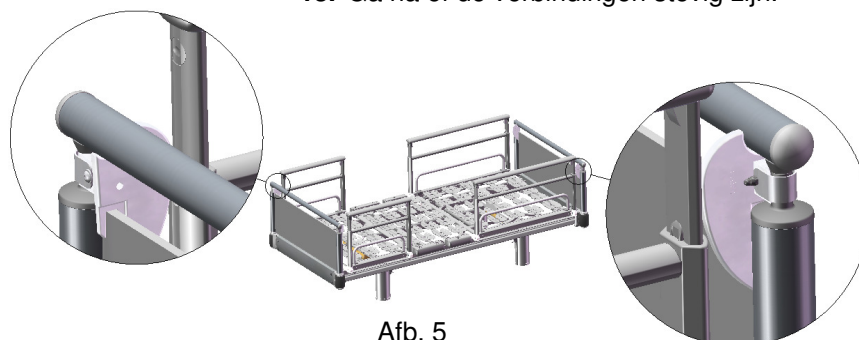

Afb. 5