

# Montagehandleiding houders fixatiegordels Modellen ZP-3051/3 en ZK-972/3


# VOELKER

voor verpleegbedden vanaf bouwjaar 05/2004 en ziekenhuisbedden  
vanaf bouwjaar 11/2001



**De ligvlakken mogen tijdens een fixering in geen geval versteld worden en moeten in de laagste stand staan.**


**De verstelfuncties van het ligvlak moeten tijdens een fixering worden geblokkeerd en de handschakelaar moet buiten handbereik van de bewoner/patiënt worden geplaatst!**

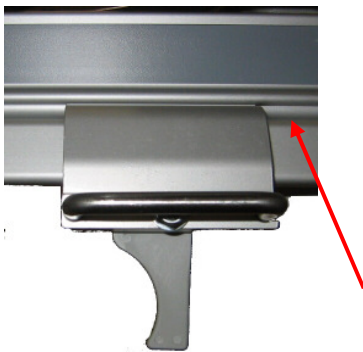

1. Bevestig de houder van de fixatiegordels in de zijwang van het verpleeg- of ziekenhuisbed. Controleer vooraf of de schroefverbinding van het hendel correct is aangedraaid, d.w.z. de hendel kan enkel strak worden bewogen!



2. Druk de houder van de fixatiegordel aan de zijwang en druk de hendel tot de aanslag naar boven.
3. Wanneer de hendel tegen ongewild losmaken moet worden gezekerd, moet de dopmoer met moersleutel nr. 13 worden vastgedraaid.

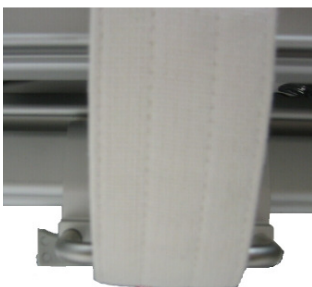

4. Bevestig nu het fixeersysteem overeenkomstig de instructies van de desbetreffende fabrikant aan de houders van de fixatiegordels.



- Fixeersystemen zoals riemen mogen uitsluitend worden gebruikt volgens de nauwkeurige instructies van de fabrikant.
- De houders van de fixatiegordels kunnen naar gelang van behoefte worden gepositioneerd, afhankelijk van de plaats waar het fixatiegordelsysteem moet worden gebruikt. Neem beslist de instructies van de fabrikant van de fixeersystemen in acht.
- Als er fixeersystemen worden gebruikt in de vorm van buikriemen, dient u ervoor te zorgen dat de beddekken volledig omhooggezet zijn. De middelste opening bij bedden met een gedeelde beddekken moet in dit geval worden gesloten met een tussenschot.

Völker GmbH Wullener Feld 79 58454 Witten/Germany  
Telefoon +49 2302 960 96-0 • Fax +49 2302 960 96-16  
www.voelker.de • service@voelker.de