


# Montageanleitung für statische Bettverlängerung

## Umbau an Modellen 2080, 2082, 3080 (K), 3082 (K), 3010

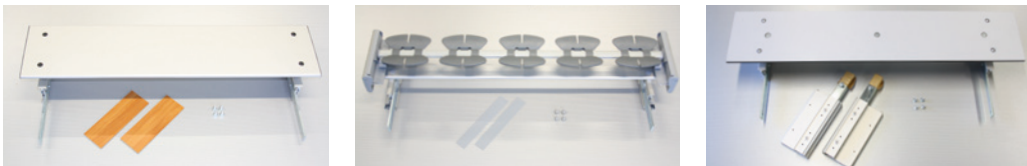

Bettverlängerungen Alu-, Flügel- und HPL-Liegefläche (von links nach rechts)

### Benötigtes Werkzeug

- Akkuschauber
- Innensechskantschlüssel 5 mm/6 mm
- Bohrmaschine (nur 3010)
- 6er bzw. 4,5er HSS-Spiralbohrer Metall (nur 3010)



### Artikelnummern und Stücklisten:

Breite	Bezeichnung	Baujahr Bett	Art. Nr.	Artikel	Anz.
90	BVL 3080/3082 (auch K-Variante)	Mai 2004 bis heute	BG3291-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2192	Zylinderkopfschr. DIN 7500 M6x10	4
	BVL 2080/2082	Mai 2004 bis heute	BG1495-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2192	Zylinderkopfschr. DIN 7500 M6x10	4
	B-BVL 2080/3080	Mai 2003 bis Mai 2004	BG3031-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2192	Zylinderkopfschr. DIN 7500 M6x10	4
	A-BVL 2080/3080	Juli 2000 bis Mai 2003	BG3430-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2170	Zylinderkopfschr. DIN 912 M8x10 verzinkt	4
	A-BVL 3010	Juli 2000 bis Mai 2003	BG3432-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2170	Zylinderkopfschr. DIN 912 M8x10 verzinkt	4
100	BVL 3080/3082 (auch K-Variante)	Mai 2004 bis heute	BG3292-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2192	Zylinderkopfschr. DIN 7500 M6x10	4
	BVL 2080/2082	Mai 2004 bis heute	BG1504-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2192	Zylinderkopfschr. DIN 7500 M6x10	4
	B-BVL 2080/3080	Mai 2003 bis Mai 2004	BG3030-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2192	Zylinderkopfschr. DIN 7500 M6x10	4
	A-BVL 2080/3080	Juli 2000 bis Mai 2003	BG3431-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2170	Zylinderkopfschr. DIN 912 M8x10 verzinkt	4
	A-BVL 3010	Juli 2000 bis Mai 2003	BG3433-01	Statische Bettverlängerung **	1
			SR2170	Zylinderkopfschr. DIN 912 M8x10 verzinkt	4

\*\* Blendstreifen zum Einschub in die Seitenwange werden farblich passend beige packt


### Montage

1. Fußteil mit Innensechskantschlüssel 5 mm bzw. Fußwange mit Innensechskantschlüssel 5 mm (3080/3082 K) abnehmen.  
Nur 2080/2082: Seitengitter vorher entnehmen.  
(<sup>A</sup>) Siehe nächste Seite: „Entnahme Seitengitter 2080/2082“)
2. Gewindestangen herausdrehen und, falls vorhanden, Distanzstücke abziehen.  
Nur 3010: äußere Wangenprofile abstützen!
3. Bettverlängerung aufschieben.  
Die Verbindungsbleche müssen innenliegend sein.
4. Nur 3010: Zusätzliche Wangenprofile mit dem Vierkanrohr in vorhandenes Wangenprofil am Bett einschieben. Falls die Bohrungen an den Verbindungsblechen nicht mit den Bohrungen an der Bettwange übereinstimmen, bohren Sie passende Löcher in die Seitenwange am Bett.  
BVL 2080/2082/3080/3082: Bohrung 6mm  
B-BVL 2080/3080: Bohrung 4,5mm  
Die Schrauben anschließend von innen nach außen in das Wangenprofil einschrauben.
5. Verschrauben Sie die Bettverlängerung mit dem Wangenprofil des Bettes (Innensechskantschlüssel 6 mm).

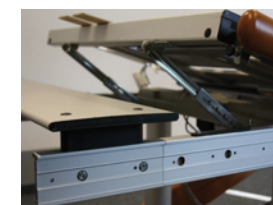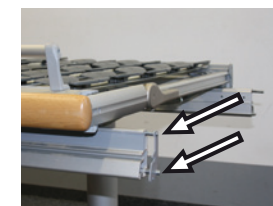


# Montageanleitung für statische Bettverlängerung Umbau an Modellen 2080, 2082, 3080 (K), 3082 (K), 3010

6. Blenden (Profilabdeckungen) in das Bettverlängerungsprofil einschieben.

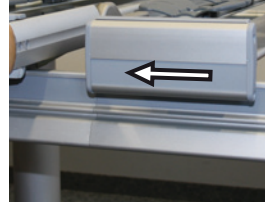

7. Gewindestangen in das Bettverlängerungsprofil eindrehen und, falls vorhanden, Distanzstücke wieder aufsetzen.

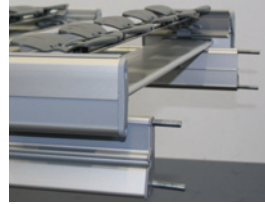

8. Fußteil auf die Gewindestangen aufsetzen und mit den vorhandenen Hülsenmuttern befestigen.  
Nur 2080/2082: Seitengitter müssen wieder in die Führungsschienen eingebaut werden.  
(<sup>B)</sup> Siehe nächste Spalte: „Einbau Seitengitter 2080/2082“)



9. **Das Bett muss anschließend auf die Seitengitter-Normenkonformität geprüft werden!**

## A) Entnahme Seitengitter 2080/2082:

1. Ziehen Sie die Seitengitter beidseitig komplett nach oben und achten Sie darauf, dass diese oben einrasten.



2. Drücken Sie den Sicherungspin am unteren Ende der Führungsschiene mit einem Schraubenzieher nach innen.



3. Halten Sie das Seitengitter fest, entriegeln Sie die Einrastung und führen Sie das Seitengitter nach unten heraus.



4. Lösen Sie den Sicherungspin wieder. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Ende des Bettes.



5. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Bettseite und legen Sie die Seitengitter beiseite.



*Fahren Sie nun mit der Demontage des Fußteils fort (Punkt 1 auf der vorherigen Seite).*

## B) Einbau Seitengitter 2080/2082:

1. Verlängerte Seitengitter für eine Seite nehmen und von unten in die Führungsschiene am Kopf- und Fußteil einschieben, bis es oben einrastet. Achten Sie darauf, dass der Sicherungspin am unteren Ende der Führungsschiene heraus gezogen ist (siehe „Entnahme Seitengitter 2080/2082“, Punkt 4).



Seitengitter 2-3x kräftig betätigen und einrasten lassen um diese einzupassen!

Beachten Sie, dass Schraubenköpfe und Warnaufkleber sich auf der Bettinnenseite befinden müssen!



2. Diese Montageschritte für die andere Bettseite wiederholen.  
3. Seitengitter auf Rast- und Gleitfunktion testen.  
4. **Das Bett muss anschließend auf die Seitengitter-Normenkonformität geprüft werden!**