


Montageanleitung für Modell ZK-992 2.0/2.1/2.2

Seitengittererhöhung 80 mm zum Aufclipsen

Zubehör

Pos.	Artikel	Anz
1	Seitengittererhöhung Rückenteil	2
2	Seitengittererhöhung Unterschenkelteil	2

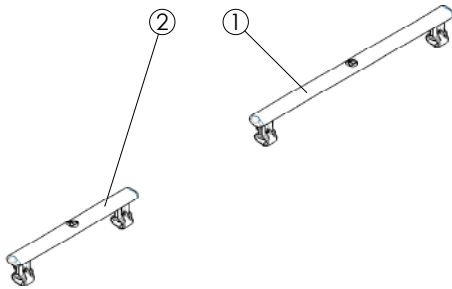

Vormontage

Die einzelnen Seitengittererhöhungen sind bereits komplett vormontiert.

Montage

1. Schrauben Sie die zwei Rändelschrauben an jeder Seitengittererhöhung auf und klappen Sie die Clips auf.
2. Schieben Sie die Clips von der Innenseite des Bettes auf die Stoßkanten der aufgestellten Seitengitter, und richten Sie die Seitengittererhöhung mittig aus (Abb. 2).
3. Schließen Sie die Clips indem Sie die Rändelschrauben wieder fest in die Hülsenmutter hineinschrauben (Abb. 3). Die Rändelschrauben müssen zur Außenseite des Bettes gerichtet sein.
4. Prüfen Sie die Verbindungen auf strammen Sitz (ohne Abb.).

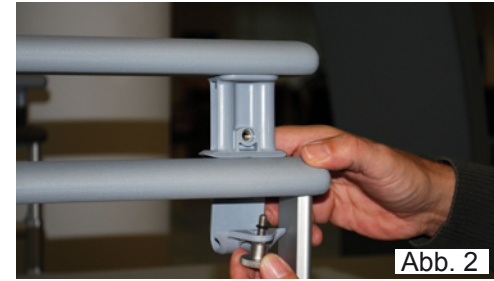


Abb. 2



Abb. 3

