

Montageanleitung Fixiergurthalterungen Modelle ZP-3051/3 und ZK-972/3


VÖLKER

für Pflegebetten ab Baujahr 05/2004 und Klinikbetten ab Baujahr 11/2001



Die Liegeflächen dürfen während einer Fixierung auf keinen Fall verstellt werden und müssen in der untersten Position stehen.

Die Verstellfunktionen der Liegefläche sind während einer Fixierung zu sperren und der Handschalter ist außerhalb der Reichweite des Bewohners/Patienten aufzubewahren!

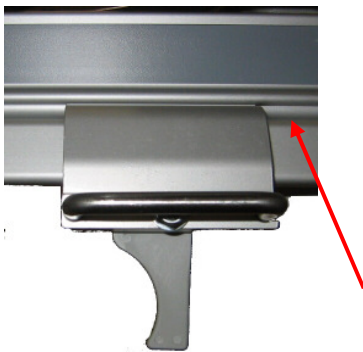


1. Klinken Sie die Fixiergurthalterung in die Seitenwange des Pflege- oder Klinikbettes ein. Vergewissern Sie sich vorher, das die Schraubverbindung des Hebels spielfrei angezogen ist, d.h. der Hebel ist nur stramm beweglich!



2. Drücken Sie die Fixiergurthalterung an die Seitenwange und drücken Sie den Hebel bis zum Anschlag nach oben.
3. Soll der Hebel gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein, muss die Hutmutter mit einem 13er Schraubenschlüssel festgezogen werden.

2. 3.

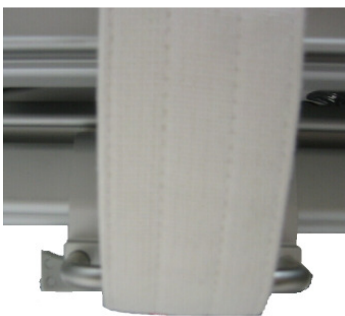

4. Befestigen Sie nun das Fixiersystem entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Herstellers an den Fixiergurthalterungen.



- Fixiersysteme wie Gurte dürfen nur nach exakter Vorgabe durch den Hersteller genutzt werden.
- Die Fixiergurthalterungen können je nach Bedarf positioniert werden, je nachdem wo das Fixiergurtsystem angewendet werden soll. Bitte hier unbedingt die Vorgaben des Herstellers der Fixiersysteme einhalten.
- Werden Fixiersysteme in Form von Bauchgurten verwendet, so ist sicherzustellen, dass die Seitengitter vollständig aufgestellt sind. Die Mittellücke bei Betten mit geteilten Seitengittern ist in diesem Fall durch eine Einsteckscheibe zu verschließen!

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten - Germany
Telefon +49 2302 960 96-0 • Telefax +49 2302 960 96-16
www.voelker.de • service@voelker.de