



Hinweise zum Triangelgriff TGN-RSG70

Materialien

Griff – PP
Gurt – Polypropylen - Garn
Rutschsicherung – PVC
Schloss – POM

Maximale Belastbarkeit 75 kg

Montagehinweise

- die max. Einstellbare Gurtlänge beträgt von Oberkante Rohr bis zum Triangelgriff 550 mm
- das freie Gurtende muss in die Schlaufe eingeführt werden

Wartung

- Kontrolle der Nähte vierteljährlich
- Kontrolle der Gurtenden Jährlich
- Kontrolle der Rutschsicherung Jährlich

Bei Mängeln an den Nähten, Auflösungserscheinungen der verschweißten Gurtenden bzw. gerissenen Rutschsicherungen ist der Triangelgriff sofort auszutauschen!

Reinigung

- keine Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel anwenden, welche Chlor bzw. organische oder anorganische Substanzen mit aktivem Chlor enthalten
- keine Laugen (Kalkmilch) zur Desinfektion anwenden
- zur Dampfdesinfektion nur kurzzeitig Temperaturen bis max. 110°C aussetzen

Lebenszyklus

Erneuern Sie den kompletten Triangelgriff nach max. 5 Jahren!