

A. Elektrische Inbetriebnahme:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzversorgung (Steckdose).
2. Drücken Sie die grüne Taste im Netzstecker 1 Sekunde lang, um den internen Energiespeicher aufzuladen.
- ...**🛏 Bett ist jetzt betriebsbereit.**
3. Führen Sie vor der Belegung eine Funktionsprobe aller Hebe- und Senkfunktionen durch.

B. Funktionsbeschreibung:


1. **Liegefläche:** Anheben Rückenteil
2. **Liegefläche:** Senken Rückenteil
3. **Höhenverstellung:** Hub "AUF"
4. **Höhenverstellung:** Hub "AB"
5. **Liegefläche:** Anheben Beinteil
6. **Liegefläche:** Senken Beinteil
7. **Keine Funktion**

8. Bett in sichere Standposition bringen:
Betätigung Bremspedal

9. Seitengitter: Hochstellen durch Hochziehen an den dafür vorgesehenen Griffmulden bis zum Einrasten. Zum Absenken das Seitengitter leicht anheben, die **Sicherungsknöpfe** betätigen und das Seitengitter herunterlassen.



10. Schocklagerung: Hochstellen durch einfaches Hochziehen am Handgriff. In gewünschter Höhe einrasten lassen. Herunterlassen durch vollständiges Anheben bis zum Anschlag und einfaches Herablassen.

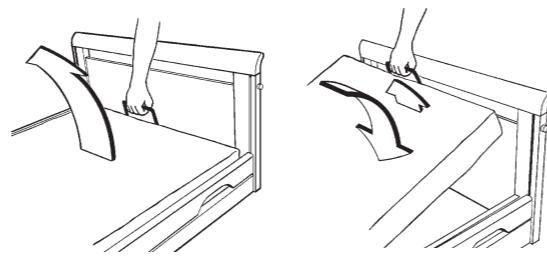

Ausgabe: 2003

VÖLKER
Bessere Betten

Völker AG · Wullener Feld 79 · 58454 Witten
Telefon (0 23 02) 960 960 · Telefax (0 23 02) 960 96 16 · www.voelker.de
Kostenloses Service-Telefon: 0800-VOELKER

A. Elektrische Inbetriebnahme:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzversorgung (Steckdose).
2. Drücken Sie die grüne Taste im Netzstecker 1 Sekunde lang, um den internen Energiespeicher aufzuladen.
- ...**🛏 Bett ist jetzt betriebsbereit.**
3. Führen Sie vor der Belegung eine Funktionsprobe aller Hebe- und Senkfunktionen durch.

B. Funktionsbeschreibung:


1. **Liegefläche:** Anheben Rückenteil
2. **Liegefläche:** Senken Rückenteil
3. **Höhenverstellung:** Hub "AUF"
4. **Höhenverstellung:** Hub "AB"
5. **Liegefläche:** Anheben Beinteil
6. **Liegefläche:** Senken Beinteil
7. **Keine Funktion**

8. Bett in sichere Standposition bringen:
Betätigung Bremspedal

9. Seitengitter: Hochstellen durch Hochziehen an den dafür vorgesehenen Griffmulden bis zum Einrasten. Zum Absenken das Seitengitter leicht anheben, die **Sicherungsknöpfe** betätigen und das Seitengitter herunterlassen.



10. Schocklagerung: Hochstellen durch einfaches Hochziehen am Handgriff. In gewünschter Höhe einrasten lassen. Herunterlassen durch vollständiges Anheben bis zum Anschlag und einfaches Herablassen.

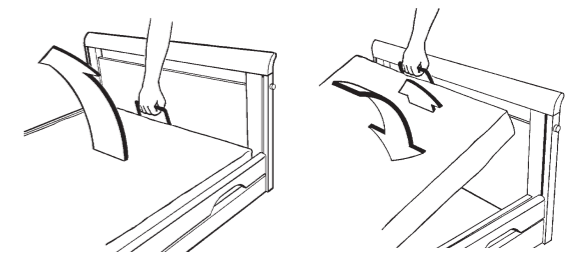

Ausgabe: 2003

VÖLKER
Bessere Betten

Völker AG · Wullener Feld 79 · 58454 Witten
Telefon (0 23 02) 960 960 · Telefax (0 23 02) 960 96 16 · www.voelker.de
Kostenloses Service-Telefon: 0800-VOELKER