

# Kurzgebrauchsanweisung

Modelle 3082 Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Belletto 3082 Vis-a-Vis ab Baujahr 06/2009

**VÖLKER**


## A. Seitengitter

### Seitengitter aufstellen


1. Ziehen Sie das Seitengitterelement seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.
2. Um die Höhe des Seitengitters einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

### Seitengitter herunterklappen

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens (Abb.1), dicht unter dem Holm, um das höhenverstellbare Seitengitterelement in die niedrigste Position zu bringen.
2. Betätigen Sie den mit „Drücken / Press“ beschrifteten Auslöser am unteren Ende des Seitengitterelements (Abb. 2) und kippen Sie es seitlich in die Horizontale, sodass es sich parallel zum Boden befindet.
3. Schieben Sie das Gitterelement vollständig unter die Liegefläche (Abb. 3a, Abb. 3b).

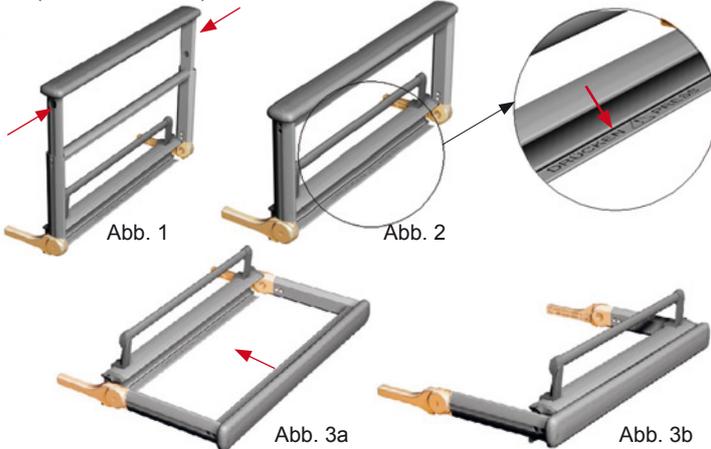

## B. Handschalter

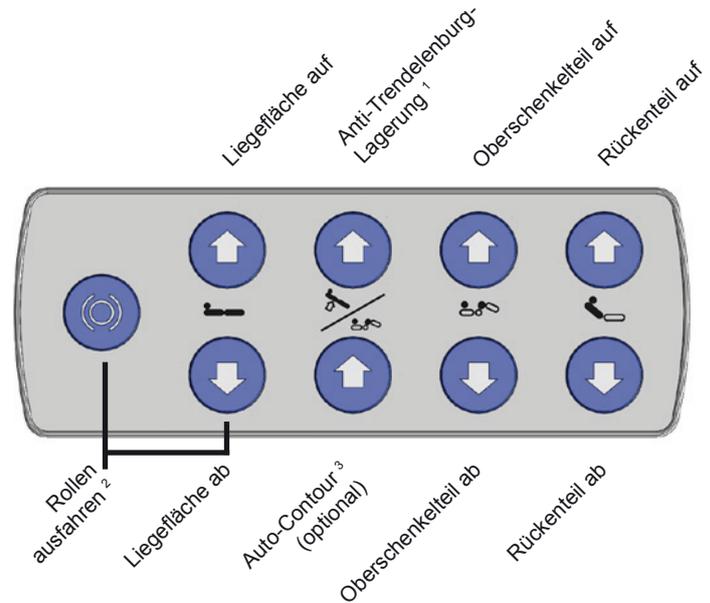


<sup>1</sup> Kopfhochlagerung

<sup>2</sup> beide Tasten gleichzeitig drücken: Liegefläche in niedrigste Position und Rollen fahren aus

<sup>3</sup> Rücken- und Oberschenkelteil gleichzeitig hoch

### C. Personalhandschalter

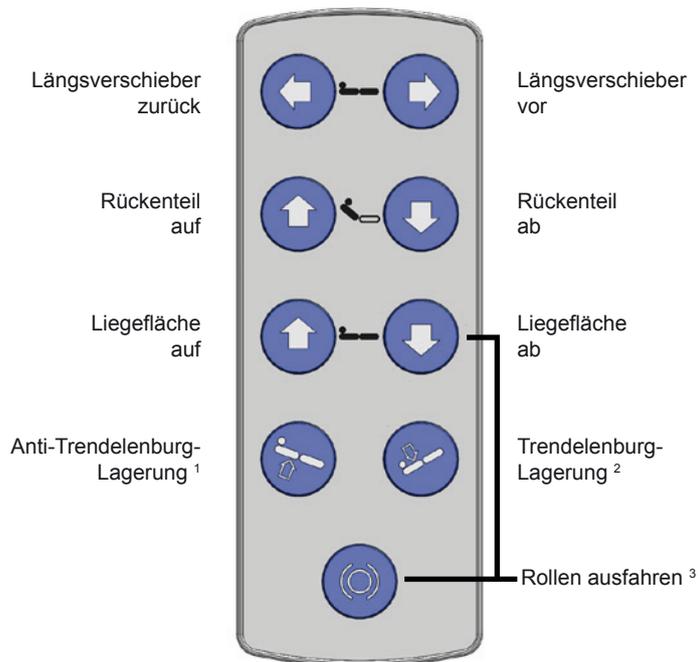

<sup>1</sup> Kopfhochlagerung

<sup>2</sup> Kopftief Lagerung

<sup>3</sup> beide Tasten gleichzeitig drücken: Liegefläche in niedrigste Position und Rollen fahren aus

### D. Tastensperre

Durch die Aktivierung der Tastensperre des Handschalters bzw. des Personalhandschalters werden alle Funktionen des jeweiligen Schalters gesperrt.



Handschalter bzw. Personalhandschalter gesperrt



Handschalter bzw. Personalhandschalter entsperrt

**HINWEIS** Sollte keine elektrische Funktion mehr anzusprechen sein, drücken Sie den grünen Resetknopf am Doppelantrieb. Drücken Sie anschließend nach etwa 10 Sekunden den grünen Knopf an der Netzfreeschaltung, und betätigen Sie danach eine beliebige Handschalterfunktion. Es sollten niemals beide grünen Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden.

### E. Vis-a-Vis Position

**HINWEIS** Längsverschiebung ist nur in waagerechter, unterster Position (ausgenommen des Rückenteils) und bei geschlossener Verriegelung möglich.

Ist die Liegefläche mit der Funktionstaste „Längsverschieber vor“ bis zum Endpunkt verfahren, kann das Unterschenkelteil seitlich, nach dem Entriegeln, nach links oder rechts verschoben werden. Die Höhenverstellung der Liegefläche (Hub) ist in dieser Position gesperrt - die Anti-Trendelenburg-Lagerung sowie die Verstellung von Rückenteil und Oberschenkelteil sind möglich.

**HINWEIS** Das Bett ist nicht für die Reinigung in der Waschstraße geeignet (IPX4).

**HINWEIS** Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung!