

# Kurzgebrauchsanweisung für Modelle S 280 / S 380

(Personaltastatur mit Komplettsperrung)

# VÖLKER

## A. Seitengitter S 280

Um die Seitengitter hochzustellen,

greifen Sie einfach den oberen Seitengitterholm und heben Sie diesen zuerst kopfseitig und dann fußseitig bis zum hörbaren Anschlag an.

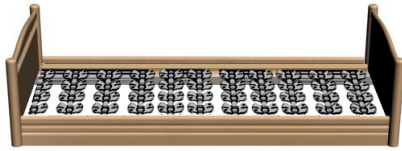


Bild 1

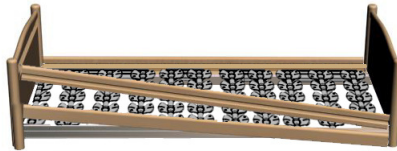


Bild 2



Bild 3

(1)

Um die Seitengitter herabzulassen,

- greifen Sie den oberen Seitengitterholm und heben Sie diesen leicht an,
- drücken Sie den seitlich angebrachten Sicherungsknopf (1) und führen Sie schließlich das Seitengitter mit der Hand nach unten.
- Lassen Sie dabei zuerst die fußseitigen und dann die kopfseitigen Seitengitter ab.



Beim Ablassen der Seitengitter bzw. bei nicht sachgemäßen eingerasteten Seitengittern besteht Einklemmgefahr! Um diese Gefahr zu verhindern, dürfen die Seitengitter nur durch geschultes Pflegepersonal bedient werden!

Aus Sicherheitsgründen sind die Seitengitter bei einer von oben wirkenden Belastung nicht auslösbar.

## B. Seitensicherung S 380

Um ein Seitensicherungsteil aufzustellen,

ziehen Sie das Teil horizontal seitlich bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch. Um die Höhe der Seitensicherung einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

Herunterklappen der Seitensicherung:

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite, um den teleskopierbaren Teil der Seitensicherung in die niedrigste Position zu bringen.
2. Drücken Sie (2a) den Auslöser nach unten und (2b) kippen Sie die Seitensicherung in die Horizontale.
3. Schieben Sie die Seitensicherung vollständig unter die Liegefläche.



1




2 (a)



2 (b)



3

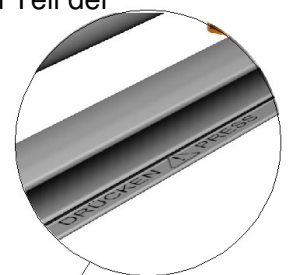

# Kurzgebrauchsanweisung für Modelle S 280 / S 380


(Personaltastatur mit Komplettsperrung)



## C. Patientenhandschalter

<b>Rückenteil auf</b>		<b>Rückenteil ab</b>
<b>Oberschenkelteil auf</b>		<b>Oberschenkelteil ab</b>
<b>Komfort-Taste</b> (Anti-Trendelenburglage) Aktivierung/Deaktivierung		<b>Auto – Contour</b> (optional) ( Rücken- & Oberschenkelteil gleichzeitig hoch)
<b>Höhenverstellung auf</b>		<b>Höhenverstellung ab</b>

## D. Personaltastatur

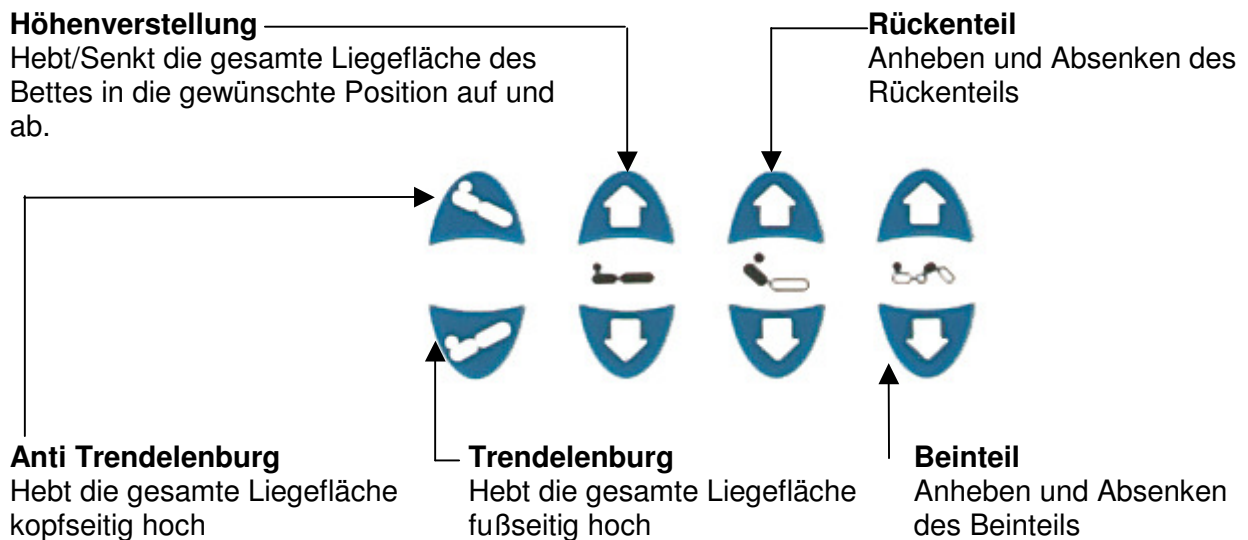

## E. Funktionen sperren

Durch die Aktivierung der Sperre am Patientenhandschalter werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt. Die Personaltastatur bleibt funktionsfähig.  
Durch die Aktivierung der Sperre an der Personaltastatur werden alle Funktionen des Bettes gesperrt.



Aktivierung der Sperre



Deaktivierung der Sperre