

Kurzgebrauchsanweisung für Klinikbett Modell S 861-2W

Das Völker Klinikbett S 861-2W ist bis auf die durchgehenden Seitengitter baugleich mit dem Modell S 961-2W. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Bedienung der Seitengitter und beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Klinikbettes Modell S 961-2W.

A. Seitengitter

Um die Seitengitter hochzustellen,

- greifen Sie einfach den oberen Seitengitterholm und heben Sie diesen zuerst kopfseitig und dann fußseitig bis zum hörbaren Anschlag an.




Um die Seitengitter herabzulassen,

- greifen Sie den oberen Seitengitterholm und heben Sie diesen leicht an,
- ziehen Sie an dem seitlich angebrachten Sicherungsknopf (s. Bild 1) in Pfeilrichtung und führen Sie schließlich die Seitengitter mit der Hand nach unten.
- Lassen Sie dabei zuerst die fußseitigen und dann die kopfseitigen Seitengitter ab.




- Beim Ablassen der Seitengitter bzw. bei nichtsachgemäßen eingerasteten Seitengittern besteht Einklemmgefahr! Um diese Gefahr zu verhindern, dürfen die Seitengitter nur durch geschultes Pflegepersonal bedient werden!
- Aus Sicherheitsgründen sind die Seitengitter bei einer von oben wirkenden Belastung nicht auslösbar.

B. Patientenhandschalter

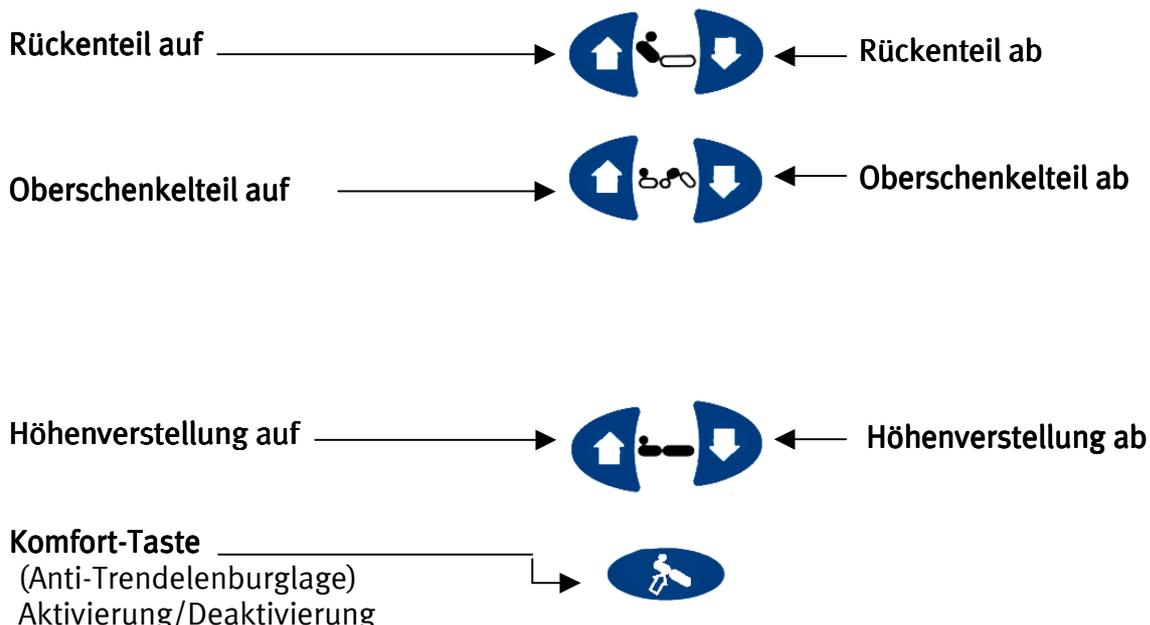

Kurzgebrauchsanweisung für Klinikbett Modell S 861-2W

C. Personaltastatur

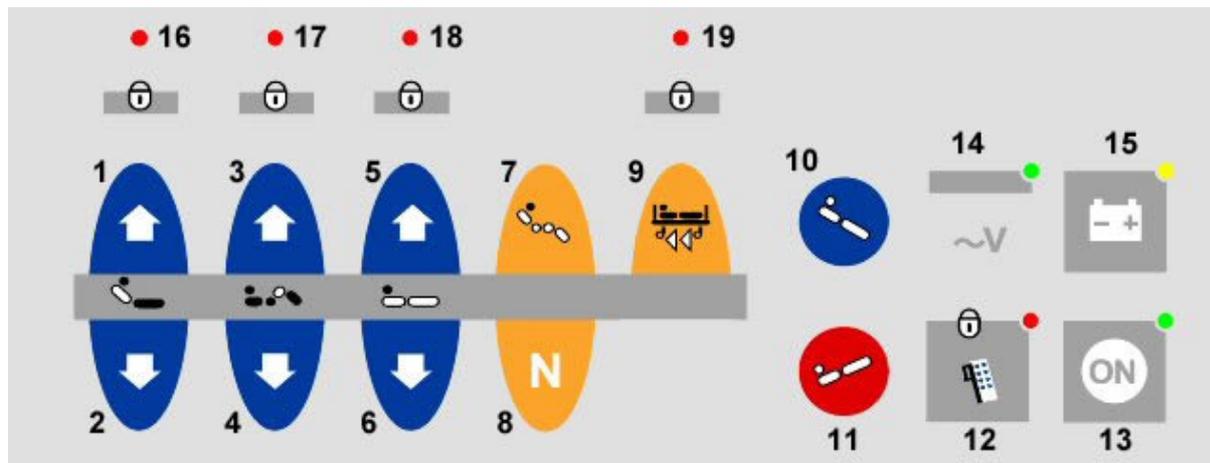

- 1 Rückenteil AUF
- 2 Rückenteil AB
- 3 Oberschenkelteil AUF
- 4 Oberschenkelteil AB
- 5 Liegefläche AUF (durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 6 Liegefläche AB (durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 7 Komfortstellung (Cardiac Chair-Position, durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 8 Grundstellung (Antriebe fahren in die unterste Stellung, durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 9 Transport (RT und OS unverändert, Liegeflächenhöhe 65 cm, durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 10 Anti-Trendelenburg – Position (Fußtief)
- 11 Trendelenburg – Position (Kopftief) - (durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 12 Sperrung Handschalter (alle Funktionen am Handschalter gesperrt)
- 13 „ON“-Taste (Einschalten der Steuertastatur)
- 14 Netzspannungsanzeige
- 15 Batterieanzeige (grün : voll geladen; Orange : Ladung < 80%; Rot : Akku leer; Blinkend : Akku wird geladen)
- 16 Sperrung Rückenteil
- 17 Sperrung Oberschenkel
- 18 Sperrung Höhenverstellung Liegefläche
- 19 Sperrung aller Automatikfunktionen



Bitte beachten Sie, das die Tastatur explizit durch drücken der „ON“ – Taste (Taste 13) eingeschaltet werden muß, um das Bett zu bedienen.

Durch gleichzeitiges Drücken zweier Sperrtasten (16-19) kann das komplette Bett gesperrt / entsperrt werden.

Sollte keine Funktion des Bettes mehr anzusprechen sein, drücken Sie bitte die grüne Taste an der Netzfreeschaltung.



Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanleitung