


## A. Seitensicherung S 960 - 1 :


**Um ein Seitensicherungsteil aufzustellen,**  
ziehen Sie das Teil seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.  
Um die Höhe der Seitensicherung einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

### Zum Herunterklappen des Seitensicherungsteils


1. die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens drücken um den höhenverstellbaren Teil des Sicherungsteils in die niedrigste Position zu bringen.
2. Den Auslöser nach unten drücken und das Seitensicherungsteil in die Horizontale kippen, so das es sich parallel zum Boden befindet.
3. Die Seitensicherung vollständig unter die Liegefläche schieben.

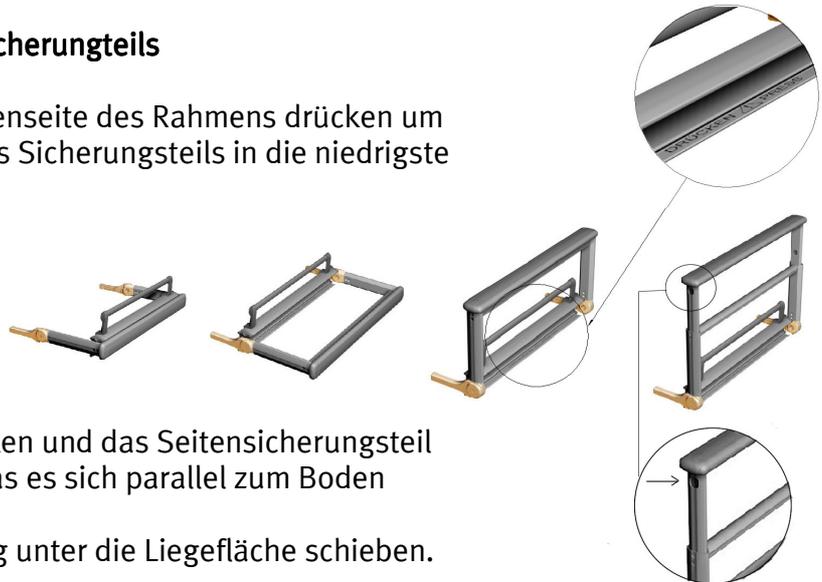

## B. Patientenhandschalter

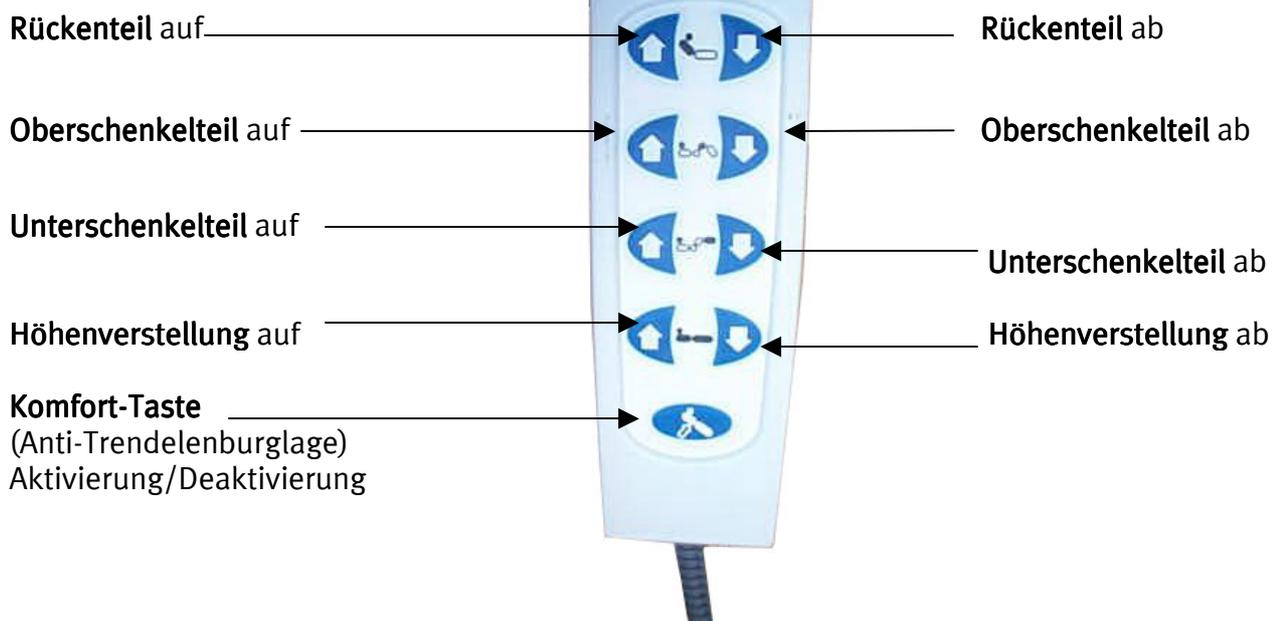

**C. Schwesterntastatur** in Fußteil integriert, mit Unterschenkelmotor

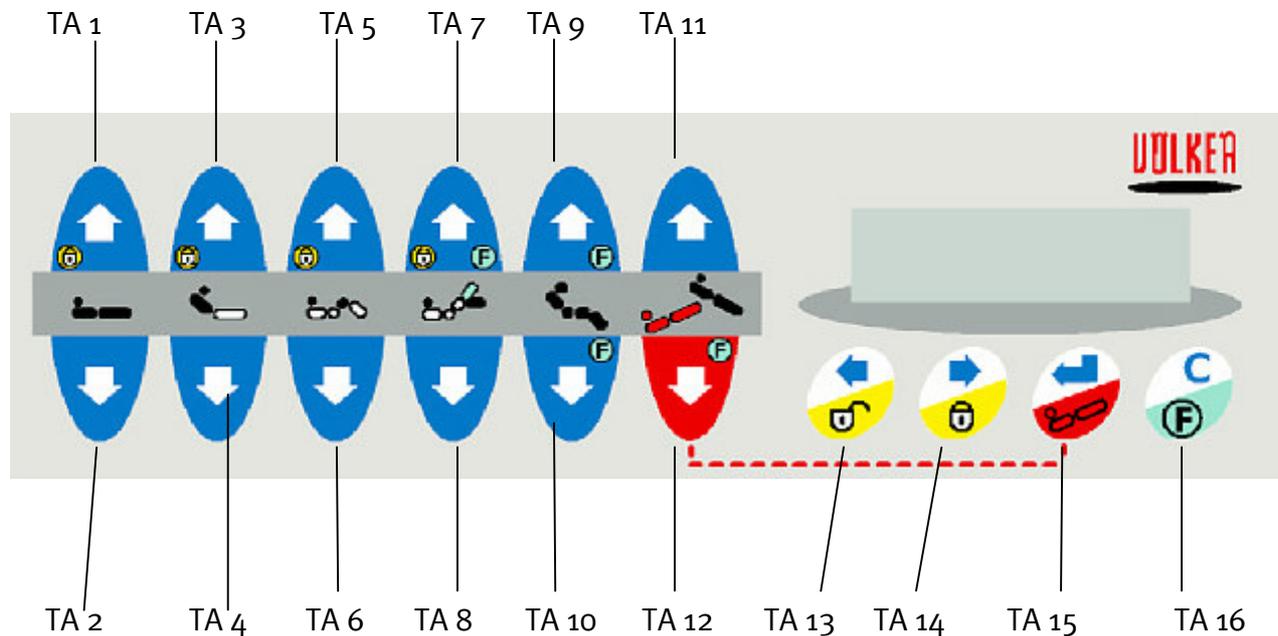

Bewegungs-Taste 1 + 2	Höhenverstellung auf/ab
Bewegungs-Taste 3 + 4	Rückenteil auf/ab
Bewegungs-Taste 5 + 6	Oberschenkelteil auf/ab
Bewegungstaste 7 + 8	Unterschenkelteil auf/ab
Bewegungstaste 9	Cardiac-Chair-Position
Bewegungstaste 10	Grundstellung
Bewegungstaste 11	Anti-Trendelenburg (Fußtieflage der Liegefläche)
Bewegungstaste 12	Kippen in die Waagerechte aus der Anti-Trend.-Pos.
Menü-Taste 13	Taste zum Entsperren in Verbindung mit einer der mit einem gelben Punkt versehenen Bewegungstasten
Menü-Taste 14	Taste zum Sperren in Verbindung mit einer der mit einem gelben Punkt versehenen Bewegungstasten
Bewegungs-Taste 12 + Menü-Taste 15	Trendelenburg (Kopftieflage der Liegefläche)
Menü-Taste 15	Enter-Taste
Menü-Taste 16	Funktionstaste/Löschtaste
Menü-Taste 14 + Menü-Taste 16	Zugang zum Benutzermenü

