

Kurzgebrauchsanleitung für Klinikbett Modell S 961-2W


A. Seitensicherung

Aufstellen der Seitensicherung


Ziehen Sie die Seitensicherung seitlich bis zum Anschlag heraus und klappen Sie sie hoch. Um die Höhe der Seitensicherung einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.

Herunterklappen der Seitensicherung

1. Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite, um den teleskopierbaren Teil der Seitensicherung in die niedrigste Position zu bringen.
2. Drücken Sie (2a) den Auslöser nach unten und (2b) kippen Sie die Seitensicherung in die Horizontale.
3. Schieben Sie die Seitensicherung vollständig unter die Liegefläche.

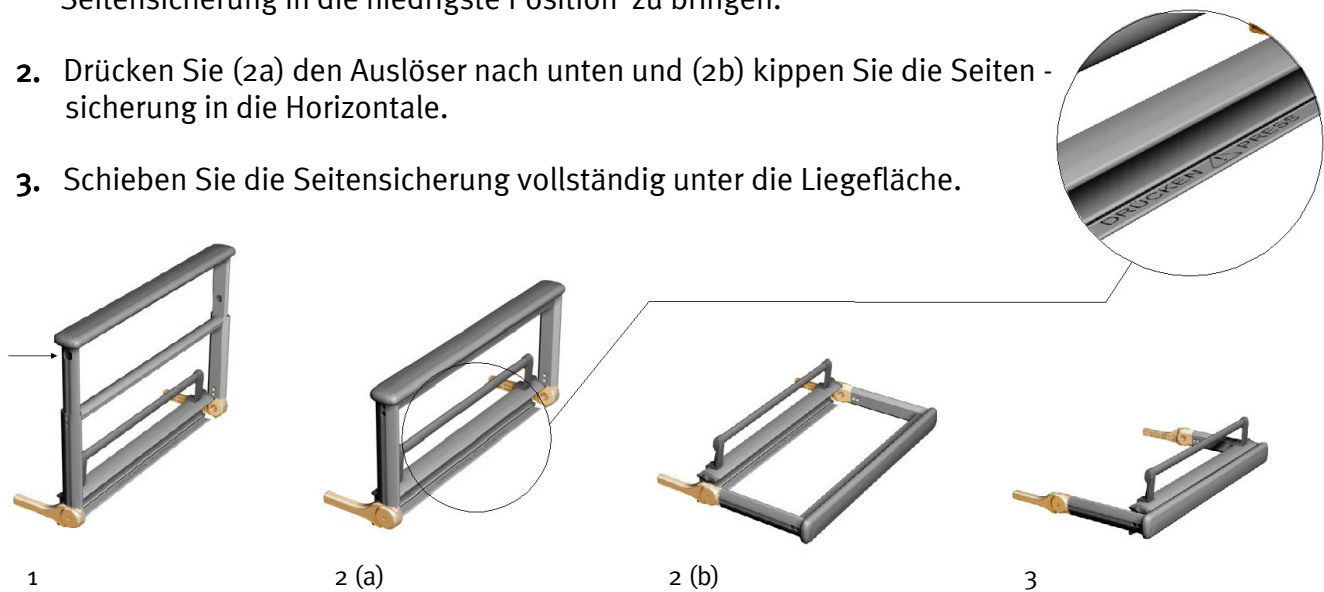


B. Patientenhandschalter

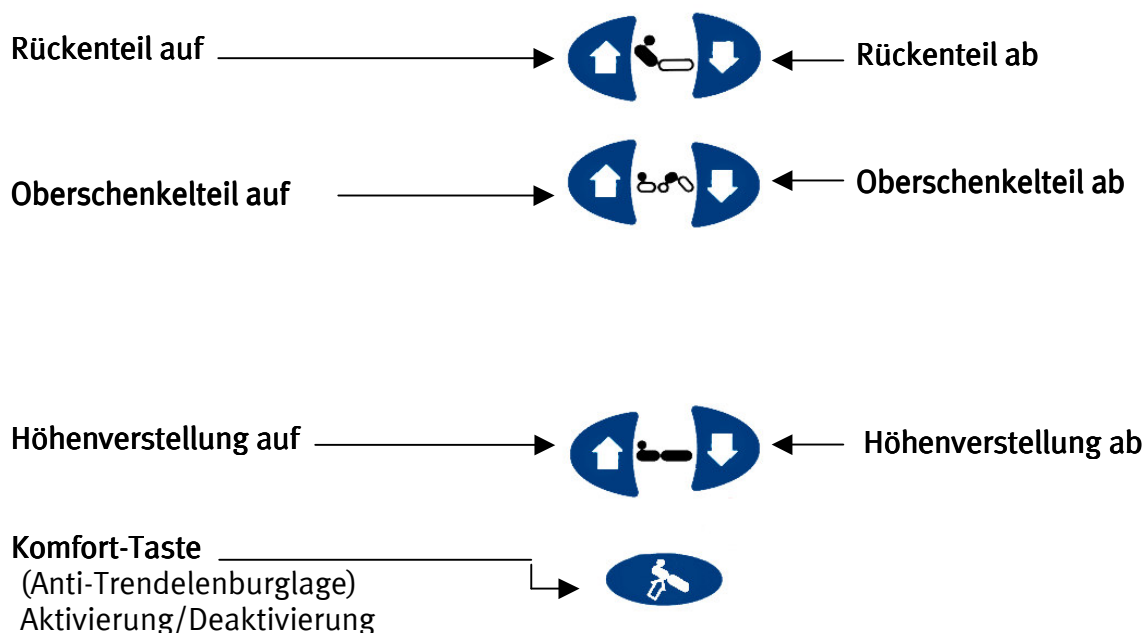

Kurzgebrauchsanleitung für Klinikbett Modell S 961-2W

C. Personaltastatur

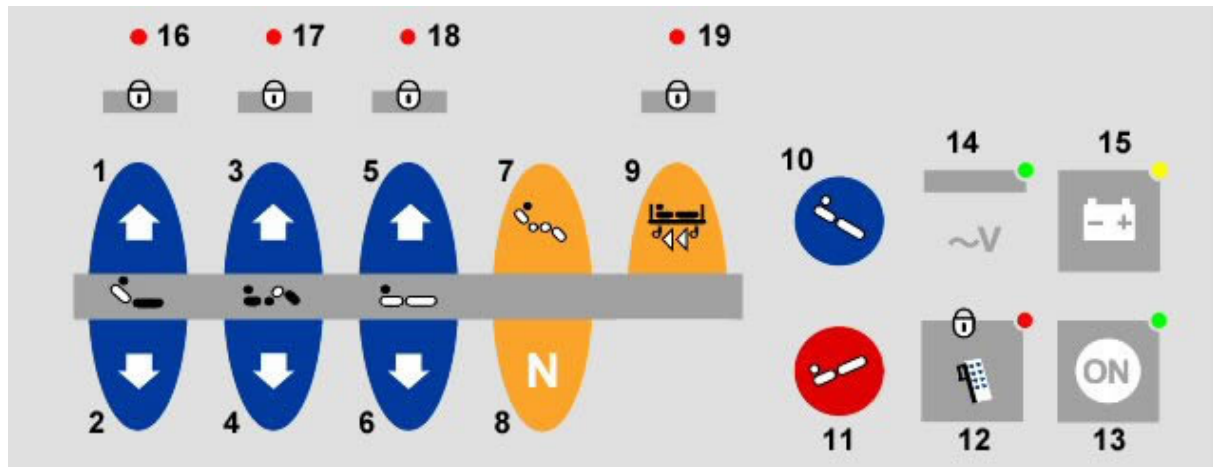

- 1 Rückenteil AUF
- 2 Rückenteil AB
- 3 Oberschenkelteil AUF
- 4 Oberschenkelteil AB
- 5 Liegefläche AUF (durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 6 Liegefläche AB (durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 7 Komfortstellung (Cardiac Chair-Position, durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 8 Grundstellung (Antriebe fahren in die unterste Stellung, durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 9 Transport (RT und OS unverändert, Liegeflächenhöhe 65 cm, durch doppeltes Drücken als Automatik)

- 10 Anti-Trendelenburg – Position (Fußtief)
- 11 Trendelenburg – Position (Kopftief) - (durch doppeltes Drücken als Automatik)
- 12 Sperrung Handschalter (alle Funktionen am Handschalter gesperrt)
- 13 „ON“-Taste (Einschalten der Steuertastatur)
- 14 Netzspannungsanzeige
- 15 Batterieanzeige (grün : voll geladen; Orange : Ladung < 80%; Rot : Akku leer; Blinkend : Akku wird geladen)
- 16 Sperrung Rückenteil
- 17 Sperrung Oberschenkel
- 18 Sperrung Höhenverstellung Liegefläche
- 19 Sperrung aller Automatikfunktionen



Bitte beachten Sie, das die Tastatur explizit durch drücken der „ON“ – Taste (Taste 13) eingeschaltet werden muß, um das Bett zu bedienen.

Durch gleichzeitiges Drücken zweier Sperrtasten (16-19) kann das komplette Bett gesperrt / entsperrt werden.

Sollte keine Funktion des Bettes mehr anzusprechen sein, drücken Sie bitte die grüne Taste an der Netzfreeschaltung.



Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanleitung