


# Montageanleitung für Umrüstsatz 3010

## Umbau Seitengitter Modell 3010

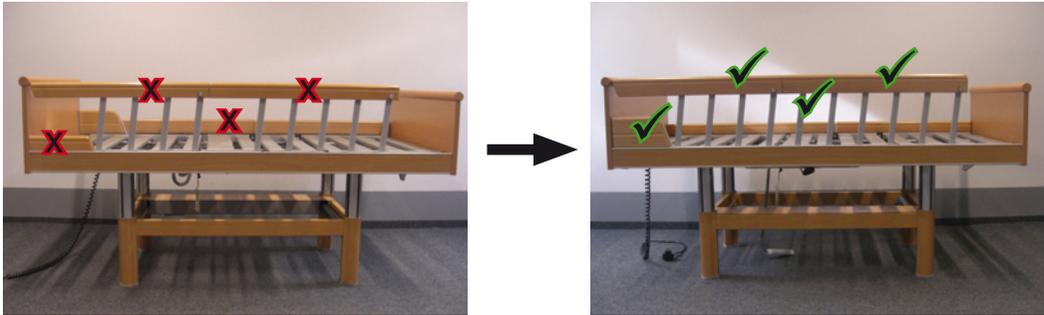

### Benötigtes Werkzeug


- 10er HSS-Spiralbohrer Metall
- 2x 17er Maulschlüssel
- 25er Torx Schrauber-Bit
- 15er Torx lang
- Bohrschablone
- Inbusschlüssel 5 mm

### Zubehör



Pos	Art. Nr.	Artikel	Anz
01	SR2031	Spanplattenschraube vz 3,5x12	6
02	SR2171	Spanplattenschraube vz Spax 5x20 TX25	4
03	BG1112	Rastnockeneinheit vormontiert	4
04	F041	Seitengitterbolzen galv. vz 3010	2
05	SR2007	Sechskantmutter vz M10x1 V DIN 980	2
06	KT016	Seitengitterkappe für Strebe	2
07		Holzseitengitter 3010 Kopfteil, rechts und links	2
08		Holzseitengitter 3010 Mittelteil, rechts und links	2
09		Holzseitengitter 3010 Fußteil, rechts und links	2
10	F080	Strebe montiert 3010	2
11	HPL2479	Bohrschablone Umrüstsatz 3010	1
12	BG2404	Seitengittersicherung 3010	1

### Montage

1. Drehen Sie die Druckknöpfe heraus.

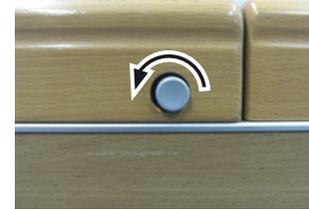


2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben von Handlauf und Seitengitterstreben mit einem 15er Torx-Biteinsatz und verlängertem Aufsatz.

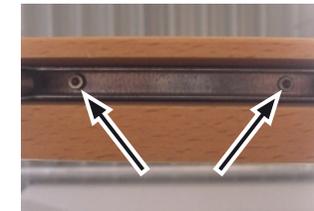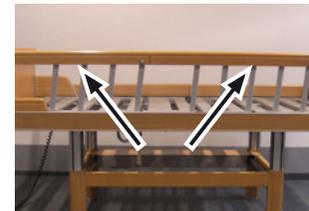

3. Ziehen Sie die Handläufe von den Seitengitterstreben ab.



4. Nehmen Sie die Rastnocken und Stößel aus der Halterung heraus.

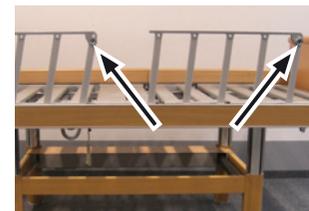


# Montageanleitung für Umrüstsatz 3010

## Umbau Seitengitter Modell 3010

5. Ziehen Sie den Dekorstreifen heraus. Lösen Sie das Sitzteil, nehmen das Fußteil ab und ziehen die Liegefläche etwas heraus.




6. Legen Sie die Bohrschablone (Pos. 11) an und bohren Sie ein 10er Loch. Achten Sie darauf, dass die Bohrschablone bündig mit den Seitengitterholmen und dem Wangenprofil ist. Der Abstand der Bohrung zur vorhandenen Bohrung Richtung Fußende muss Mitte-Mitte Bohrung 150 mm betragen.

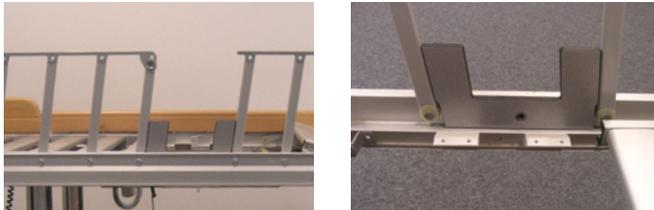

7. Setzen Sie die Seitengitterkappe (Pos. 06) auf das untere Ende der mitgelieferten Seitengitterstrebe (Pos. 10) und verschrauben (Pos. 4+5) diese mit dem Wangenprofil.




8. Setzen Sie die Rastnocken und Stößel (Pos. 03) in die dafür vorgesehene Halterung.

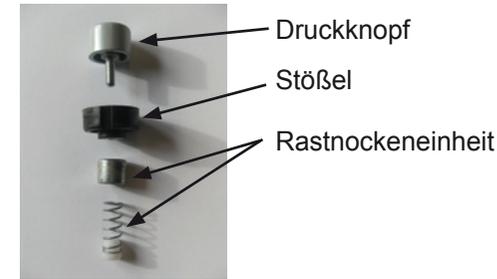

9. Schieben Sie den Handlauf auf die Seitengitterstreben.  
 10. Schrauben Sie die Druckknöpfe ein.  
 11. Verschrauben (Pos. 1) Sie die Handläufe (Pos. 8+9) mit den Seitengitterstreben. Verschrauben (Pos. 2) Sie die neuen Ausgleichsstücke (Pos. 7) am Kopfende mit dem Wangenprofil.  
 12. Schieben Sie den Dekorstreifen wieder ein.  
 13. Bringen Sie das Sitzteil und das Fußteil wieder an.

### Montage der Seitengittersicherung (Pos. 12)

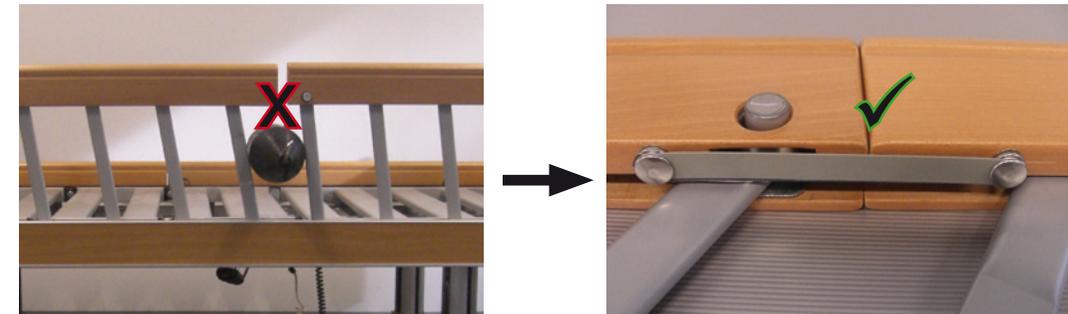

14. Befestigen Sie die Seitengittersicherung beidseitig an den Handläufen.

