

Montageanleitung Fixiergurthalterungen

Modell ZP-3051


für Bettenmodelle 2080 (SE), 3010, 3080 (K) Baujahr 2000 - 05/2003

VÖLKER




Die Liegeflächen dürfen während einer Fixierung auf keinen Fall verstellt werden und müssen in der untersten Position stehen.

Die Verstellfunktionen der Liegefläche sind während einer Fixierung zu sperren und der Handschalter ist außerhalb der Reichweite des Bewohners/Patienten aufzubewahren!

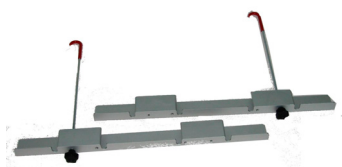

Die Halterung wird jeweils an der **Seite der Kopfliegefläche** angebracht. Die Position ist **unterhalb der Hehebügel** der Kopfliegefläche.

Die Halterungen müssen immer an beiden Seiten des Bettes angebracht werden !

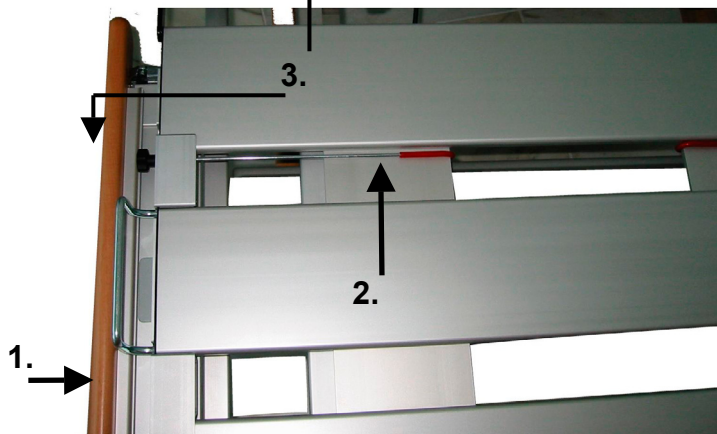

1. Schieben Sie die Halterung seitwärts auf die Elemente der Liegefläche.
2. Ziehen Sie den Fixierstab bis hinter den Langholm des Rückenteils.
3. Drehen Sie an der Schraube, um die Position der Halterung zu fixieren.
4. Bringen Sie das Fixiersystem entsprechend den Vorgaben des Herstellers an.



- Fixiersysteme wie Gurte dürfen nur nach exakter Vorgabe durch den Hersteller genutzt werden.
- Bringen Sie das Fixiersystem nicht am Rahmen des Bettes an, sondern immer an der beweglichen Liegefläche.
- Werden Fixiersysteme in Form von Bauchgurten verwendet, so ist sicherzustellen, dass die Seitengitter vollständig aufgestellt sind. Die Lücke bei den Modellen 3010 und 3080 (K) ist in diesem Fall durch eine Einsteckscheibe zu verschließen!

Völker AG • Wullener Feld 79 • 58454 Witten - Germany
Telefon +49 2302 960 96-0 • Telefax +49 2302 960 96-16
www.voelker.de • service@voelker.de