


Entfall der Motorabdeckhauben an den Hubkopftraversen der Untergestelle 4 und 5 für die Bettenmodelle S 962-2

(Zusatz für das Servicehandbuch S31)

Ab dem 27.06.2017 entfallen bei Betten der Modelle S 962-2 an den Untergestellen 4 und 5 die Motorabdeckhauben der **kopfseitigen** Hubkopftraversen. Es werden nur noch die rechts gezeigten Baugruppen verbaut.

BG5403, Hubkopftraverse Kopf, S 962-2, UG4, UG5

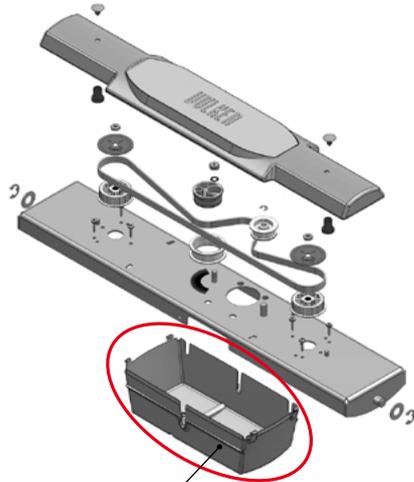

KT3161-01
Abdeckhaube unten
(Pos. 20 in der bisherigen Stückliste)



Entfällt

BG5403 Rev. 1, Hubkopftraverse Kopf, S 962-2, UG4, UG5

Pos.	Art. Nr.	Artikel	Anz.
01	F4046	Hubkopftraverse Kopf	1
02	KT1168	Spannrolle	1
03	KT2286	Riemenrad Kerbverzahnung	2
04	KT515	Laufrolle Riemenspanner	1
05	F1531-01	Riemenspanner exzentrisch	1
06	SR1296	Schnorr-Scheibe verzinkt	1
07	SR055	Sechskantmutter verzinkt	1
08	KT2045	Zahnriemen 1050 5M12	1
09	F2335	Anlaufscheibe	2
10	SR2193	Sechskantmutter verzinkt	2
11	SR2383	Sicherungsscheibe verzinkt	1
12	SR2062	Spanplattenschraube verzinkt	6
13	SR2485	ISO Blindmutter	2
14	SR742	U-Scheibe PVC grau	2
15	SR165	Sicherungsscheibe 12	2
16	KT2735	Abdeckung Hubkopftraverse	1
17	KT2688	Schnappnagel RAL 7045	2

BG6402 Rev. 1, Höhenverstellantrieb Kopf UG4, UG5, S 962-2

Pos.	Art. Nr.	Artikel	Anz.
01	BG600-01	Höhenverstellantrieb HV02	1
02	KT426	Motorkappe	1

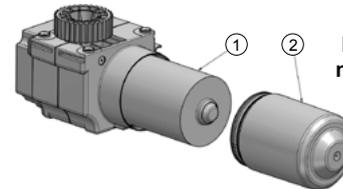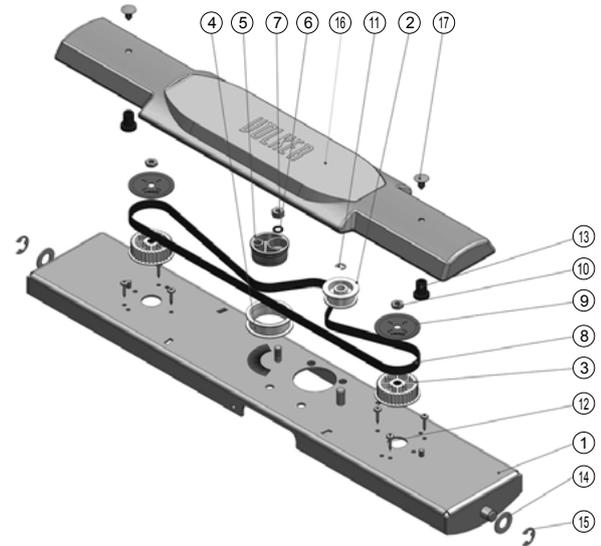

Zusätzlich werden die Höhenverstellantriebe nur noch in der hier gezeigten Konfiguration verbaut.


Fortsetzung auf der Rückseite

Entfall der Motorabdeckhauben an den Hubkopftraversen der Untergestelle 4 und 5 für die Bettenmodelle S 962-2

(Zusatz für das Servicehandbuch S31)

Ab dem 27.06.2017 entfallen bei Betten der Modelle S 962-2 an den Untergestellen 4 und 5 die Motorabdeckhauben der fußseitigen Hubkopftraversen. Es werden nur noch die rechts gezeigten Baugruppen verbaut.

BG5404, Hubkopftraverse Fuß, S 962-2, UG4, UG5

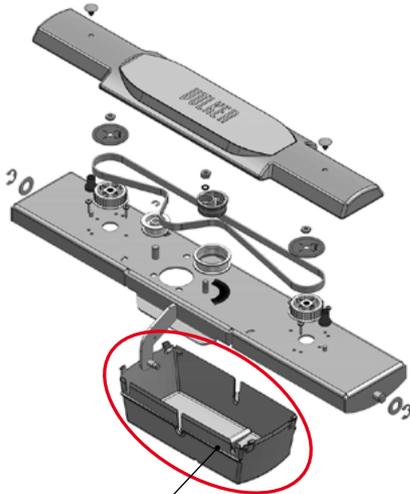

KT3161-01
Abdeckhaube unten
(Pos. 8 in der bisherigen Stückliste)



Entfällt

BG5404 Rev. 2, Hubkopftraverse Fuss, UG4, UG5, S 962-2, DA02

Pos.	Art. Nr.	Artikel	Anz.
01	F4047	Hubkopftraverse Fuss	1
02	KT2286	Riemenrad Kerbverzahnung	2
03	F2335	Anlaufscheibe	2
04	KT1168	Spannrolle	1
05	KT515	Laufrolle Riemenspanner	1
06	F1531-01	Riemenspanner exzentrisch	1
07	KT2045	Zahnriemen 1050 5M12	1
08	KT2735	Abdeckung Hubkopftraverse	1
09	KT2688	Schnappnagel RAL 7045	2
10	SR2485	ISO Blindmutter	2
11	SR2193	Sechskantmutter verzinkt	2
12	SR1296	Schnorr-Scheibe verzinkt	1
13	SR055	Sechskantmutter verzinkt	1
14	SR2383	Sicherungsscheibe verzinkt	1
15	SR2062	Spanplattenschraube verzinkt	6
16	SR742	U-Scheibe PVC grau	2
17	SR165	Sicherungsscheibe 12	2
18	SR038	Kabelschelle	1
19	SR2119	Linsenkopfschraube	1

BG6403 Rev. 1, Höhenverstellantrieb Fuss UG4, UG5, S 962-2

Pos.	Art. Nr.	Artikel	Anz.
01	BG600-01	Höhenverstellantrieb HV02	1
02	KT426	Motorkappe	1

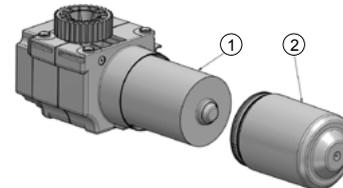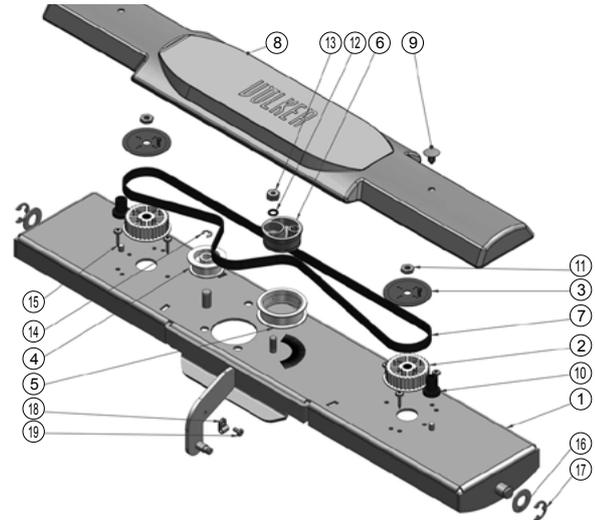

Zusätzlich werden die Höhenverstellantriebe nur noch in der hier gezeigten Konfiguration verbaut.