

Gebrauchsanweisung Sensify Bewegungsmelder

Völker. Nah am Mensch

VÖLKER

Einsatzbereiche

Zimmer, Flur, unter dem Bett...

Lieferumfang



1. Vorbereitung

1. Ziehen Sie das untere Teil des Sensify Bewegungsmelders vom Gehäuse ab. Darunter finden Sie jetzt das Batteriefach und einen kleinen grauen Taster den Sie später zum Anlernen an die Funk-Empfänger benötigen.
2. Stecken Sie die Batterie mit dem Plus-Pol in die Batteriehalterung.

Tipp Leichtes „Knicken“ beim Lösen des Unterteils erleichtert Ihnen das Öffnen.



3. Bitte entscheiden Sie nun, welche Situation bei Ihnen vorliegt – und was Sie zusätzlich installieren wollen:


- Verbinden des Bewegungsmelders **direkt mit dem Sensify Funk-Empfänger, wenn schon das Sensify Bettfluchtssystem oder die Sensify Sensor-Matratze verbunden ist.**
Weiter auf Seite 4
- Verbinden des Bewegungsmelders **direkt mit der Sensify Funksteckdose, wenn schon das Sensify Bettfluchtssystem oder die Sensify Sensor-Matratze verbunden ist.**
Weiter auf Seite 6
- Verbinden des Bewegungsmelders **direkt mit der Sensify Funksteckdose.**
Weiter auf Seite 9

2. Verbinden des Bewegungsmelders direkt mit dem Sensify Funk-Empfänger, wenn schon das Sensify Bettfluchtsystem oder die Sensify Sensor-Matratze verbunden ist.

1. Ziehen Sie den Funk-Empfänger aus der Steckdose und warten Sie, bis die LRN-Taste erloschen ist.
-
2. Stecken Sie den Funk-Empfänger wieder in die Steckdose.
-



3. Die LRN-Taste leuchtet dauerhaft rot.
-

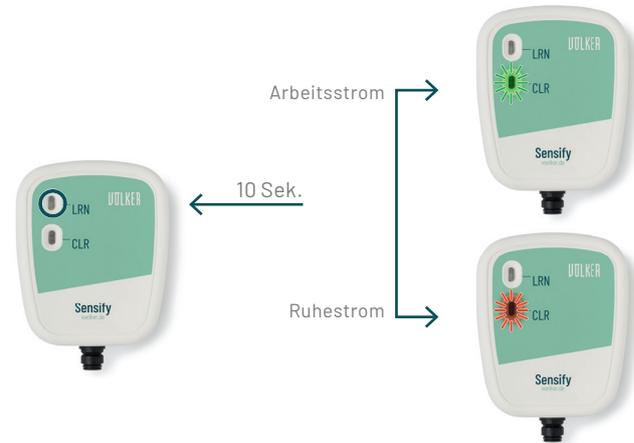

4. Drücken Sie die rote LRN-Taste ca. 10 Sek. dauerhaft, bis die Leuchte erlischt und die CLR-Taste grün (Arbeitsstrom) bzw. rot (Ruhestrom) blinkt.
-



← 3×

- Drücken Sie 3× kurz hintereinander auf die Taste unterhalb der Batterie.



← 1×

- Zum Beenden des Anlernprozesses drücken Sie einmal auf die blinkende CLR-Taste.



Arbeitsstrom



Ruhestrom

- Das Piepen des Funk-Empfängers bestätigt Ihnen, dass der Bewegungsmelder angelernt ist. Die CLR-Taste blinkt grün (Arbeitsstrom) bzw. rot (Ruhestrom).



- Die LRN-Taste leuchtet jetzt wieder dauerhaft rot, der Anlernprozess für den Bewegungsmelder ist abgeschlossen.

- Der Bewegungsmelder ist jetzt einsatzbereit in Verbindung mit dem Sensify Bettfluchtsystem.

Verbinden des Bewegungsmelders direkt mit der Sensify Funksteck- dose, wenn schon das Sensify Bettfluchtsystem oder die Sensify Sensor-Matratze verbunden ist.




1. Stecken Sie die Sensify Funksteckdose in eine Steckdose.



2. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab. Hierdurch werden keine stromführenden Teile freigelegt und es besteht keine Gefahr für Sie.



3. Die LRN- und CLR-Tasten liegen leider etwas schwer zugänglich. Zum Drücken der Tasten benötigen Sie einen Kugelschreiber oder eine aufgebogene Büroklammer. Nochmals: Sie können dort keine stromführenden Teile berühren!

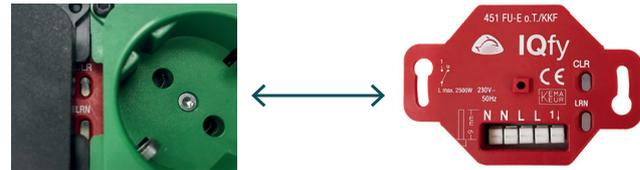

Dieses Bauteil befindet sich unterhalb der Abdeckung.



4. Drücken Sie 1× die LRN-Taste.

5. Drücken Sie 3× kurz und schnell auf einen Bett-Sensor / die Sensormatratze.



6. LRN-Taste leuchtet für ca. 2 Sek. dauerhaft rot – und fängt dann wieder an zu blinken.



7. Drücken Sie wiederum die LRN-Taste 1× kurz.



8. Die Sensoren sind nun an die Funksteckdose angelernt. LRN-Taste leuchtet nun dauerhaft grün / CLR-Taste blinkt rot.



9. Um den Sensify Bewegungsmelder anzulernen, drücken Sie die Taste seitlich am Bewegungsmelder 3× kurz und schnell. Die LRN-Taste leuchtet kurz dauerhaft rot und fängt dann wieder an zu blinken.
-

10. Um auch den Sensify Lichtschalter mit anzulernen, drücken Sie die 1 auf dem Lichtschalter 3× kurz und schnell. LRN-Taste leuchtet kurz dauerhaft rot und fängt dann wieder an zu blinken.
-

← 3×



11. Um den Anlernvorgang zu beenden drücken Sie 1× auf die LRN-Taste.
-

12. Setzen Sie die obere Abdeckung nun wieder auf die Funksteckdose.
-

← 1×

3. Verbinden des Bewegungsmelders direkt mit der Sensify Funksteckdose




1. Stecken Sie die Sensify Funksteckdose in eine Steckdose.



2. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab. Hierdurch werden keine stromführenden Teile freigelegt und es besteht keine Gefahr für Sie.



3. Die LRN- und CLR-Tasten liegen leider etwas schwer zugänglich. Zum Drücken der Tasten benötigen Sie einen Kugelschreiber oder eine aufgebogene Büroklammer. Nochmals: Sie können dort keine stromführenden Teile berühren!

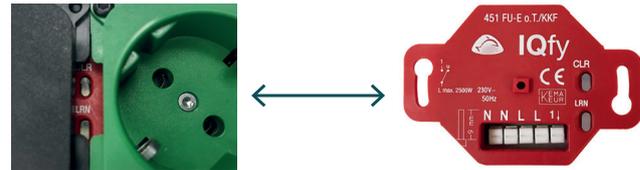

Dieses Bauteil befindet sich unterhalb der Abdeckung.



4. Drücken Sie 1× die LRN-Taste.



6. LRN-Taste leuchtet für ca. 2 Sek. dauerhaft rot – und fängt dann wieder an zu blinken.



5. Drücken Sie 3× kurz auf die kleine Taste im Bewegungsmelder



7. Drücken Sie wiederum die LRN-Taste 1× kurz.



8. Der Bewegungsmelder ist jetzt an der Funksteckdose angelernt. LRN-Taste leuchtet nun dauerhaft grün und CLR-Taste blinkt rot.

9. Um den Sensify Lichtschalter mit anzulernen, drücken Sie die 1 auf dem Lichtschalter 3 × kurz und schnell. LRN-Taste leuchtet kurz dauerhaft rot und fängt dann wieder an zu blinken.



10. Um den Anlernvorgang zu beenden drücken Sie 1× auf die LRN-Taste.

11. Setzen Sie die obere Abdeckung nun wieder auf die Funksteckdose.

4. Löschen aller Einstellungen

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Installation nicht wie beschrieben funktioniert. Dann empfiehlt es sich, den Sensify Funk-Empfänger komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Durch Ziehen und Wiedereinstecken des Sensify Funk-Empfängers in die Steckdose kann die Einstellung innerhalb von 30 Sek. gelöscht werden.

2. Die LRN-Taste ca. 10 Sek. drücken, bis die CLR-Taste blinkt.

3. Die CLR-Taste ca. 3 Sek. drücken, bis das Licht kurz ausgeht, bevor es wieder grün blinkt. Der Funk-Empfänger befindet sich jetzt wieder im Auslieferungszustand und kann entsprechend der Bedienungsanleitung neu eingestellt werden.

5. Löschen / Auslernen der Sensify Sender und Sensoren

Durch längeres Drücken der CLR-Taste, bis die LRN-Taste rot blinkt, wird der interne Speicher komplett gelöscht, alle darauf angelernten Sender wie z.B. Sensormatratze und Lichtschalter werden ausgelernt bzw. in den Auslieferungszustand gebracht. Der Vorgang wird durch zweimaliges Drücken der LRN-Taste abgeschlossen.

6. Wartung und Pflege

Sensify Produkte können vorsichtig mit einem weichen Pflagetuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

7. Desinfektion

Benutzen Sie handelsübliche Desinfektionsmittel.

8. Technische Daten

Versorgungsspannung

Steckertyp	
Sendeleistung	10 mW
Spannungsversorgung	Lithium-Batterie Mignon 3,6V
Lebensdauer	3–5 Jahre
Umgebungstemperatur	0° bis +40°C
Approbationen	CE
Schutzart	IP20
Funksystem	868,3 MHz EnOcean
Schaltweg	
Relative Luftfeuchte	
Masse B×H×T	2,2×10,0×2,5 cm

9. Hersteller Vertriebspartner

Hersteller von Völker Sensify Bewegungsmelder

IQfy GmbH

Am Stadion 2
58540 Meinerzhagen
+49 2354 / 9449969
info@iqfy.de

**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz** DE278220762

**Eingetragen beim Amtsgericht Iserlohn
Handelsregister** HRB 7382

Geschäftsführer Andreas Thometzek

Exklusiver Vertriebspartner
Völker Sensify Bewegungsmelder

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41(0) 44 563 1939

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31(0) 20 808 1603

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49(0) 2302 960 9630

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365