

Gebrauchsanweisung

Sensify Tür-Sensor

Völker. Nah am Mensch


VÖLKER


1. Vorbereitung



Der Sensify Tür-Sensor bezieht seine Stromversorgung umweltfreundlich aus den eingebauten Solarzellen. Vor der ersten Inbetriebnahme laden Sie den eingebauten Akku, indem Sie den Sensify Tür-Sensor für 15 Min. auf die Fensterbank oder unter eine Lampe legen.

 Setzen Sie den Sensify Tür-Sensor in dunklen Räumen wie Badezimmern oder Kellerräumen ein, bekommen die eingebauten Solarzellen nicht ausreichend Licht und der eingebaute Akku wird nicht geladen. In solchen Fällen können Sie in den Sensify Tür-Sensor eine Lithium-Knopfzelle einsetzen. Diese finden Sie unter der Bezeichnung „CR1225“.

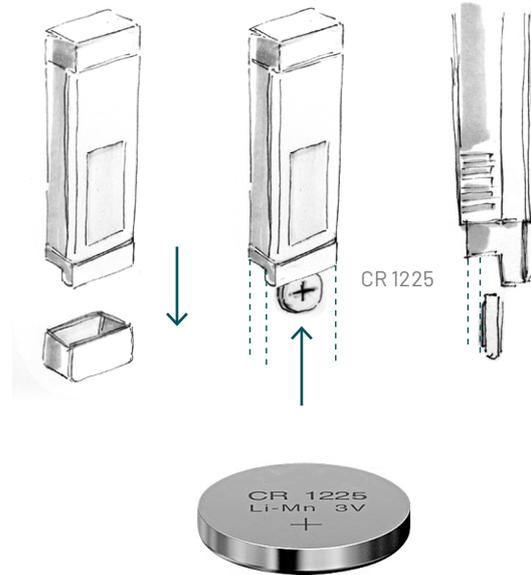

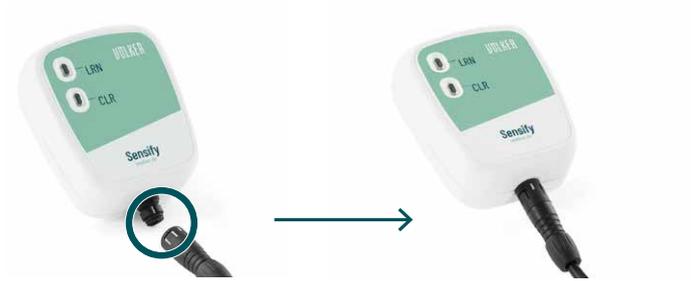

Sollten der Sensify Funk-Empfänger und das Adapterkabel noch nicht verbunden sein, holen Sie dies bitte nach.

 Es handelt sich um eine **Steckverbindung**, bitte drehen Sie also nicht den Stecker auf den Anschluss. Sowohl auf dem Funk-Empfänger als auch auf dem Adapterkabel finden Sie einen weißen Strich als Markierung – diese müssen übereinanderpassen.

2a. Anlernen im Arbeitsstrom-Modus

1. Suchen Sie eine Steckdose, die sich in der Nähe des Anschlusses Ihrer Meldeanlage befindet, sodass Sie nach Ende des Anlernvorgangs das freie Ende des Adapterkabels einstecken können.
2. In diese Steckdose stecken Sie den Funk-Empfänger.



3. Die CLR-Taste blinkt nun grün, der Funk-Empfänger befindet sich im Anlernmodus.



4. Drücken Sie nun einmal mit einem spitzen Gegenstand auf den Programmierknopf des Sensify Tür-Sensors.
5. Hat der Funk-Empfänger den Sensify Tür-Sensor erkannt, piept der Funk-Empfänger.



6. Die LRN-Taste des Funk-Empfängers leuchtet jetzt dauerhaft rot.

7. Der Funk-Empfänger und der Tür-Sensor sind nun dauerhaft miteinander verbunden.

2b. Anlernen im Ruhestrom-Modus

1. Suchen Sie eine Steckdose, die sich in der Nähe des Anschlusses Ihrer Meldeanlage befindet, sodass Sie nach Ende des Anlernvorgangs das freie Ende des Adapterkabels einstecken können.
2. In diese Steckdose stecken Sie den Funk-Empfänger.



3. Die CLR-Taste blinkt nun grün, der Funk-Empfänger befindet sich im Anlernmodus.



4. Drücken Sie einmal die LRN-Taste, um den Funk-Empfänger in den Ruhestrommodus umzustellen.



5. Die CLR-Taste blinkt jetzt rot.



← 1x



6. Drücken Sie nun einmal mit einem spitzen Gegenstand auf den Programmierknopf des Sensify Tür-Sensor.

7. Hat der Funk-Empfänger den Sensify Tür-Sensor erkannt, piept der Funk-Empfänger.

8. Die LRN-Taste des Funk-Empfängers leuchtet jetzt dauerhaft rot.


9. Der Funk-Empfänger und der Sensify Tür-Sensor sind nun dauerhaft miteinander verbunden.

3. Anlernen, wenn Sensify Bett-Sensoren oder Sensify Sensor-Matratze bereits an den Funk-Empfänger angelernt wurden.


1. Ziehen Sie den Funk-Empfänger aus der Steckdose.
2. Stecken Sie den Funk-Empfänger wiederum in die Steckdose.




3. Die LRN-Taste leuchtet nun dauerhaft rot, da der Funk-Empfänger bereits mit den Bett-Sensoren oder der Sensor-Matratze verbunden wurde.

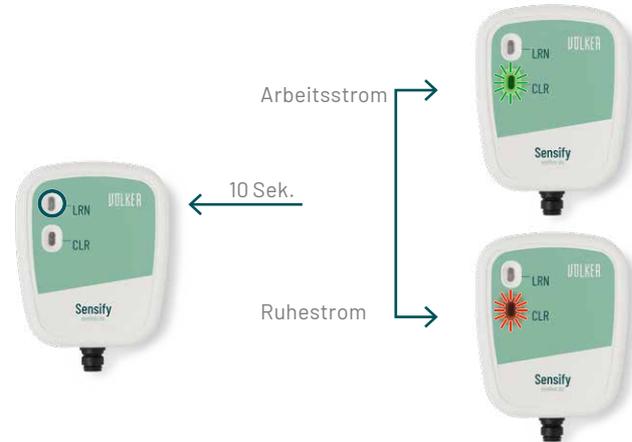

4. Drücken Sie die LRN-Taste ca. 10 Sek. bis die CLR-Taste grün blinkt (Arbeitsstrom) oder rot blinkt (Ruhestrom), je nachdem welches Rufanlagen-System Sie nutzen.

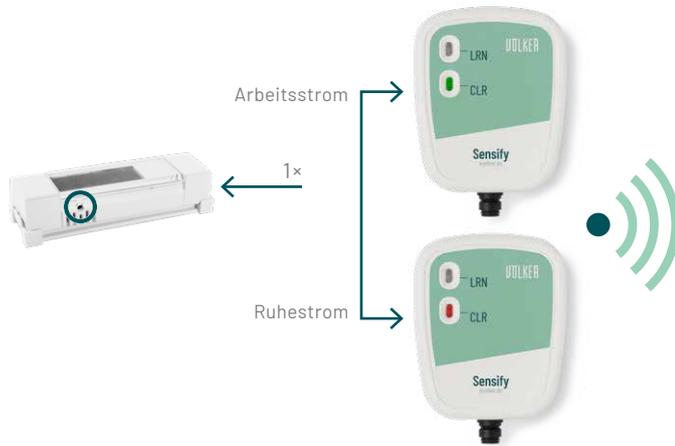

3. Drücken Sie jetzt 1× auf den Sensify Tür-Sensor. Die CLR-Taste leuchtet kurzzeitig (ca. 2 Sek.), dauerhaft grün (Arbeitsstrom) oder rot (Ruhestrom). Das erneute Blinken und ein akustischer Ton signalisieren, dass der Tür-Sensor erkannt wurde.

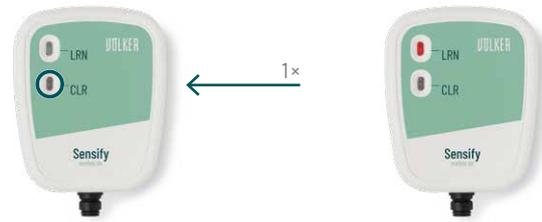

4. Zum Speichern der Einstellung die CLR-Taste kurz drücken. Die LRN-Taste leuchtet wieder dauerhaft rot.


4. Befestigung Tür-Sensor

1. Kleben Sie den Sensify Tür-Sensor mit dem Doppelklebeband auf den Rahmen der Tür, den Türschalter auf die Tür. Am besten am oberen Rand, so dass dieser nicht versehentlich oder bewusst entfernt werden kann.




Montage bei normaler Tür

2. Tür-Sensor oben auf Rahmen anbringen.

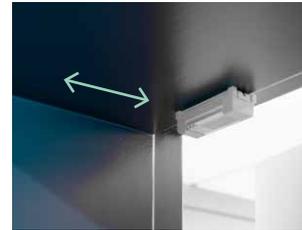

Montage bei bündig mit Wand abschließender Tür

2. Tür-Sensor außen anbringen.

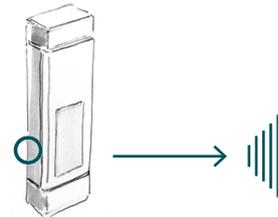

Auf dem Tür-Sensor ist ein Dreieck zu sehen. Diese Seite muss Kontakt mit dem Türschalter haben.

5. Verbinden mit der Rufanlage

Stecken Sie jetzt das Adapterkabel des Funk-Empfängers in den Anschluss Ihrer Rufanlage. Sie erhalten jetzt automatisch ein Signal, sobald die Tür oder das Fenster geöffnet wird.



TIPP Sollten Sie mehrere Sensify Assistenz-Systeme im Hause haben, nummerieren Sie diese Einheiten.

6. Löschen aller Einstellungen

In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Installation nicht wie beschrieben funktioniert.

Dann empfiehlt es sich, den Funk-Empfänger komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Durch Ziehen und Wiedereinstecken des Funk-Empfängers in die Steckdose kann die Einstellung innerhalb von 30 Sek. gelöscht werden.
2. Die LRN-Taste ca. 10 Sek. drücken, bis die CLR-Taste blinkt.
3. Die CLR-Taste ca 3 Sek. drücken, bis das Licht kurz ausgeht, bevor es wieder grün blinkt. Der Funk-Empfänger befindet sich jetzt wieder im Auslieferungszustand und kann entsprechend der Bedienungsanleitung neu eingestellt werden.

7. Wartung und Pflege

Völker Sensify Produkte können vorsichtig mit einem weichen Pfllegetuch und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

8. Desinfektion

Benutzen Sie handelsübliche Desinfektionsmittel.

9. Technische Daten

Matratzentyp	Funk-Empfänger	Tür-Sensor	Deaktivierungsschalter
Versorgungsspannung	230 VAC / 50 Hz		
Steckertyp	Schuko		
Energiegenerator		Solarzelle, interner goldcap wartungsfrei	
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C	-25 °C bis +65 °C	-25 °C bis +65 °C
Approbationen	CE	CE	CE
Schutzart	IP20	IP40 gemäß EN60529	
Funksystem	868,3 MHz EnOcean	868,3 MHz EnOcean	
Schaltweg		<4 mm	2 mm
Relative Luftfeuchte	0% bis 93%	0% bis 93%	
Masse (B×H×T)	6,5×9×7 cm	8×1,5×2 cm	8,5×1,7×8,5 cm

10. Hersteller Vertriebspartner

Hersteller von Völker Sensify Tür-Sensor

IQfy GmbH

Am Stadion 2

58540 Meinerzhagen

+49 2354 / 9449969

info@iqfy.de

**Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz** DE278220762

**Eingetragen beim Amtsgericht Iserlohn
Handelsregister** HRB 7382

Geschäftsführer Andreas Thometzek

Exklusiver Vertriebspartner Völker Sensify Tür-Sensor

**Hauptsitz
Völker GmbH**
Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Allgemeine Anfragen
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Vertrieb / Service / Ersatzteile
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365