


Kurzgebrauchsanweisung Klinikbett S 964


ab Baujahr 11/2017

VÖLKER

Patientenhandschalter E2508

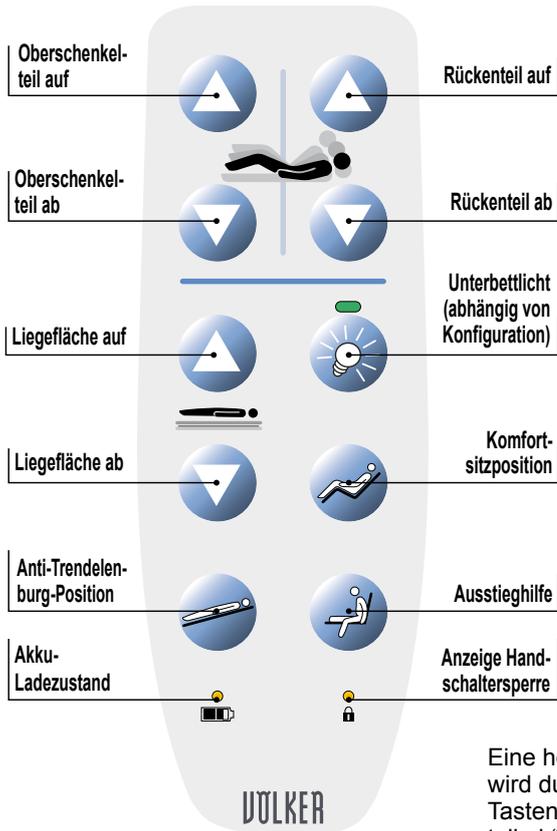


Patienten-/Personalhandschalter E2507

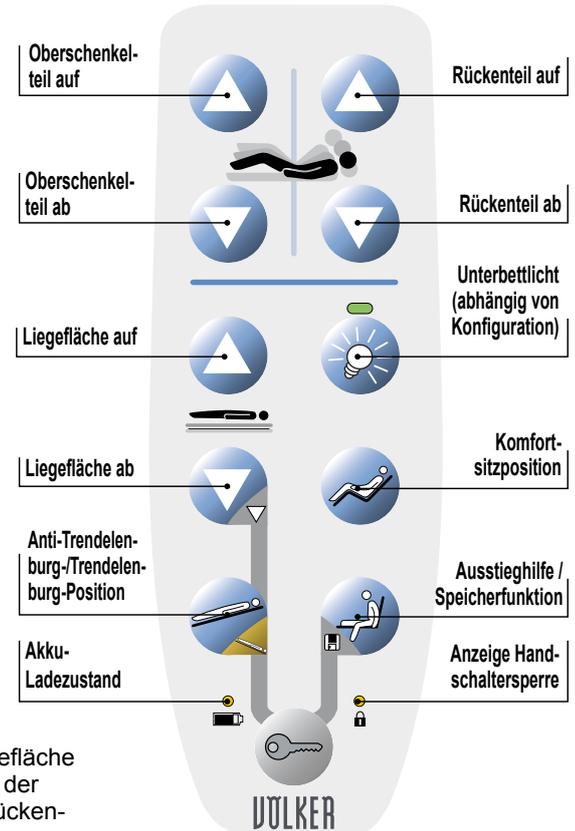

Eine horizontale Position der Liegefläche wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „Oberschenkel ab“ und „Rückenteil ab“ erreicht.

Personaltastatur BG6285

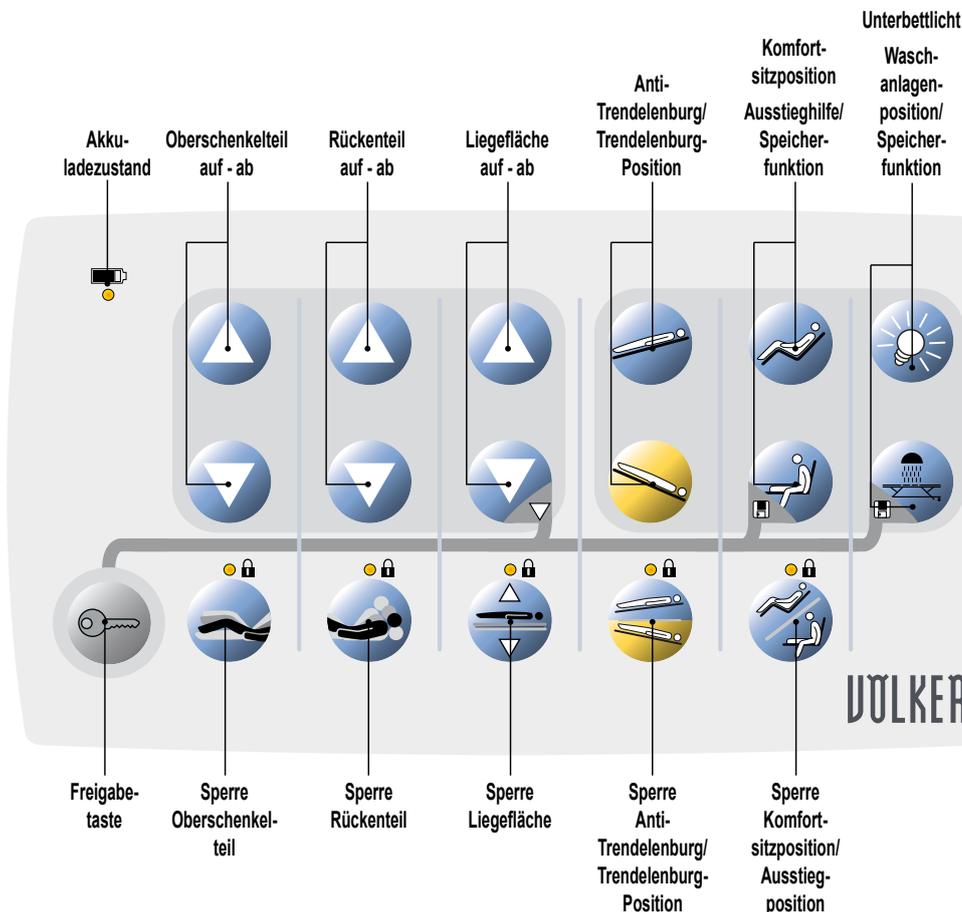

Bedeutung der LED's

Unterbettlicht [1] Diese LED leuchtet dauerhaft, um das Auffinden des Handschalters, bzw. der Taste des Unterbettlichts zu erleichtern.

Akkustatus [2] Ist der Akku ausreichend geladen, leuchtet diese LED nicht. Wird der Akku geladen, leuchtet die LED während des Ladevorganges dauerhaft. Ist der Ladestatus des Akkus kritisch, blinkt die LED, wenn ein Handschalter oder die Tastatur betätigt werden.

Handschaltersperre [3] Ist der Handschalter durch den Magnetschlüssel gesperrt, leuchtet die LED dauerhaft. Bei gesperrten Einzelfunktionen blinkt die LED bei dem Versuch, diese Funktion zu benutzen.

⚠️ WARNUNG Bei Verstellungen mit aufgestellten Seitengittern ist darauf zu achten, dass der Patient weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch seine oder die Körperteile anderer Personen durch die Seitengitter ragen oder sich zwischen Liegefläche und Untergestell bzw. Fußboden befinden!

Kurzgebrauchsanweisung Klinikbett S 964


ab Baujahr 11/2017

VÖLKER


Seitengitter

1. Seitengitter aufstellen

Ziehen Sie das Seitengitter seitlich horizontal ganz bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch (1).

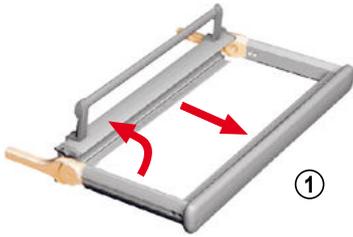


Ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben (2).

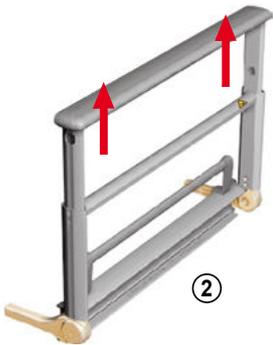


2. Seitengitter herunterklappen


Drücken Sie die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens, um den teleskopierbaren Teil in die niedrigste Position zu bringen. (3).

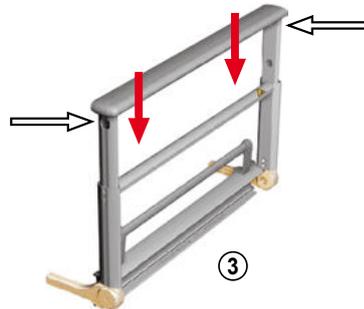

Betätigen Sie den mit „Drücken / Press“ beschrifteten Auslöser am unteren Ende des Seitengitters und kippen Sie es seitlich in die Horizontale, so dass es sich parallel zum Boden befindet. Schieben Sie das Seitengitter vollständig unter die Liegefläche (4).

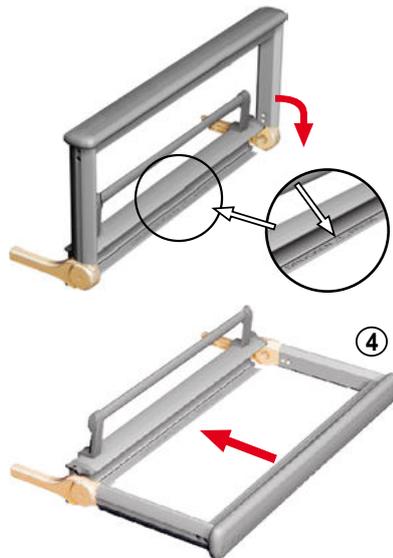

Bei Verwendung der erhöhten Seitengitter 43,5 - 45 cm müssen vor dem Aufstellen die Matratzenhalter auf- bzw. nach dem Einschleiben wieder eingeklappt werden (o. Abb.).

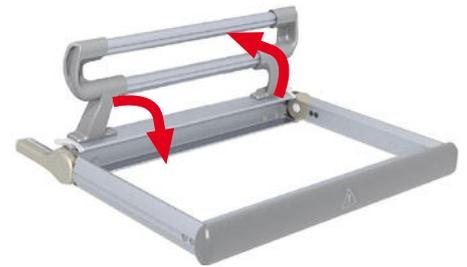


Beachten Sie, dass Seitengitter in der Höhe von 43,5 - 45 cm nur in Kombination mit Klemmstücken an den Kopf- und Fußteilen eingesetzt werden dürfen. Die Kopf- und Fußteile müssen dabei so positioniert sein, dass die Klemmstücke zur Innenseite des Bettes ausgerichtet sind. Der Warnaufkleber weist auf die Quetschgefahr an dieser Stelle hin.



⚠️ WARNUNG Die Seitengitter sollten immer mit zwei Händen an den Enden des jeweiligen Elements angefasst und nach oben bzw. unten geführt werden.

Schnellabsenkung des Rückenteils / CPR-Funktion

Das Bett verfügt über eine mechanische Schnellabsenkfunktion des Rückenteils zur Reanimation.

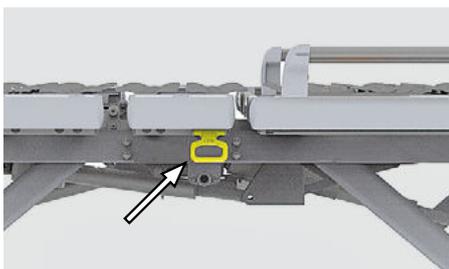

Hebel für die Schnellabsenkung des Rückenteils zur Reanimation, beidseitig unter dem Sitzteil.

Zur Schnellabsenkung des Rückenteils den gelben Hebel nach vorn ziehen. Das Rückenteil senkt sich schnell ab.

Der Motor der Rückenlehne wird automatisch wieder aktiviert, wenn der CPR-Griff losgelassen wird.

Eine unsachgemäße Benutzung der CPR-Funktion kann Schäden am Bett und/oder am Motor des Rückenteils nach sich ziehen!

⚠️ WARNUNG Die CPR-Funktion (Cardiopulmonary Resuscitation-Funktion) darf nur im **Notfall** und nur durch geschultes Fachpersonal ausgeführt werden!

⚠️ WARNUNG Die CPR-Funktion darf **nicht** anstatt des Handschalters zum Absenken des Rückenteils benutzt werden!