

Fehlerbehebung

Klinikbett / Pflegebett Vis-a-Vis

Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Bett kann nicht elektrisch verstellt werden.	(1) Tastensperre aktiviert. (2) Netzstecker nicht eingesteckt oder Steckdose führt keine Spannung und Akkupack ist entladen. (3) Akkupack ist von Schaltung getrennt. (4) Handschalter defekt. (5) Personalhandschalter defekt.	(1) Tastensperre deaktivieren. (2) Stecker einstecken oder Steckdose prüfen. (3) Grünen Knopf der Netzfreeschaltung drücken und anschließende Betätigung einer beliebigen Handschalterfunktion. (4) Handschalter austauschen. (5) Personalhandschalter austauschen.
Bett kann nicht höhenverstellt werden.	(6) Vis-a-Vis-Verriegelung wurde nach Rückstellung des Unterschenkelteils aus Vis-a-Vis Position nicht geschlossen. (7) Liegefläche ist nicht bis zum Endpunkt zum Kopfteil hin zurückgefahren.	(6) Vis-a-Vis-Verriegelung auf beiden Bettseiten schließen. (7) Auf Personalhandschalter die Taste „Längsverschiebung zurück“ drücken, bis die Liegefläche zum Endpunkt zurückgefahren ist.
Längsverschiebung des Bettes zum Fußteil hin kann nicht ausgeführt werden.	(8) Vis-a-Vis-Verriegelung ist nicht geschlossen.	(8) Vis-a-Vis-Verriegelung auf beiden Bettseiten schließen.
Riegel zwischen Ober- und Unterschenkelteil lässt sich nur schwer ent- bzw. verriegeln.	(9) Unterschenkelteil und Rest des Bettes sind nicht genau in einer Flucht, die Bettseiten sind nicht bündig.	(9) Sicherstellen, dass die Bettseiten in einer Flucht verlaufen und die Wangen zwischen Unterschenkelteil und Rest des Bettes genau bündig sind.
Unterschenkelteil lässt sich trotz Entriegelung nicht verschieben.	(10) Liegefläche ist nicht weit genug nach vorne gefahren.	(10) Vis-a-Vis-Verriegelung wieder schließen und auf Personalhandschalter die Taste „Längsverschieber vor“ drücken, bis die Liegefläche zum Endpunkt Richtung Fußteil gefahren ist.
Unterschenkelteil lässt sich nicht leichtgängig verschieben.	(11) Untergrund ist in Verschieberichtung uneben.	(11) Bett so positionieren, dass ein flacher Untergrund (frei von Kuhlen oder Erhebungen) im Verschiebereich des Unterschenkelteils vorhanden ist.
Liegefläche lässt sich nicht zum Kopfteil hin zurückfahren.	(12) Vis-a-Vis-Verriegelung ist nur einseitig verriegelt. (13) Komfortposition (Anti-Trendelenburg) ist nicht komplett heruntergefahren.	(12) Vis-a-Vis-Verriegelung auf beiden Bettseiten Richtung Kopfteil zum Verriegeln schieben. (13) Auf dem Handschalter die Taste „Liegefläche ab“ betätigen, bis die Liegefläche komplett waagrecht in unterster Position ist.