

Ziekenhuisbedden
Met onze bedden
ligt u goed



“Wij ontwikkelen ziekenhuisbedden die op de behoeften van zowel patiënten als zorgmedewerkers afgestemd zijn. Onze Völker-kwaliteit staat daarbij garant voor duurzame oplossingen.”

Yvonne Risch
Bestuur

Völker-ziekenhuisbedden

Oplossingen voor een menswaardige verzorging

Om binnen de uitdagende klinische werkzaamheden van alledag een effectieve en respectvolle verzorging te realiseren, hebben zorgmedewerkers en patiënten ondersteuning nodig op elk gebied waar dat mogelijk is. Vanuit deze visie denken, ontwikkelen en produceren wij.

Daarom biedt Völker ziekenhuisbedden met de meest uiteenlopende kenmerken en functies, waardoor u ze aan uw specifieke eisen kunt aanpassen en zo geschikt maken voor inzet op de meest diverse afdelingen. Onze bedden zijn ontworpen met oog voor patiëntveiligheid, comfort en ergonomisch werken. Hoogwaardige materialen en slimme ontwerpen zijn ontwikkeld om aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne te voldoen. Hierdoor gaan onze ziekenhuisbedden heel lang mee.



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**



**20 JAAR
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP
SERVICE**



**30 DAGEN
TESTEN**

Overzicht van Völker-ziekenhuisbedden

Technische gegevens



S 966

Veilige werklust		270 kg
Leeg gewicht		ca. 160 kg
Breedte ligoppervlak		90 / 100 cm
Lengte ligoppervlak		200 / 210 cm
Buitenmaten		99-114 cm*

Ook leverbaar in Protect-uitvoering



S 962-2/S 962-2 W

Maximale werklust		250 kg
Leeg gewicht		ca. 143 / 164 kg
Breedte ligoppervlak		90 / 100 cm
Lengte ligoppervlak		200 / 210 cm
Buitenmaten		99-114 cm*

Ook leverbaar in Protect-uitvoering



S 962-2 Vis-a-Vis

Maximale werklust		250 kg
Leeg gewicht		ca. 169 kg
Breedte ligoppervlak		90 cm
Lengte ligoppervlak		210 cm
Buitenmaten		99 cm

* Voor bedden van elke breedte en met alle typen beddekken





Ondersteuning in elke lichaamshouding

Ziekenhuisbed S 962-2

Manoeuvrbaarheid en rijeigenschappen van ziekenhuisbed S 962-2 bieden veel ondersteuning en veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis. De vier hefkolommen zorgen voor stabiliteit en maken het bed optimaal onderrijdbaar. Het onderstel is erop gebouwd om aan zeer hoge hygiëne-eisen te voldoen en is gemakkelijk te reinigen. Bovendien is ziekenhuisbed S 962-2 ook leverbaar in een wasbare uitvoering. Voor omgevingen waar bijzonder hoge eisen aan de veiligheid worden gesteld, leveren wij bedden in Protect-uitvoering.



Zeer goede reiniging door de gladde oppervlakken van het onderstel

Kleiner valrisico

Hooglaagbed S 966

Uit bed vallen leidt bij patiënten vaak tot letsel. Bovendien wordt het genezingsproces erdoor vertraagd. Het hooglaagbed S 966 gaat dit gevaar tegen doordat de lighoogte tot 28,5 cm kan worden teruggebracht. Bovendien is het als enige hooglaagbed voorzien van meebewegende bedhekken.

Doordat de bedhekken in het ligoppervlak kunnen worden geschoven, is de centrale rem ook in de laagste bedstand goed bereikbaar. Bovendien kunnen zorgmedewerkers er op de ergonomisch verantwoorde werkhoogte van 88,5 cm mee werken. Als optie is een centraal vijfde wiel leverbaar.



De onderbedverlichting, de verlichte handschakelaar en de betere oriëntatie in het donker verkleinen het valrisico.



Veiligheidsoplossingen op maat

Protect-bedden

Afdelingen met bijzonder kwetsbare patiënten vereisen wat de inrichting betreft speciale maatregelen ter bescherming van patiënten en zorgpersoneel. Met dit voor ogen hebben wij onze ziekenhuisbedden S 962-2 en S 966 doorontwikkeld. De uitrusting van onze Protect-bedden biedt een hoge mate van veiligheid, met doordachte aanpassingen. Enkele speciale kenmerken van de Protect-bedden zijn de vaste schroefverbinding van het HPL-ligoppervlak, de afneembare handschakelaar, het vergrendelbare bedieningspaneel voor medewerkers en de spiraalvormig ommantelde voedingskabel.



Door de vaste schroefverbindingen van het hoofd- en het voeteneinde en de universele houders voor onrustbanden zijn de bedden bijzonder veilig.





Verzorging op ooghoogte en gemakkelijke mobilisatie

Völker S 962-2 Vis-a-vis

Mobilisatie en de bevordering van zelfstandigheid spelen in elk genezingsproces een belangrijke rol. Patiënten met beperkingen of bij wie operatieve ingrepen zijn verricht, zijn vaak slecht in staat om hun bed via de zijkant te verlaten. Een uniek kenmerk van de S 962-2 Vis-a-vis is dat het ligoppervlak uit twee delen bestaat, waardoor de patiënt het bed naar voren toe kan verlaten. Het onderbeensegment van het tweedelige ligoppervlak kan worden verschoven, waardoor de patiënt echt rechtop kan zitten. Op deze manier worden mobilisatie en zelfstandigheid bevorderd.





Het gepatenteerde bedhekkensysteem van Völker


Meer veiligheid – zonder vrijheidsbeperkingen

Op alle verpleegafdelingen komt de veiligheid van de patiënt op de eerste plaats. Het gepatenteerde Völker-bedhekkensysteem biedt uw patiënten op elk moment bescherming. Het systeem bestaat links en rechts uit tweedelige bedhekken, die onafhankelijk van elkaar in 1 of 2 delen kunnen worden opgetrokken. Bij het instellen van hoofd- en voeteneinde bewegen de zijelementen mee – terwijl de patiënt niet bekneld kan raken. Daardoor zijn patiënten beschermd tegen ongewild uit bed rollen, ook als het bovenlichaamsegment omhoog staat. Als de bedhekken niet nodig zijn, kunnen ze in hun geheel in het ligoppervlak worden geschoven. Daardoor blijven alle functies van het onderstel steeds probleemloos bereikbaar.

Omdat het steeds mogelijk blijft om het bed via het middelste deel te verlaten, biedt het Völker-bedhekkensysteem onbeperkt bescherming.

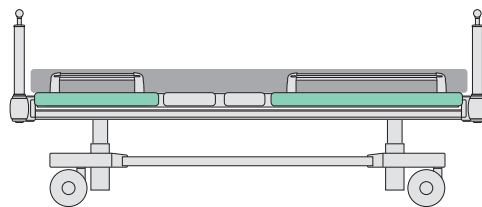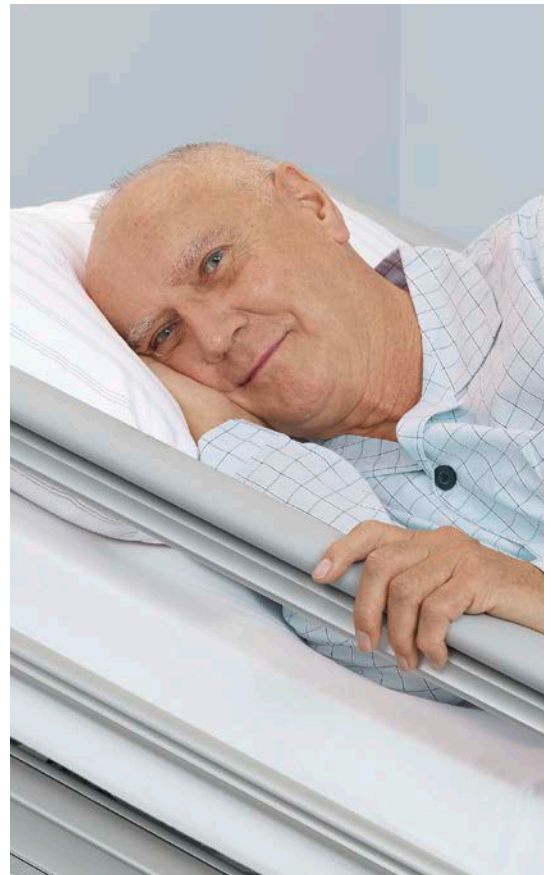

Als de bedhekken niet worden gebruikt, kunnen ze volledig in het ligoppervlak worden geschoven.

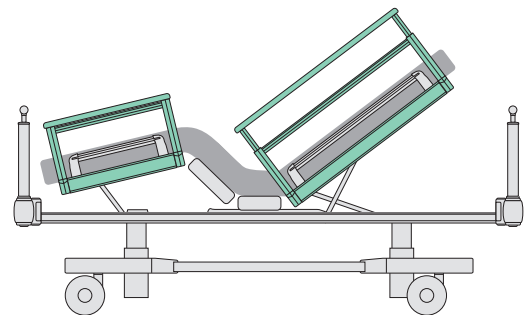

Dankzij de meebewegende bedhekken zijn hoofd en bovenlichaam steeds beschermd, ook als het bovenlichaamsegment omhoog staat.



Door de integratie van de bedhekken in het ligoppervlak is de rail voor toebehoren uitstekend toegankelijk en kan er ergonomisch worden gewerkt.





Uit bed stappen via het middelste gedeelte is bij het Völker-bedhekkensysteem altijd mogelijk. De stabiele constructie biedt de patiënt bovendien houvast en ondersteuning als hij zonder hulp het bed wil verlaten.




Doordachte constructie maakt mobilisatie gemakkelijker

Ergonomie voor patiënten en zorgmedewerkers

Het optimale ontwerp van de Völker-bedhekken verlicht het werk van zorgmedewerkers en bevordert de mobilisatie van patiënten. De bedhekken voorkomen niet alleen dat de patiënt uit bed rolt, maar zijn door hun stabiele constructie ook een belangrijke hulp als de patiënt het bed wil verlaten. Ze ondersteunen dus ook uw zorgmedewerkers. Als de bedhekken niet nodig zijn, kunnen ze in hun geheel in het ligoppervlak worden geschoven. Daardoor zijn er geen storende elementen beneden het ligoppervlak aanwezig. Dit maakt ergonomisch werken dicht bij het bed beter mogelijk.

Een slimme oplossing: in uitgetrokken toestand bieden de bedhekken indien nodig extra plaats en ondersteunen ze de mobilisatie.



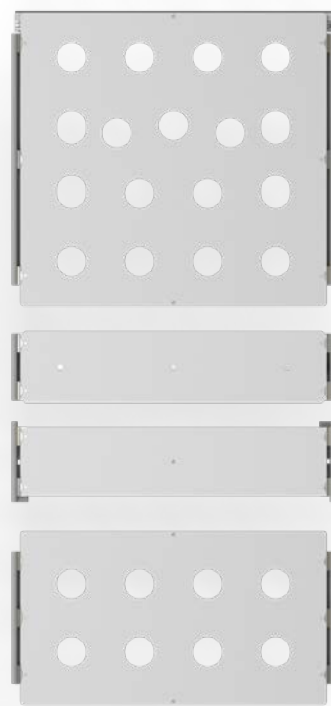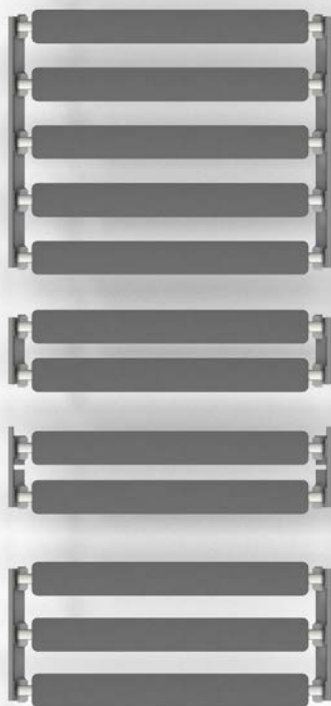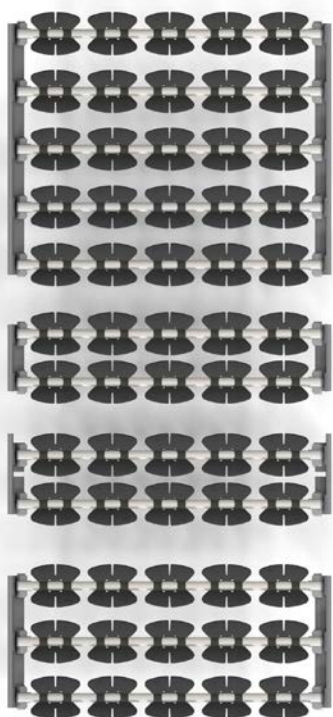

Doordacht tot in de details

Drie componenten, één systeem – voor liggen op het hoogste niveau

De ligoppervlaksystemen van Völker bestaan uit drie componenten: het verstelbare, vierdelige frame, een van drie opties voor het ligoppervlak en een hoogwaardig matras. Elk van deze componenten is afgestemd op de hoge hygiënische eisen waaraan in ziekenhuizen moet worden voldaan. Net als alle andere Völker-producten zijn ook onze ligoppervlaksystemen geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en ontwikkeld voor langdurig gebruik.

Optimaal op elkaar afgestemd:
de matrassen en ligoppervlakken van Völker



Onze ziekenhuisbedden zijn met drie verschillende ligoppervlakken leverbaar: MiS®, Stream en HPL.



Digitale oplossingen voor toekomstgerichte ziekenhuizen

Door de Sensify-assistentiesystemen, die al in de fabriek of naderhand in de MiS®-ligoppervlakken kunnen worden ingebouwd, kunt u patiënten en zorgmedewerkers meer veiligheid bieden. Zo bieden sensoren voor het uitbedmeldsysteem en voor lichtschakelaars belangrijke ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis. Volledig draadloos, zonder batterijen en onderhoudsvrij.

Bovendien kunnen uw ziekenhuisbedden door middel van onze digitale oplossingen (als optie leverbaar) in een digitaal beddenbeheersysteem worden geïntegreerd, zodat ze in realtime kunnen worden gevolgd.

Meer informatie over onze digitale oplossingen vindt u op **voelker.de**

Kenmerken

	S962-2	S962-2W	S 962-2 Vis-a-Vis	S966
Algemeen en ontwerp				
Design S	✓	✓	✓	✓
Geschikt voor wasinstallaties	-	✓	-	-
Verstelbaarheid van de hoogte	ca. 40 – 80 cm	ca. 40 – 80 cm	ca. 40 – 71 cm	ca. 28,5 – 88,5 cm
Breedte ligoppervlak				
90 cm	✓	✓	✓	✓
100 cm	○	○	○	○
Lengte ligoppervlak				
200 cm	✓	✓	-	✓
210 cm	○	○	✓	○
Ligoppervlak				
MiS® microstimulatiesysteem ¹	✓	✓	✓	✓
Völker Stream	○	○	-	○
Völker HPL (High Pressure Laminat)	○	○	○	○
Hoogte bedhekken				
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 34 – 35,5 cm	✓	✓	✓	✓
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 37 – 38,5 cm	○	○	○	○
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 43,5 – 45 cm	○	○	○	○
Vaste, tweedelige bedhekken: 42 – 43,5 cm	○	-	-	○
Montagevoorziening				
Enkele voorziening buitenzijde	✓	✓	✓	✓
Dubbele voorziening buitenzijde	○	○	○	○
Bedieningselement				
Handschakelaar met haak, overlangs	✓	✓	-	✓
Handschakelaar met clip , dwars*	○	○	✓	○
Handschakelaar voor zorgmedewerkers met volledige vergrendeling, overlangs	-	-	✓	-
Bedieningspaneel voor medewerkers met individuele vergrendeling, al dan niet automatisch te activeren door middel van dubbelklikken	✓	✓	-	✓
Bedieningspaneel voor medewerkers met individuele vergrendeling, al dan niet automatisch te activeren door middel van dubbelklikken en met extra functies	○	○	-	○
Wielen				
Enkelvoudige zwenkwielen Integral S (Ø 125 mm)	-	-	-	✓
Enkelvoudige zwenkwielen Integral S (Ø 150 mm)	✓	-	-	○
Enkelvoudige zwenkwielen Integral S (Ø 150 mm)	○	✓	-	○
Dubbele zwenkwielen Linea (Ø 125 mm)	-	-	✓	○
Dubbele zwenkwielen Twin (Ø 150 mm)	○	-	-	○
Dubbele zwenkwielen Linea (Ø 150 mm)	-	-	-	○
Stuurwiel				
Aan hoofdeinde	✓	✓	✓	✓
Aan voeteneinde	○	○	○	○
5e wiel (alleen mogelijk voor dubbele zwenkwielen Twin 150 mm)	-	-	-	○
Centrale rem				
Rempedaal aan het voeteneinde aan beide zijden	✓	✓	✓	✓
Speciale uitvoering				
Protect-uitvoering	✓	-	-	✓

Wij geven u graag advies!

✓ Standaard ○ Optie - Niet leverbaar * Niet bij vaste bedhekken



**20 JAAR
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE
DUURZAAMHEID**

Hoofdkantoor

Völker GmbH

Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960

Völker GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630